

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
1,4-DELTA ANDROSTENEDİON	Pazartesi Çarşamba	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,Lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
11-DEOKSİKORTİZOL	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,Lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	1 Ay Sonra 18.00
17-HİDROKSİ PROGESTERON	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,Lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
17-KETOSTEROİD	Pazartesi Perşembe	24 S idrar	6 N HCL üzerine toplanmış idrar	Asetik ya da borik asit de kabul edilir.	K:Uygun alım R:Soğuk ortamda gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
5-HİDROKSİ İNDOL ASETİK ASİT (5-HIAA)	Cuma	24 S idrar	6 N HCL üzerine toplanmış idrar	Son 72 saatte özel diyet kısıtlaması var. (*D*)	K:Uygun alım R:Soğuk ortamda gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
5-HİDROKSİTRİPTAMİN (SEROTONİN)	Pazartesi	Serum, 24 s idrar	6 N HCL üzerine toplanmış idrar	Son 72 saatte özel diyet kısıtlaması var. (*D*)	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,Lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
5'-NÜKLEOTİDAZ (5'-NT)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Soğuk ortamda gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
ABSE KÜLTÜRÜ	Her gün	Materyal	Yok	Yok	K:Steril swab R:Uygunsuz alım	Özel transport besiyeri ile	2 gün Sonra 18:00
ACE (ANGİOTENSİN KONVERTİNG ENZİM)	Her gün	Heparinli Plazma	12 saat önceden ACE inhibitörü alımı kesilmelidir	Yok	K:Santrifüjlü numune hemen ayrılmalı R:Hemoliz ,Lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18.00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
ACTH (ADRENOKORTİKOT ROPIK HORMON)	Her gün	Edtalı Plazma	06:00-08:00 arası yüksek Numune zamanı ayarlanmalı	Yok	K:Santrifüjlü numune hemen ayrılmalı R:Hemoliz ,Lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
ADA (ADENOZİN DEAMİNAZ)	Cuma Çarşamba	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,Lipemi	Soğuk zincir 2-8 C Düz Tüp	4 gün Sonra 18.00
ADACIK HÜCRE ANTİKORU (ISLET CELL ANTİKORU-ICA)	Pazartesi	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,Lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18.00
ADENOVİRUS ANTİJENİ (DFA)	Her gün	Gaita	Yok	Yok	K:Uygun alım R:Soğuk ortamda gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	1 gün Sonra 18.00
ADH(ANTİ DİURETİK HORMON)	Her gün	Edtalı Plazma/24 S idrar asitsiz	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,Lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	20 gün sonra 18.00
AFP (ALFAFETOPROTEİN)	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
AKTİVE PROTEİN C REZİSTANSI	Her gün	Sitratlı plazma	Yok	Plazma hemen ayrılmalıdır	K:Uygun Seviye R:Pihtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
ALBUMİN	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
ALDOLAZ	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
ALDOSTERON	Çarşamba Cumartesi	Serum idrar	Son 2 saat aynı pozisyonda durmalı (*D*)	6 N HCL üzerine toplanmış idrar	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
ALFA-1 ANTİTRİPSİN	Salı	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18.00
ALP (ALKALEN FOSFATAZ)	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
ALP İZOENZİMLERİ	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,Lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	4 Hafta Sonra 18:00
ALT (SGPT)	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,Lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
ALÜMİNYUM	Her gün	Serum 24 S idrar	Son 24 saatte AL içeren antiasit kullanılmamalı	*Danışınız	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,Lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	12 gün Sonra 18:00
AMİLAZ	Her gün	Serum, idrar	Serum için, 10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
AMİLAZ PANKREATİK	Her gün	Serum, idrar	Serum için, 10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
AMİNOASİT	Her gün	Heparinli plazma idrar	*Danışınız	*Danışınız	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,pıhtı,idrar için dondurulma	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
AMONYAK	Her gün	Heparinli plazma	Yok	Numune hemen ayrılmalı	K:Santrifüjlü ve dondurulmuş numune R:Hemoliz,sıcak ortam	Soğuk zincir Kuru buz	3 gün Sonra 18:00
ANCA (c-ANCA) (PR3ANCA)	Perşembe	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R: Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
ANCA (p-ANCA) (ANTİ MPO)	Perşembe	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R: Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
ANDROSTENEDİON	Pazartesi Çarşamba	Serum	Diurnal varyasyon vardır	Sabah 06:00- 08:00 arası numune alınmalıdır.	K:Santrifüjlü numune R: Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
ANGİOTENSİN I	Laba Danışın	*	*	*	K:Santrifüjlü numune R: Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	*
ANGİOTENSİN II	Laba Danışın	*	*	*	K:Santrifüjlü numune R: Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	*
ANTİ HBc IgG	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
ANTİ HBc IgM	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
ANTİ HBe	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
ANTİ HBe (Mikroelisa)	Perşembe	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	1 gün Sonra 18:00
ANTİ HBs	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
ANTİ HBs (Mikroelisa)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	1 gün Sonra 18:00
ANTİ CCP (CYCLIC CITRULLINATED PEPTİD Ab)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
ANTİ FAKTÖR Xa	Her gün	Sitratlı plazma	Yok	Yok	K:Uygun seviye R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
ANTİ HCV	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
ANTİ HCV (Mikroelisa)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	1 gün Sonra 18:00
ANTİ HCV DOĞRULAMA (Western blot)	Laba Danışın	*	*	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	*
ANTİ-Ds DNA /ANTİ DNA	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
ANTİ-DÜZ KAS ANTİKOR (ASMA)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
ANTİ-ENDOMİSYUM IGA (EMA)	Hergün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
ANTİ-ENDOMİSYUM IGA (EMA)	Hergün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
ANTİ-FOSFOLİPİD İGG	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
ANTİ-FOSFOLİPİD İGM	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
ANTİ-GAD	Pazartesi	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
ANTİ-GLİADİN İGA	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
ANTİ-GLİADİN İGG	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
ANTİ-HAV İgM	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C p	Aynı gün
ANTİ-HAV Total	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
ANTİ-HEPATİT E (HEV)	Çarşamba	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
ANTİ-İNSÜLİN ANTİKOR	Pazartesi	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
ANTİ-JO-1	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün sonra 18:00
ANTİKARDİYOLİPİN (ACA IGG)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,Lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18.00
ANTİKARDİYOLİPİN (ACA IGM)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,Lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18.00
ANTİ-MİTOKONDRİAL ANTİKOR (AMA)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
ANTİ-MİTOKONDRİAL ANTİKOR TİP M-2 (AMA M-2)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
ANTİ-MÜLLERİAN HORMON (AMH)	Cuma	Serum	Yok	Tercihen adetin 2. ve 3. Günü numune alımı	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Çarşamba 18:00
ANTİ-NÜKLEER ANTİKOR (ANA)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
ANTİ-PARİETAL HÜCREANTİKORU (APCA)	Cuma	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
ANTİ-SCL 70	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
ANTİ-SENTROMER B	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
ANTİ-SLA	Laba Danışın	Serum	*	*	*	Soğuk zincir 2-8 C	*
ANTİ-SPERM ANTİKOR (ASA) (IgM-IgG)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
ANTİ-SS-A (ANTİ-RO)	Salı	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra
ANTİ-SS-B (ANTİ-LA)	Salı	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
ANTI-TG (ANTI-T) (Anti Tiroglobulin)	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
ANTI-TPO (ANTI-M) (Tiroid Peroksidaz Ab.)	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
ANTI-TROMBİN III AKTİVİTESİ	Pazartesi	Sitratlı plazma	Yok	Numune hemen ayrılmalıdır	K:Uygun seviye R:Hemoliz, Lipemi, pıhtı	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
ANTI-TROMBOSİT ANTİKORU	Her gün	Edtalı tam kan	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, Lipemi, pıhtı	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
APOLİPROTEİN A-1 (APO A-1)	Cuma Çarşamba	Serum	8-10 saatlik sabah açlığı son 24 saat egzersiz yok	En az 10 dk dinlenme sonrası ve kısa turnike zamanı	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
APOLİPROTEİN B-100 (APO –B-100)	Cuma Çarşamba	Serum	8-10 saatlik sabah açlığı	En az 10 dk dinlenme sonrası ve kısa turnike zamanı	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
APTT	Her gün	Sitratlı Plazma	Heparin kullanımından önce kan alınmalıdır	Heparin uygulanan koldan kan alınmamalıdır	K:Uygun Seviye R:Pıhtılı, hemolizli numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
ARB ARANMASI (TBC BASİLİ)	Her gün	Balgam İdrar Mayi	Yok	Yok	K:Uygun numune kabı R:Tükrük numunesi	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00
ARİL SÜLFATAZ A	***Lab a danışınız	***Lab a danışınız	***Lab a danışınız	***Lab a danışınız	***Lab a danışınız	Soğuk zincir 2-8 C	***

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
ARSENİK	Her gün	24 S İdrar *Saç Tam kan	6 N HCL, borik ya da asetik a. üzerine toplanmış idrar	Yok	K:Uygun numune kabı R:Uygunsuz toplama	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün Sonra
ASCA IGA (Antisaccharomyces cerevisiae)	Cuma	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	8 gün Sonra
ASCA IGG (Antisaccharomyces cerevisiae)	Cuma	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	8 gün Sonra
ASETİLKOLİN RESEPTÖR ANTİKORU	Pazartesi	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
ASETİLKOLİNESTER AZ	Her gün	Serum Sitrattlı plazma Amniyotik Mayi	Amniyotik Mayi için 3 lü tarama formu doldurulmalıdır	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, Lipemi, pıhtı	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün Sonra 18:00
ASİT FOSFATAZ (Total-Prostatik)	Her gün	Serum	Yok	Rektal muayeneden 72 saat sonra	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
ASO (ANTİSTREPTOLİZİN O) LATEX	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
ASO (ANTİSTREPTOLİZİN O) TURBİDİMETRİK	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
AST (SGOT)	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,Lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
BAKIR (Cu)	Her gün	Serum, 24 S idrar	Serum için, 10-12 saat açlık ,	İdrar asitsiz olmalıdır.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün Sonra 18:00
BALGAM KÜLTÜRÜ	Her gün	Balgam	Yok	Yok	K:Steril Kap R:Tükrük numunesi kabul edilmez	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
BENCE-JONES PROTEİNİ	Her gün	Spot idrar 24 S idrar	Yok	Yok	K:Uygun kaba alınması R:Uygunsuz numune toplama	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
BETA HCG (B-HCG)	Her gün	Serum, idrar	3-6 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
BETA-2 GLİKOPROTEİN I IGA	Laba Danışın	*	*	*	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	*
BETA-2 GLİKOPROTEİN I IGG	Çarşamba	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
BETA-2 GLİKOPROTEİN I IGM	Çarşamba	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
BETA-2 MİKROGLOBULİN	Her gün	Serum 24 S idrar Spot idrar Bos	<6 Ph idrar için 1 M NaOH eklenmelidir.	Bos için jelsiz düz tüp	K:Uygun kaba alım R:Düşük idrar Ph sı	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
BETA-2 TRANSFERRİN	Laba Danışın	Burun ve kulak akıntısı + Serum	*	Tüm numuneler jelsiz düz tüpe alınmalıdır	K:Uygun kaba alım R:Aşırı kanlı, mukuslu numune	Soğuk zincir 2-8 C	*
BİKARBONAT (HCO ₃)	Her gün	Serum, plazma	10-12 saat açlık	Numune direkt ışıkta korunmalıdır	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
BİLİRUBİN İNDİREKT	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Numune direkt ışıkta korunmalıdır	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
BİLİRUBİN NEONATAL	Her gün	Kapiller kan	Hastanın bir aylıktan küçük olması tercih edilir.	Numune direkt ışıkta korunmalıdır	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
BİLİRUBİN TOTAL	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Numune direkt ışıkta korunmalıdır	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
BİLİRUBİN DİREKT	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Numune direkt ışıkta korunmalıdır	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
BIOTİNİDAZ AKTİVİTESİ	Her gün	Serum	Yok	Hemen santrifüj ve dondurma işlemi	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir Kuru buz	15 gün Sonra 18:00
BNP (BRAIN NATRİÜRETİK PEPTİD)	Her gün	Heparinli plazma	Yok	Numunenin hemen santrifüjü gerekir	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, Lipemi, uzun bekleme	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
BOĞAZ KÜLTÜRÜ	Her gün	Sürüntü numunesi	Yok	Yok	K: Steril swab R: Uygunuz alım	Özel transport besiyeri ile	2 gün Sonra 18:00
BORRELİ BURGDORFERİ IGG	Cuma Çarşamba	Serum	Yok	Yok	K: Santrifüjlü numune R: Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
BORRELİ BURGDORFERİ IGM	Cuma Çarşamba	Serum	Yok	Yok	K: Santrifüjlü numune R: Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
BOS KÜLTÜRÜ	Her gün	BOS	Yok	Yok	K: Steril swab R: Uygunuz alım	Özel transport besiyeri ile	2 gün Sonra 18:00
Boyalı Mikroskopik İnceleme (Gram, M. Mavisi Wright, Ziehl-Nielsen, vb.)	Her gün	Materyal	Yok	Tercihen sabah numunesi	K: Steril Kap R: Donmuş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00
Boyasız Mikroskopik İnceleme	Her gün	Materyal	Yok	Tercihen sabah numunesi	K: Steril Kap R: Donmuş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00
BRUCELLA COOMBS (Tüp Aglutinasyon)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K: Santrifüjlü numune R: Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
BRUCELLA IGG	Her gün	Serum	Yok	Yok	K: Santrifüjlü numune R: Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
BRUCELLA IGM	Her gün	Serum	Yok	Yok	K: Santrifüjlü numune R: Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
BRUCELLA WRIGHT (TüpAglütinasyon)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün
BRUCELLATARAMA (Rose Bengal)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
BURUN KÜLTÜRÜ	Her gün	Sürüntü numunesi	Yok	Yok	K:Steril swab R:Uygunsuz alım	Özel transport besiyeri ile	2 gün Sonra 18:00
C1 ESTERAZ İNHİBİTÖR	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
CA 125	Her gün	Her gün	3-6 saat açlık	Ovülasyon, Menstrüasyon Dönemlerinde ölçülmez	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
CA 15-3	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
CA 19-9	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
CA 72-4	Cuma Çarşamba	Serum	3-6 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
CEA (KARSİNOEMBRYON İKANTİJEN)	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Sigara içilip içilmediği sorgulanmalıdır.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
CHLAMYDIA ANTİJENİ	Her gün	Sürüntü numunesi Spot idrar	Yok	Bayanda özel swap Erkeklerde ön idrar numunesi	K:uygun kapta numune R: oda ısısında bekletme	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün Sonra 18:00
CHLAMYDIA PNEUMONİAE IGG	Cuma	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
CHLAMYDIA PNEUMONİAE IGM	Cuma	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
CHLAMYDIA TRACHOMATİS IGA	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	30 gün Sonra 18:00
CHLAMYDIA TRACHOMATİS IGG	Cuma	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
CHLAMYDIA TRACHOMATİS IGM	Cuma	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
CİVA	Her gün	Edtalı tam kan Saç 24 S idrar	Saç için tercihen en az 10 gram ense saçı	İdrar için asitsiz idrar	K:Uygun toplanan numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	14 gün Sonra 18:00
CLOSTRİDİUM DİFFİCİLE TOKSİN A-B	Her gün	Gaita	Yok	Yok	K:Uygun kapta numune R: Yanlış numune	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
CMV AVİDİTE	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
CMV IgG	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
CMV IgG (mikroelisa)	Pazartesi Perşembe	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00
CMV IgM	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
CMV IgM (mikroelisa)	Pazartesi Perşembe	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00
COOMBS DİREKT	Her gün	Edtalı tam kan	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00
COOMBS İNDİREKT	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00
C-PEPTİD	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
CRP (C REAKTİF PROTEİN) High Sensitive	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
CRP (C REAKTİF PROTEİN) Latex	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
ÇİNKO (AAS)	Her gün	Serum 24 S idrar Saç	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra (Saç numunesi 5 gün Sonra)
ÇİNKO (Fotometrik)	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
D-DİMER	Her gün	Sitratlı plazma	3-6 saat açlık	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün
DELTA (HDV) ANTİJENİ	Çarşamba	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
DELTAANTİKOR (ANTİ-HDV)	Salı Cuma	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
DEMİR	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Sabah açlığı numunesi tercih edilir	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, IM demir preparatı kullanımı	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Sabah açlığı numunesi tercih edilir	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, IM demir preparatı kullanımı	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
DEOKSİPİRİDİNOLİN (PYRİLLİN-D)	Çarşamba	24 S idrar Spot idrar	Yok	6 N HCL, borik ya da asetik a. üzerine toplanmış idrar	K:Uygun kaba alınması R:Uygunsuz toplama	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
DESMOGLEİN 1 VE 3	Laba Danışın	*	*	*	*	*	*
DHEA-S (DHEA-SO ₄) (DEHİDROEPIANDRO STERON)	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
DİGOKSİN	Her gün	Serum	Son 12 saatte ilacın alınmaması	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
DİĞER KÜLTÜRLER	Her gün	Materyal ya da değişik sürüntü örnekleri	Yok	Yok	K:Steril kap R:Uygunsuz alım	Özel transport besiyeri ile	2 gün Sonra 18:00
DİHİDROTESTOSTERON (DHT)	Cuma	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, Lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün Sonra 18:00
DOKU TRANSGLUTAMİNAZ IgA	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, Lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
DOKU TRANSGLUTAMİNAZ IgG	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, Lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
DOPAMİN	Perşembe	Heparinli plazma 24 S idrar	8-10 saatlik sabah açlığı ve son iki hf ilaç kısıtlama *	En az 30 dk dinlenme sonra tercihen venöz katater ile	K Hemen santrifüj R:Hemoliz, Lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün Sonra 18:00
DÖRTLÜ TARAMA TESTİ (İkinci trimester tarama testi)	Her gün	Serum	BPD ölçümünü içeren özel test formu mutlaka doldurulmalıdır	Gebeliğin 15 hf+0 gün ile 20 hf+6 gün arasında kan alınmalıdır	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
EBV EBNA IgM	Çarşamba Cuma	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra
EBV VCA IgG	Çarşamba Cuma	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
EBV VCA IgM	Çarşamba Cuma	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
EBV EA IgG	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün Sonra 18:00
EBV EA IgM	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
EBV EBNA IgG	Çarşamba Cuma	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
EKLEM SIVISI (synovial) KÜLTÜRÜ	Her gün	Eklem Sıvısı	Yok	Steril şartlarda	K:Steril tüpe alım R:Uygunsuz alım	Steril tüp ile	2 gün Sonra 18:00
ENA PROFİLİ (IMMUNBLOT)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, Lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
ENTEROVİRUS PCR	Perşembe	Plazma Bos Nasofaringeal sürüntü rektal swab	Yok	Yok	K:Uygun tüp/kab R:Kontamine numuneler	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra 18:00
EOZİNOFİL (Total)	Her gün	Edtalı tam kan	Yok	Diurnal varyasyonu var sabah 10:00- 12:00 de maximum	K:Uygun tüpe alınması R:Pihtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
EOZİNOFİL KATYONİK PROTEİN (ECP)	Pazartesi	Serum	Yok	Alım sonrası 1-2 saat oda ısısında bekletilmeli ve 1000-1500 devirde santrifüj edilmeli	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, Lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
EPİNEFRİN (ADRENALİN)	Perşembe	Heparinli plazma 24S idrar			K:Uygun tüp/kab	Soğuk zincir 2-8 C	7gün Sonra 18:00
ERİTROPOİETİN	Pazartesi	Serum				Soğuk zincir 2-8 C	Cuma 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
ESTRADIÖL (E2)	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Kadında tercihen adetın 2-5. günleri	K:Santrifüjlı numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
ESTRİÖL (E3,uE3,serbest E3)	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlı numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
FAKTÖR II (Protrombin)	Her gün	Sitratlı plazma				Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
FAKTÖR IX (Christmas Faktör)	Her gün	Sitratlı plazma				Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
FAKTÖR V LEİDEN MUTASYONU (PCR)	Her gün	Edtalı tam kan				Soğuk zincir 2-8 C	12 gün Sonra 18:00
FAKTÖR V (Proakselerin)	Her gün	Sitratlı plazma				Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
FAKTÖR VII (Prokonvertin)	Her gün	Sitratlı plazma				Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
FAKTÖR VIII	Her gün	Sitratlı plazma				Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
FAKTÖR VIII İNHİBİTÖR	Her gün	Sitratlı plazma				Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
FAKTÖR X (Stuart Faktör)	Her gün	Sitratlı plazma				Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
FAKTÖR XI	Her gün	Sitratlı plazma				Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
FAKTÖR XII (Hageman Faktör)	Her gün	Sitratlı plazma				Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
FAKTÖR XIII (Fibrin stabilize edici faktör)	Her gün	Sitratlı plazma				Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
FAMİLİAL AKDENİZ ATEŞİ MUTASYON ANALİZİ	Laba Danışın	Edtalı tam kan				Soğuk zincir 2-8 C	Lab'a Danışınız
FENİLKETONÜRİ TARAMASI	Her gün	Topuktan emdirilmiş kan				Soğuk zincir 2-8 C	10 gün Sonra 18:00
FENİTOİN (DİFENİLHİDANTOİN)	Her gün	Serum				Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
FENOBARBİTAL (LUMİNAL)	Her gün	Serum				Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
FERRİTİN	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
FİBRİNOJEN (Faktör 1)	Her gün	Plazma	Yok	Yok	K:Uygun Seviye R:Pihtılı, hemolizli numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
FOLAT (FOLİKASİT)	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
FORMÜLLÖKOSİT	Her gün	Tam kan	Yok	Yok	K:Uygun Seviye R:Pihtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
FOSFOR (P,PO4)	Her gün	Serum, 24 s idrar	Serum için, 10-12 saat açlık	İdrar için toplama süresi ve miktarı belirtilmelidir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
FSH (FOLLİKÜL STİMÜLAN HORMON)	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Kadında tercihen adetın 2-5. günleri	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
FTA-ABS (Floresan Treponemal Ab-Abs)	Perşembe	Serum				Soğuk zincir 2-8 C	10 gün Sonra 18:00
GAİTAKÜLTÜRÜ	Her gün	Gaita	Yok	Yok	K:Gaita Kabı R:Uygunsuz alım	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
GAİTADA ADENOVİRÜS ANTİJENİ	Her gün	Gaita				Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
GAİTADAAMİP ANTİJENİ	Her gün	Gaita				Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
GAİTADA DİREKT BAKI (Gaita Mikroskopisi)	Her gün	Gaita	Numune sıvı ise max 30 dk, katı ise 120 dk içinde ulaştırılmalıdır	1 cm ³ numune yeterlidir	K:2-8 C de 30 dk ya kadar beklemiş numune R:30 dk dan fazla beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
GAİTADA GIARDIA ANTİJENİ	Her gün	Gaita				Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
GAİTADA GİZLİ KAN	Her gün	Gaita	Yok (Testimiz monoklonal ve insan kanına duyarlıdır.)	1 cm ³ numune yeterlidir	K:2-8 C de 3 güne kadar beklemiş numune R:3 günden fazla beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
GAİTADA HAZIM	Her gün	Gaita		1 cm ³ numune yeterlidir	K:2-8 C de 120 dk ya kadar beklemiş numune R:120 dk dan fazla beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00
GAİTADA PARAZİT YUMURTASI	Her gün	Gaita	Numune sıvı ise max 30 dk, katı ise 120 dk içinde ulaştırılmalıdır	1 cm ³ numune yeterlidir	K:2-8 C de 120 dk ya kadar beklemiş numune R:120 dk dan fazla beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C Gaita kabı	Aynı gün
GAİTADA PH	Her gün	Gaita	Yok	1 cm ³ numune yeterlidir	K:2-8 C de 120 dk ya kadar beklemiş numune R:120 dk dan fazla beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
GAİTADA REDÜKTAN MADDE	Her gün	Gaita	Yok	1 cm ³ numune yeterlidir	K:2-8 C de 6 saate kadar beklemiş numune R:6 saatten fazla beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
GAİTADA ROTAVİRÜS ANTİJENİ	Her gün	Gaita	Yok	1 cm ³ numune yeterlidir	K:2-8 C de 120 dk ya kadar beklemiş numune R:120 dk dan fazla beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
GAİTADA YAĞ ANALİZİ (Sudan III Black)	Her gün	Gaita	Yok	1 cm ³ numune yeterlidir	K:2-8 C de 6 saate kadar beklemiş numune R:6 saatten fazla beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
GALAKTOMANNAN (ASPERGİLLUS) ANTİJENİ	Salı	Serum				Soğuk zincir 2-8 C	Cuma 18:00
GALAKTOZ-1 FOSFAT ÜRİDİL TRANSFERAZ (GALT)	Laba Danışın	Edtalı tam kan	*	*	*	Soğuk zincir 2-8 C	*
GASTRİN	Her gün	Serum	8-10 saat açlık	Gastroskopi sonrası numune alınmamalıdır	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,Lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
GENİTAL Sürüntü/Akıntı KÜLTÜRÜ	Her gün	Sürüntü numunesi	Yok	Yok	K:Steril swap R:Uygunuz alım	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
GGT (GAMAGLUTAMİLTRANSFERAZ)	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
GLOBULİN	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
GLUKOZ (Açlık)	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Sabah açlığı numunesi tercih edilir	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz , uzun süre beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
GLUKOZ (Gün içi)	Her gün	Serum, idrar, diğer mayii	Yok	Materyale özgü	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz , uzun süre beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
GLUKOZ (Tokluk)	Her gün	Serum	Yemek Sonrası 2. saat tokluk	2 saatlik süre ilk lokmadan itibaren hesaplanmalıdır	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz , uzun süre beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
GLUKOZ 6 FOSFAT DEHİDROGENAZ (G6PDH)	Her gün	Edtali tam kan	Yok	Yok	K:Uygun Seviye R:Pihtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
GÖZ (Konjonktiva) KÜLTÜRÜ	Her gün	Sürüntü numunesi	Yok	Yok	K:Steril swap R:Uygunsuz alım	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
GROWTH HORMON (Büyüme Hormonu)	Cuma Salı	Serum	10-12 saat sabah açlığı	30 dakika dinlenme sonrası	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,Lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün sonra 18:00
HAPTOGLOBİN	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
HbA1C	Her gün	Tam kan	Yok	Yok	K:Uygun Seviye R:Pihtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
HBeAg	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
HBeAg (Mikroelisa)	Perşembe	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Cuma 18:00
HBsAg	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
HBsAg (mikroelisa)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün
HBV DNA (PCR)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
HCV RNA (PCR)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
HDV RNA (PCR)	Perşembe	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
HELİKOBAKTER PYLORİ (Direkt Antijen)	Her gün	Gaita	Yok	Soğuk ortamda numune gönderimi	K:2-8 Cde 120 dk ya kadar beklemiş numune R:120 dk dan fazla beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
HELİKOBAKTER PYLORİ IgA	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
HELİKOBAKTER PYLORİ IgG	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
HEMOGLOBİN ELEKTROFOREZİ (HPLC)	Pazartesi Çarşamba Cuma	Tam kan	Yok	Yok	K:Uygun Seviye R:Pihtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00
HEMOGRAM *Bakınız Tam Kan Tahlili	*						*
HIV (p24Ag+IgG) (mikroelisa)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00
HIV ½ ANTİKOR	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
HIV DOĞRULAMA (Western Blot)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C Düz Tüp	15 gün Sonra 18:00
HLA-B27	Her gün	Edtalı Tam Kan	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Pihtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
HLA-B5 (51,52)	Pazartesi	Edtalı Tam Kan	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Pihtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
HLA-B7	Her gün	Edtali Tam Kan	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Pihtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
HLA-DR	Her gün	Edtali Tam Kan	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Pihtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
HOMOSİSTEİN	Pazartesi Çarşamba	Edtali plazma	10-12 saat sabah açlığı	Hemen santrifüjleme	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz ve pıhtı	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
HSV TİP 1 IgG (Herpes Simpleks)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
HSV TİP 1 IgM (Herpes Simpleks)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
HSV TİP 1 PCR (BOS)	Lab'a danışınız	Bos	Yok	Yok	K:Uygun numune R:Steril olmayan numune	Soğuk zincir 2-8 C	*
HSV TİP 2 IgG (Herpes Simpleks)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
HSV TİP 2 IgM (Herpes Simpleks)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
HUMAN PAPİLLOMA VİRUS (HPV) PCR	Her gün	Sürüntü numunesi	Yok	Jelsiz swap ile	K:Uygun numune R:Steril olmayan numune	Soğuk zincir 2-8 C	20 gün sonra
IGF-1 (SOMATOMEDİN C)	Çarşamba Cuma	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, Lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün sonra 18:00
IGFBP-3 (İNSÜLİN LİKE GROWTH FAKTÖR BAĞLAYAN PROTEİN -3)	Çarşamba Cuma	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, Lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün sonra 18:00
İDRAR KÜLTÜRÜ	Her gün	İdrar	Genital Bölge temizliği	Tercihen sabah ve orta akım idrarı	K:Steril idrar kabı R:Uygunsuz alım, beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
İDRARDA REDÜKTAN MADDE	Her gün	İdrar	Yok	Yok	K:Steril idrar kabı R:Uygunsuz alım, beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
İDRARDA YABANCI MADDE ARANMASI (İDRARDA UYUŞTURUCU TESTİ)	Her gün	Spot idrar	Yok	Yok	K:Steril idrar kabı R:Uygunsuz alım, beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
İKİLİ TARAMA TESTİ (Birinci Trimester Tarama testi)	Her gün	Serum	NT ve CRL ölçümünü içeren özel test formu mutlaka doldurulmalıdır	Gebeliğin 11 hf+0 gün ile 13 hf+6 gün arasında kan alınmalıdır	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
İMMÜNİKSASYON (İMMÜNGLOBULİN) ELEKTROFOREZİ	Her gün	Serum BOS 24 S idrar	Yok	Asitsiz idrar	K:Uygun numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
İMMÜNGLOBULİN A (IgA)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
İMMÜNGLOBULİN A1 (IgA1)	Salı	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
İMMÜNGLOBULİN A2 (IgA2)	Salı	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
İMMÜNGLOBULİN D (IgD)	Çarşamba	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
İMMÜNGLOBULİN E (IgE)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
İMMÜNGLOBULİN G (IgG)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
İMMÜNGLOBULİN G ALT GRUPLARI (IgG1,IgG2,IgG3,IgG4)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
İMMÜNGLOBULİN M (IgM)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
İNHİBİN A	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
İNSÜLİN (AÇLIK)	Her gün	Serum	10-12 saat açlık şarttır	Oral hipoglisemik ya da insülin kullanılmadan	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
İNSÜLİN (TOKLUK)	Her gün	Serum	2 saatlik tokluk	Oral hipoglisemik ya da insülin kullanılmadan	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
İNSÜLİN REZİSTANSI (HOMA-İR İNDEKSİ)	Her gün	Serum	10-12 saat açlık şarttır	Oral hipoglisemik ya da insülin kullanılmadan	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
KABAKULAK (MUMPS) IgG	Pazartesi Çarşamba	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
KABAKULAK (MUMPS) IgM	Pazartesi Çarşamba	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
KADMİYUM (CD)	Her gün	Edtalı tam kan	Yok	Yok	K:Uygun numune R:Pihtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün Sonra 18:00
KALSİTONİN	Çarşamba Cuma	Serum	10-12 saat açlık gerekir.	Tiroid muayenesi sonrası alınmamalıdır	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
KALSİYUM İYONİZE	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi Gün
KALSİYUM TOTAL (Ca)	Her gün	Serum, 24 s idrar, BOS	Serum için, 10-12 saat açlık	Turnike süresi kısa tutulmalıdır	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
KAN KÜLTÜRÜ	Her gün	Tam kan	Yok	5-10 cc, özel vasata	K:Steril Koşullarda alım R:Uygunsuz alım	Soğuk zincir 2-8 C	21 gün içinde
KAN GRUBU (A,B,O+Rh)	Her gün	Tam kan	Yok	Yok	K:Uygun Seviye R:Pihtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
KAPPA HAFİF ZİNCİR (İDRAR)	Çarşamba Cuma	24 S idrar	Yok	Asitsiz idrar	K:Uygun idrar kabı R:Uygunsuz alım, beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
KAPPA HAFİF ZİNCİR SERBEST	Çarşamba Cuma	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
KAPPA HAFİF ZİNCİR TOTAL	Çarşamba Cuma	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
KARBAMAZEPİN (Tegretol)	Her gün	Serum	Son 12 saatte ilacın alınmaması	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
KIZAMIK (RUBEOLA) IgG	Pazartesi Çarşamba	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
KIZAMIK (RUBEOLA) IgM	Pazartesi Çarşamba	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
KIZAMIKÇIK (RUBELLA) IgG	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
KIZAMIKÇIK (RUBELLA) IgG (Mikroelisa)	Pazartesi Perşembe	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00
KIZAMIKÇIK (RUBELLA) IgG AVİDİTE	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması ve IgG testinin pozitif olması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
KIZAMIKÇIK (RUBELLA) IgM (Mikroelisa)	Pazartesi Perşembe	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00
KIZAMIKÇIK (RUBELLA) IgM	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
KİST HİDATİK IgG (Echinococ IgG)	Çarşamba Cuma	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
KİST HİDATİK İHA (Echinococ İndirekt Hemaglutinasyon)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
KİST HİDATİK SPESİFİK IgE (Echinococ Spesifik IgE)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	30 gün Sonra 18:00
KLOR (KLORÜR,CL-)	Her gün	Serum, 24 s idrar, Spot idrar	Serum için, 10-12 saat açlık	İdrar için toplama süresi ve miktarı belirtilmelidir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
KOLESTEROL HDL	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
KOLESTEROL LDL	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
KOLESTEROL TOTAL	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
KOLESTEROL VLDL	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
KOLİNESTERAZ II (PSEUDOKOLİNESTERAZ)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
KOMPLEMAN C3	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
KOMPLEMAN C4	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
KORTİZOL (HİDROKORTİZON)	Her gün	Serum, 24 s idrar	10-12 saat açlık, İdrar borik veya asetik asit üzerine toplanmalıdır	Erken sabah açlığı numunesi tercih edilir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
KREATİN KİNAZ (CK,CPK)	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
KREATİN KİNAZ MB (CKMB)	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
KREATİNİN	Her gün	Serum, 24 s idrar, Spot idrar	Soğuk zincir 2-8 C Düz Tüp	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
KREATİNİN KLERENSİ	Her gün	Serum+ 24 s idrar	Test süresince çay, kahve, ilaç egzersiz yasak	İdrar için toplama süresi ve miktarı belirtilmelidir.	K:Eşzamanlı kan örneği R:İdrarın uygun toplanmaması	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
KROM (Cr)	Her gün	Edtalı tam kan 24 S idrar	İdrar borik veya 6N HCL üzerine toplanmalıdır	Soğuk ortamda saklanarak toplanmalıdır	K:Uygun idrar kabı R:Uygunsuz toplama	Soğuk zincir 2-8 C	12 gün Sonra 18:00
KULAK KÜLTÜRÜ	Her gün	Sürüntü numunesi	Yok	Yok	K:Steril swab R:Uygunsuz alım	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
KURŞUN (Pb)	Her gün	Edtalı tam kan Saç 24 S idrar	İdrar 6 N HCL,borik ya da asetik a. üzerine toplanmış idrar	Yok	K:Uygun numune R:Uygunsuz idrar toplama, pıhtılı kan	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
LAKTİKASİT	Her gün	Oksalatlı Plazma	Hasta en az 30 dk istirahat etmiş olmalıdır	Plazma hemen ayrılmalıdır	K:Uygun tüpe alım R:Pihtılı ve hemolizli numune	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün sonra
LAMBDA HAFİF ZİNCİR SERBEST	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
LAMBDA HAFİF ZİNCİR TOTAL	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
LAMBDA HAFİF ZİNCİR (İDRAR)	Her gün	Spot idrar 24 S idrar	Yok	Asitsiz idrar	K:Uygun idrar kabı R:Uygunsuz alım, beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
LAMOTRİGİNE (LAMICTAL)	Her gün	Serum	Son 12 saatte ilacın alınmaması	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
LDH (LAKTAT DEHİDROGENAZ)	Her gün	Serum BOS Plevra sıvısı	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
LDH İZOENZİMLERİ ELEKTROFOREZİ (LAKTAT DEHİDROGENAZ İZOENZ.)	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C Düz Tüp	1 ay sonra
LENFOSİT ALT GRUPLARI	Lab a danışın	*	Yok	Yok	K:Uygun Seviye R:Pihtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	*
LEPTİN	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Hastanın kilo ve boyu bildirilmelidir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	30 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
LEVETİRACETAM (KEPPRA)	Cuma	Serum	Son 12 saatte ilacın alınmaması	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
LH (LUTEİNLEŞTİRİCİ HORMON)	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Kadınlarda tercihen adet 2-5. günleri	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
LİPAZ	Her gün	Serum Spot idrar	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
LİPİD ELEKTROFOREZİ	Her gün	Serum	İki hf normal diyet, son 24 saatte alkol alımı yasak 10-12 saat açlık gerekir	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Yanlış numune	Soğuk zincir 2-8 C	1 ay Sonra 18:00
LİPOPROTEİN (a)	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
LİSTERİA AGLÜTİNASYON	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
LİTYUM (Li)	Her gün	Serum	Son ilaç dozundan 12 saat Sonra	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
LİVER KİDNEY MİKROZOMAL ANTİKOR	Pazartesi Çarşamba	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
LİZOZİM (MURAMİDAZ)	Lab a danışın	*			K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	*
LUPUS ANTİKOAGÜLAN DOĞRULAMA	Her gün	Sitratlı plazma				Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
LUPUS ANTİKOAGÜLAN TARAMA	Her gün	Sitratlı plazma				Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
MAGNEZYUM (Mg)	Her gün	Serum, 24 s idrar BOS	10-12 saat açlık	İdrar için toplama süresi ve miktarı belirtilmelidir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
MAKROPROLAKTİN TARAMASI	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
MANTAR ARANMASI VE KÜLTÜRÜ	Her gün	Saç,deri, tırnak kazıntısı	Bölgenin 2-3 gün yıkanmaması ve haricen ilaç kullanılmaması	%70 lik alkol ile silindikten Sonra	K:Uygun numune R:İlaçlı bölgeden alım	Yok	21 gün içinde
MANTAR DİREKT BAKISI	Her gün	Saç,deri, tırnak kazıntısı	Bölgenin 2-3 gün yıkanmaması ve haricen ilaç kullanılmaması	%70 lik alkol ile silindikten Sonra	K:Uygun numune R:İlaçlı bölgeden alım	Yok	Aynı gün
METANEFİRİN	Perşembe	Edtalı plazma 24 S idrar spot idrar	İdrar 6 N HCL, borik ya da asetik a. üzerine toplanmış idrar	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
METHEMOGLOBİN	Her gün	Edtalı tam kan	Yok	Yok	K:Uygun numune R:Pihtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
MİKROBAKTERİ (TÜBERKÜLOZ) KÜLTÜRÜ	Her gün	Materyal	Yok	Yok	K: Steril Kap	Yok	21 gün Sonra
MİKROBAKTERİ (TÜBERKÜLOZ) PCR	Lab a danışın	*	Yok	Yok	K: Steril Kap	Yok	*
MİKROPLAZMA HOMİNİS	Her gün	Sürüntü numunesi	Yok	Üretral ya da servikal örnek	K: Steril Kap	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
MİKROPLAZMA PNEUMONİAE IgG	Cuma	Serum	Yok	Yok	K: Santrifüjlü numune R: Hemoliz,	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
MİKROPLAZMA PNEUMONİAE IgM	Cuma	Serum	Yok	Yok	K: Santrifüjlü numune R: Hemoliz,	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
MİKROALBUMİN (İdrar)	Her gün	24 s idrar, Spot idrar	Yok	İdrar toplama süresi ve miktarı belirtilmelidir.	K: Uygun kaba alınması R: Numunenin soğuk ortamda bekletilmemesi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
MİKROPROTEİN (İdrar)	Her gün	24 s idrar, Spot idrar	Yok	İdrar toplama süresi ve miktarı belirtilmelidir.	K: Uygun kaba alınması R: Numunenin soğuk ortamda bekletilmemesi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
MİYOGLOBİN	Her gün	Serum	Yok	Yok	K: Uygun numune R: Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
MONOSPOT TEST (HETEROFİL ANTİKOR)	Laba danışın	Serum	Yok	Yok	K: Santrifüjlü numune R: Hemoliz,	Soğuk zincir 2-8 C	*

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
MTHFR (A1298C) MUTASYON ANALİZİ	Pazartesi	Edtalı tam kan	Yok	Yok	K:Uygun numune R:Pihtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
MTHFR (C677T) MUTASYON ANALİZİ	Pazartesi	Edtalı tam kan	Yok	Yok	K:Uygun numune R:Pihtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
MUKOPOLİSAKKARİT	Pazartesi	Spot idrar	Yok	Tercihen sabah ilk idrar, dondurulmuş numune	K:Dondurulmuş numune R:Oda ısısı ve buzdolabındaki numune kabul edilmez	Kuru buzda transferi uygundur.	10 gün Sonra 18:00
NEONATAL BİLİRUBİN	Her gün	Kapiller kan	Numune topuktan alınmalıdır	1 aya kadar olan numuneler tercih edilir	K:Uygun numune R:Hemolizli numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
NEONATAL TSH	Lab a danışın	*	Doğumdan sonra 1 hf içinde, 1 aya kadar olan numuneler kabul edilir	En az 3 saat oda ısısında, direkt güneş ışığından uzakta kurutulmalıdır	K:Uygun numune R:Özel kağıda emdirilmemiş numune	Uygun transfer	*
NİKEL (Ni)	Her gün	24 S idrar spot idrar Serum	Yok	Asitsiz idrar	K:Uygun idrar kabı R:Uygunsuz alım, beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	12 gün Sonra 18:00
NOREPİNEFRİN (NORADRENALİN)	Perşembe	24 S idrar spot idrar Heparinli plazma	Yok	6 N HCL üzerine toplanmış idrar		Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
NORMETANEFRİN	Perşembe	24 S idrar spot idrar Edtalı plazma	Yok	6 N HCL üzerine toplanmış idrar, dondurulmuş plazma		Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
NÖRON SPESİFİK ENOLAZ (NSE)	Çarşamba	Serum	Yok	30-45 dk içinde santrifuj edilmeli		Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
OGTT (100 g)	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yükleme Sonrası 180 dk egzersiz ve yemek içmek yasak	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz , uzun süre beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
OGTT (50 g)	Her gün	Serum	Tercihen en az 3 saatlik açlık	Yükleme Sonrası 60 dk egzersiz ve yemek içmek yasak	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz , uzun süre beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
OGTT (75 g)	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yükleme Sonrası 120 dk egzersiz ve yemek içmek yasak	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz , uzun süre beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
OKSALAT	Çarşamba Cuma	24 S idrar Spot idrar	Son 48 saat içinde C vitamini kullanılmamalıdır.	6 N HCL üzerine toplanmış idrar	K:Uygun idrar kabı R:Uygunsuz alım, beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
OKSİYUR YUMURTASI ARANMANMASI (Enterobius Vermicularis)	Her gün	Pre anal selofan bant numunesi	Yok	Sabah erken saatte hasta yataktan kalkmadan numune alınmalıdır	K:Uygun numune R:Uygunsuz alım, beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
ORGANİK ASİT ANALİZİ	Her gün	Spot idrar	Yok	Dondurulmuş numune gerekir	K:Uygun idrar kabı R:Uygunsuz alım, beklemiş numune	Kuru buzda	4 hafta Sonra
OSMOLALİTE	Her gün	Serum 24 S idrar Spot idrar	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
OSTEOKALSİN	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
OTOİMMÜN HEPATİT PANELİ (Otoimmün Karaciğer Profili)	Lab a danışın	*	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	*
OXCARBAZEPİNE (TRİLEPTAL)	Her gün	Serum	Son 12 saatte ilacın alınmaması	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün Sonra 18:00
PARACETAMOL (ASETAMİNOFEN)	Her gün	Serum	Son 12 saatte ilacın alınmaması	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
PARATHORMON (PTH,intact)	Her gün	Serum	Yok	İlaç olarak kullanılıyorsa belirtilmelidir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz , oda ısısında 1 saatten fazla beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
PARVO VİRUS B-19 IgG	Cuma	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
PARVO VİRUS B-19 IgM	Cuma	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
PERİFERİK YAYMA İNCELEMESİ	Her gün	Tam kan	Yok	Yok (Platelet için tercihen kapiller kan)	K:Uygun Seviye R:Pihtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00
PİRUVAT (PİRÜVİK ASİT)	Her gün	Edtalı tam kan	Yok	*Laba danışınız	K:Uygun numune R:Pihtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
PİRUVAT KİNAZ	Her gün	Edtalı tam kan	Yok	Yok	K:Uygun numune R:Pihtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
PLAZMA RENİN AKTİVİTESİ (PRA)	Çarşamba Cuma	Edtalı plazma	*Laba danışınız	*Laba danışınız	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
PORFİNLER (Total)	Lab a danışın	*	Yok	Karanlık ve soğuk ortamda toplanmalı ve gönderilmelidir	K:Uygun idrar kabı R:Uygunsuz alım, beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	*
POTASYUM (K+)	Her gün	Serum, 24 S idrar, Spot idrar BOS	Yok	İdrar için toplama süresi ve miktarı belirtilmelidir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
PREALBUMİN	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
PRO BNP (Pro Brain Natriüretik Peptid)	Her gün	Heparinli plazma	Yok	Numunenin hemen santrifüjü gerekir	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
PROCALCİTONİN	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
PROGESTERON	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
PROLAKTİN (PRL)	Her gün	Serum	3-6 saat açlık ve uyandıktan birkaç saat sonra	Uykusuzluk, stres, egzersiz, coitus, Sonrası numune alınmamalıdır	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
PROSTATİKASİT FOSFATAZ (PAP)	Her gün	Serum	Yok	Rektal muayeneden 72 saat sonra	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
PROTEİN	Her gün	Serum 24 S idrar, Spot idrar BOS vb.	Serum için 10-12 saat açlık	Kısa süreli turnike	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
PROTEİN C AKTİVİTESİ	Pazartesi	Sitratlı plazma	Coumadin iki hafta önce heparin iki gün önce kesilmelidir.	Numune hemen ayrılmalıdır	K:Uygun numune R:Hemoliz, pıhtı	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün Sonra 18:00
PROTEİN C ANTİJENİ	Pazartesi	Sitratlı plazma	Yok	Numune hemen ayrılmalıdır	K:Uygun numune R:Hemoliz, pıhtı	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün Sonra 18:00
PROTEİN ELEKTROFOREZİ	Her gün	Serum 24 S idrar (asitsiz)	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
PROTEİN S ANTİJENİ	Pazartesi	Sitratlı plazma	Yok	Numune hemen ayrılmalıdır	K:Uygun numune R:Hemoliz, pıhtı	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün Sonra 18:00
PROTEİN S AKTİVİTESİ	Pazartesi	Sitratlı plazma	Coumadin iki hafta önce heparin iki gün önce kesilmelidir.	Numune hemen ayrılmalıdır	K:Uygun numune R:Hemoliz, pıhtı	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün Sonra 18:00
PROTROMBİN ZAMANI (PTZ + INR)	Her gün	Plazma	Coumadin kullanımından önce kan alınmalıdır	Numune hemen ayrılmalıdır	K:Uygun Seviye R:Pıhtılı, hemolizli numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
PSA SERBEST (FPSA)	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Rektal muayeneden 72 saat sonra	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
PSA TOTAL (TPSA)	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Rektal muayeneden 72 saat sonra	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
QUANTİFERON (TB-GOLD)	Her gün	Özel kan alım tüpleri (3'lü) Lab' dan temin ediniz	Çalkalama sonrası tüpler 37 C de inkubatörde dik olarak 16-24 saat inkübe edilmelidir	Numune alındıktan tüpün iç yüzeyi bulaşacak şekilde 20 sn kuvvetlice çalkalanmalıdır.	K:Uygun alınmış numune R:Dondulmuş numune	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
RESPIRATORY SYNCYTİAL VİRUS IgG (RSV IgG)	Laba danışın	*	Yok	*	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	*
RESPIRATORY SYNCYTİAL VİRUS IgM (RSV IgM)	Laba danışın	*	Yok	*	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	*
RETİKÜLOSİT	Her gün	Edtalı Tam kan	Yok	Yok	K:Uygun Seviye R:Pihtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
RF (ROMATOİD FAKTÖR) LATEKS	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
RF (ROMATOİD FAKTÖR) TURBİDİMETRİK	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
SALMONELLA GRUPLAĞLÜTİNASYON (GRUBER WİDAL)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
SEDİMENTASYON (SEDİM,ESR)	Her gün	Tam kan	Yok	Yok	K:Uygun Seviye R:Pihtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
SEKS HORMON BAĞLAYICI GLOBULİN (SHBG)	Salı Cuma	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
SELENYUM (Se)	Her gün	Serum 24 S idrar asitsiz	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	12 gün Sonra 18:00
SEMEN (Meni,Sperm) KÜLTÜRÜ	Her gün	Semen,meni	Genital Bölge temizliği	YOK	K:Steril idrar kabı R:Uygunuz alım, beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
SERBEST T3	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Sabah açlığı ve ilaç kullanımı öncesi tercih edilir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
SERBEST T4	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Sabah açlığı ve ilaç kullanımı öncesi tercih edilir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
SEROTONİN (5-OH TRİPTAMİN)	Laba danışın	Serum, 24 s idrar		6 N HCL üzerine toplanmış idrar		Soğuk zincir 2-8 C	*
SERULOPLAZMİN	Salı Perşembe	Serum				Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
SERUM AMYLOİD A (SAA)	cuma	Serum				Soğuk zincir 2-8 C	7gün Sonra 18:00
SİSTİN	Her gün	24 S idrar, asit eklenerek				Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
SİTRAT	Çarşamba Cuma	24 S idrar		6 N HCL üzerine toplanmış idrar		Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
SODYUM (Na+)	Her gün	Serum, 24 s idrar, Spot idrar BOS vb.	Yok	İdrar için toplama süresi ve miktarı belirtilmelidir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
SPERMOGRAM	Her gün	Semen,meni	2-4 gün cinsel perhiz gerekir	Yok	K: R:	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
SPESİFİK IgE BESLENME TARAMA (Fx 20)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
SPESİFİK IgE ler –Her biri	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
SPESİFİK IgE SOLUNUM TARAMA (STx10)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
T. PALLIDUM HEMAGLÜTİNASYON (TPHA)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
TAKROLİMUS (FK 506)	Pazartesi Cuma	Edtalı tam kan	Yok	Hastanın son ilaç kullanma zamanı ve dozu belirtilmelidir.	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	5gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
TAM İDRAR TAHLİLİ (TİT)	Her gün	Spot idrar	Yok	Yok	K:Uygun kaba alınması R:Aşırı dilüe veya çok az numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
TAM KAN TAHLİLİ (HEMOGRAM)	Her gün	Tam kan	Yok	Yok	K:Uygun Seviye R:Pihtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
TAŞ ANALİZİ (DİĞER)	Her gün	Materyal	Yok	Yok	K:Uygun numune R:	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
TAŞ ANALİZİ (ÜRİNER SİSTEM)	Her gün	Materyal	Yok	Yok	K:Uygun numune R:	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
TCA (TRIKLOR ASETİKASİT)	Lab'a danışınız	Spot idrar	Yok	Yok	K:Uygun kaba alınması R:Aşırı dilüe veya çok az numune	Soğuk zincir 2-8 C	Lab'a danışınız
TEOFİLİN (Aminocardol, Teokap)	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Hastanın son ilaç kullanma zamanı ve dozu belirtilmelidir	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
TESTOSTERON SERBEST	Salı Cuma	Serum	10-12 saat açlık	Sabah açlığı numunesi tercih edilir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00
TESTOSTERON TOTAL	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Sabah açlığı numunesi tercih edilir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
TETANOZ IgG (Tetanoz İmmünite Kontrol)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	20 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
TİROGLOBULİN	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Sabah açlığı numunesi tercih edilir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
TİROKSİN BAĞLAYICI GLOBULİN (TBG)	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Sabah açlığı numunesi tercih edilir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
TOTAL PROTEİN	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
TOTAL T3	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Sabah açlığı numunesi tercih edilir	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
TOTAL T4	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Sabah açlığı numunesi tercih edilir	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
TOXOPLAZMA IgG	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
TOXOPLAZMA IgG (Mikroelisa)	Salı cuma	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
TOXOPLAZMA IgG AVİDİTE	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması ve IgG testinin pozitif olması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
TOXOPLAZMA IgM	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
TOXOPLAZMA IgM (Mikroelisa)	Salı cuma	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
TRAB (TSH RESEPTÖR ANTİKORU-TRAC)	Çarşamba	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
TRİGLİSERİD	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
TROPONİN I (Kaset tarama testi)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
TSH (TİROİD STİMÜLAN HORMON)	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Sabah açlığı numunesi tercih edilir	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
TSI (TİROİD STİMÜLEEDİCİ İMMÜN GLOBULİN)	Laba danışın	*	10-12 saat açlık	Sabah açlığı numunesi tercih edilir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	*
ÜÇLÜ TARAMA TESTİ (İkinci Trimester Tarama Testi)	Her gün	Serum	BPD ölçümünü içeren özel test formu mutlaka doldurulmalıdır	Gebeliğin 15 hf+0 gün ile 20 hf+6 gün arasında kan alınmalıdır	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
ÜRE (BUN)	Her gün	Serum, 24 s idrar	Serum için, 10-12 saat açlık	İdrar için toplama süresi ve miktarı belirtilmelidir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
ÜREAPLASMA ÜREALYİCUM KÜLTÜRÜ	Her gün	Üretral akıntı Semen On idrar	Yok	Yok	K:Steril kab R:Uygunsuz alım	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
ÜRİK ASİT (ÜRAT)	Her gün	Serum, 24 s idrar	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
VAJİNAL KÜLTÜR	Her gün	Sürüntü numunesi	Yok	Yok	K:Steril swab R:Uygunsuz alım	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
VALPROİKASİT (Depakin)	Her gün	Serum	Son 12 saatte ilacın alınmaması	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
VDRL (RPR)	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
VİTAMİN A (RETİNOL, VİT-A)	Çarşamba	Serum	10-12 saat açlık	Son 24 saat içinde alkol kullanılmamalıdır	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C Işıktan korunmalı	10 gün Sonra 18:00
VİTAMİN B1 (TİAMİN)	Salı	Edtalı tam kan	10-12 saat açlık	Numune hemen dondurulmalıdır.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir <0 C Kuru buzda gönderilmelidir Işıktan korunmalı	10 gün Sonra 18:00
VİTAMİN B12	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Son 24 saat içinde alkol kullanılmamalıdır.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
VİTAMİN B2 (RİBOFLAVİN)	Salı	Edtalı tam kan	10-12 saat açlık	Numune hemen dondurulmalıdır.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir <0 C Kuru buzda gönderilmelidir Işıktan korunmalı	10 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
VİTAMİN B6 (PİRİDOKSİN)	Salı	Edtali Tam Kan	10-12 saat açlık	Numune hemen dondurulmalıdır.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir <0 C Işıktan korunmalı	10 gün Sonra 18:00
VİTAMİN C (ASKORBİKASİT)	Perşembe	Heparinli Plazma	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir Işıktan korunmalı	10 gün Sonra 18:00
VİTAMİN D3 (25-HİDROKSİKOLEKALSİFEROL)	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
VİTAMİN D3 (Aktif) (1,25-DİHİDROKSİKOLEKALSİFEROL)	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
VİTAMİN E (ALFA TOKOFEROL)	Perşembe	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir <0 C Işıktan korunmalı	10 gün Sonra 18:00
VİTAMİN H (BİOTİN)	Perşembe	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir <0 C Işıktan korunmalı	10 gün Sonra 18:00
VMA (VANİL MANDELİKASİT)	Salı Perşembe	24 S idrar spot idrar	Yok	6 N HCL üzerine toplanmış idrar	K:Uygun idrar kabı R:Uygunsuz alım, beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
VONWİLLEBRAND FAKTÖRAKTİVİTESİ	Her gün	Sitratlı plazma	Yok	Numune hemen ayrılmalıdır	K:Santrifüjlü numune R:Pihti,Hemoliz, uygunsuz antikoagulan	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
VONWİLLEBRAND FAKTÖRANTİJENİ	Her gün	Sitratlı plazma	Yok	Numune hemen ayrılmalıdır	K:Santrifüjlü numune R:Pihti,Hemoliz, uygunsuz antikoagulan	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
VZV IGG (VARİCELLA ZOSTER IGG)	Pazartesi Çarşamba	Serum BOS	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
VZV IGM (VARİCELLA ZOSTER IGM)	Pazartesi Çarşamba	Serum BOS	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
YARA KÜLTÜRÜ	Her gün	Sürüntü numunesi	Yok	Yok	K:Steril swab R:Uygunsuz alım	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
YENİDOĞAN METABOLİK TARAMA	Her gün	Topuktan emdirilmiş kan	Doğumun 24 saat sonrasında numune alınmalıdır	En az bir kere anne sütü veya mama gibi proteinli besinle beslenmiş olmalıdır	K:Uygun numune R:Özel kağıda emdirilmemiş numune	Uygun transfer	12 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI

ÇALIŞMA
ZAMANI

NUMUNE
TÜRÜ

ÖN HAZIRLIK
GEREKİNİMİ

NUMUNE ALIM
KURALLARI

KABUL(K)-RET (R)
KRİTERLERİ

TRANSFER
ŞARTLARI

SONUÇ
ZAMANI

ÖNEMLİ AÇIKLAMA:

*ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ YA DA NUMUNE ALIM KURALLARINDA ;***Danışınız** KODU BULUNAN TESTLER ÖZEL HAZIRLIK YA DA ALIM KURALLARI GEREKTİRMEKTEDİR. LÜTFEN ÖNCEDEN LABORATUVARIMIZA DANIŞINIZ.

* SADECE SONUÇ ZAMANI '**AYNI GÜN**' OLAN TESTLER **ACİL KAPSAMINDADIR VE ACİL OLARAK** ÇALIŞILMASI MÜMKÜNDÜR.

* ACİL TESTLER GEREKİRSE DİĞER TESTLER YARIDA KESİLEREK ÇALIŞILIR VE LABORATUVAR KABUL SAATİNDEN SONRA * EN KISA SÜRE İÇİNDE SONUÇLANDIRILIR. ;*Teste göre değişiklik gösterebilir, danışınız ACİL TESTLERDE TEST TEKRARI YAPILMAZ. DİĞER HASTALARIMIZIN DA HAKKINI KORUMAK ADINA LÜTFEN KESİN GEREKLİ OLMADIKÇA ACİL SEÇENEĞİNİ KULLANMAYINIZ.

*DİĞER TESTLERDEN **SONUÇ ZAMANI AYNI GÜN OLANLARDAN** KABUL SAATİ 63:36'YE KADAR OLANLAR, SAAT 64:36 A KADAR RAPORLANDIRILIR. BU SAATTEN SONRA ;ÖĞLEDEN SONRA KABULÜ YAPILANLAR SAAT 66:00 DEN SONRA RAPORLANDIRILIR.

*AYNI GÜN ÇALIŞILMAYAN TESTLER İÇİN GÜN İÇİ RAPORLANDIRMA SAATİ 66:00 DİR.

*NUMUNE KABUL Ü HAFTA İÇİ SAAT 66:00'A KADAR, HAFTA SONU ;CUMARTESİ İSE SAAT 66:00 YA KADARDIR. BU SAATLERDEN SONRA LABORATUVARA ULAŞAN NUMUNELER ÇALIŞMAYA ALINMAYIP BİR SONRAKİ ÇALIŞMAYA KALACAKTIR.

*TESTLERİN REFERANS ARALIKLARI HASTAYA AİT BİLGİLER İLE ;YAŞ, CİNSİYET, İLAÇ ALIMI VB. DOĞRUDAN İLİŞKİLİDİR. BU YÜZDEN HASTA BİLGİLERİNİN EKSİKSİZ OLARAK BİLDİRİLMESİNE ÖZEN GÖSTERİNİZ.

***REHBERDE BULUNMAYAN TESTLER İÇİN LÜTFEN DOĞRUDAN LABORATUVARDAN BİLGİ ALINIZ.**

(TELEFON: 0 232 422 13 23-0 232 422 13 02-İÇ HAT:02)

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
ABORTUS	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
ADRENAL (SÜRRENAL), REZEKSİYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
AĞIZ MUKOZASI/GİNGİVA BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
AKCİĞER, KAMA BİOPSİSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
AKCİĞER, TOTAL/LOB/SEGMENT REZEKSİYONU	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
AKCİĞER, TRANSBRONŞİYAL BİOPSİSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
ANEVRİZMA, ARTERİYAL/VENTRİKÜLE	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
ANÜS, POLİPOİD GELİŞME (TAG)	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
APENDİKS İNSİDENTAL (ASIL AMELİYATA EK)	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
APENDİKS İNSİDENTAL DIŞINDA	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
ABSE MATERYALİ	Her gün	Biopsi/ Sitoloji	Yok	Yok	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	8 gün sonra
ARTER, ATEROM PLAĞI	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
ARTER, BİOPSİSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
BARTHOLİN BEZİ KİSTİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
BEYİN MENİNGSLER, TÜMÖR REZEKSİYONU	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
BEYİN, BİOPSİSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
BEYİN/MENİNKSLER, TÜMÖR REZEKSİYONU	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
BÖBREK, BİOPSİ İĞNE	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
BÖBREK, PARŞİYEL /TOTAL NEFREKTOMİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
BRONKUS, BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
BURSA/SYNOVİAL KİST	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
BURUN MUKOZASI, BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
BURUN SİNÜS POLİPLERİ İNFLAMMATUAR	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
DALAK	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
DERİ, EKSİZYONEL BIOPSI	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
DERİ, PUNCH/İNSİZYONEL/SHAVE	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
DİL, BIOPSI	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
DİL/TONSİL-TÜMÖR İÇEREN REZEKSİYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
DİŞ/ODONTOJENİK KİST	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
DİVERTİKÜL-ÖZOFAGUS/İNCE BARSAK	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
DOKU ÖRNEĞİNİN BLOK HALİNE GETİRİLMESİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
DUDAK, BİOPSİ/WEDGE(KAMA) REZEKSİYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
DUODENUM, BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
DUPUYTREN KONTRAKTÜRÜ DOKUSU	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
EKLEM, GEVŞEK CİSİM	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
EKLEM, REZEKSİYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
EKSTREMİTE, AMPUTASYON, TRAVMA	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
EKSTREMİTE, DİSARTİKÜLASYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
ENDOMETRİUM, KÜRETAJ/BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
ENDOSERVİKS, KÜRETAJ/BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
FEMUR BAŞI, KIRIK	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
FEMUR BAŞI, KIRIK DIŞINDA	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
FETUS, DİSEKSİYONLA İNCELEME	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
FİSSÜR/FİSTÜL	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
GANGLİON KİSTİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
GÖZ, EKSENTRASYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
GÖZ, ENÜKLEASYON/ EVİSSERASYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
HAZIR BOYALI PREPARAT VEYA PARAFİN BLOK	Her gün	Konsültasyon	Yok	Yok	Yok	Yok	10 gün sonra
HEMATOM	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
HEMOROİDLER	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
HERNİ KESESİ, HERHANGİ BİR BÖLGEDE	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
HİDROSEL KESESİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
HİPOFİZ TÜMÖRÜ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
HİSTOKİMYASAL BOYAMALAR	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
İMMÜNİSTOKİMYASAL İNCELEME	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
İNCE BARSAK, BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
İNCE BARSAK, REZEKSİYON, TÜMÖR	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
İNCE BARSAK, TÜMÖR İÇİN REZEKSİYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
İNCE İĞNE ASPİRASYONU DEĞERLENDİRİLMESİ	Her gün	Sitoloji	Yok	Yok	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	8 gün sonra
İNCE İĞNE ASPİRASYONU GÖNDERİLMESİ YAYMA PREPARATLARI	Her gün	Sitoloji	Yok	Yok	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	8 gün sonra
İNTERVERTEBRAL DİSK	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
KALP KAPAKÇIĞI	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
KARACİĞER, BİOPSİ İĞNE/WEDGE	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
KARACİĞER, KISMİ REZEKSİYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
KARPEL TÜNEL DOKUSU	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
KAS, BİOPSI	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
KEMİK-BİOPSI/KÜRETAJ MATERYALİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
KEMİK FRAGMANLARI, PATOLOJİK KIRIK	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
KEMİK FRAGMENTLERİ,PATOLOJİK KIRIK DIŞI	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
KEMİK İLİĞİ BİOPSİSİ, PATOLOJİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
KEMİK, EKZOSİTOZ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
KEMİK, REZEKSİYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
KESİT GÖRÜNTÜLERİNİN BASILMASI	Her gün	Biopsi	Yok	Yok	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
KIKIRDAK, SHAVİNG	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
KOLESTEATOMA	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
KOLON, BIOPSI	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
KOLON, BIOPSI ÇOKLU LOKALİZASYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
KOLON, KOLOSTOMİ STOMASI	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
KOLON, SEGMENTAL REZEKSİYON, TÜMÖR DIŞI	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
KOLON, TOTAL REZEKSİYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
KOLON, TÜMÖR İÇİN SEGMENTAL REZEKSİYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
KONJONKTİVA, BİOPSİ / PTERYGIUM	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
KORNEA	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
LARİNKS, BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
LARİNKS, PARSİYEL/TOTAL+BOYU	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
LARİNKS, PARSİYEL/TOTAL REZEKSİYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
LENF DÜĞÜMLERİ, REGIONAL REZEKSİYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
LENF DÜĞÜMÜ, BİOPSI	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
MANDİBULEKTOMİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
MEDİASTEN, KİTLE	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
MEME, BİOPSI	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
MEME, MASTEKTOMİ-PARSİYEL BASİT	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
MEME, MASTEKTOMİ + AKSİLLA LENF NODLARI	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
MEME/REDÜKSİYON MAMMOPLASTİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
MENİSKÜS	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
MESANE, PARSİYEL/TOTAL REZEKSİYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
MESANE, TUR	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
MİDE, BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
MİDE, SUBTOTAL/TOTAL REZEKSİYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
MİDE, TÜMÖR İÇİN SUBTOTAL/TOTAL REZEKSİYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
MUKOSEL, TÜKRÜK	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
MYOKARD, BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
MYOM(LAR), MYOMEKTOMİ, UTERUS HARIÇ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
NAZOFARİNKS/OROFARİNKS, BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
NÖROMA-MORTON/TRAVMATİK	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
ODONTOJENİK TÜMÖR	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
OMENTUM, BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
OTOPSİ, FETUS	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
OTOPSİ, TIBBİ AMAÇLI	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
OVER(+/- TUBA), NEOPLASTİK DEĞİL	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
OVER(+/- TUBA) NEOPLASTİK	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
OVER, BİOPSİ/WEDGE (KAMA) REZEKSİYONU	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
ÖZOFAGUS, BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
ÖZOFAGUS, PARSİYEL/TOTAL REZEKSİYONU	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
PANKREAS, BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
PANKREAS, TOTAL/SUBTOTAL REZEKSİYONU	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
PAP SMEAR	Her gün	Sitoloji (Konvansiyonel)	Yok	Yok	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	8 gün sonra
PARATİROİD BEZİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
PARATUBAL KİSTLER (MORGAGNİ HİDATİ)	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
PARMAK EL/AYAK, AMPUTASYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
PARMAKLAR EL/AYAK, AMPUTASYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
PERİTON, BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
PİLONİDAL KİST/SİNÜS	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
PLASENTA	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
PLEVRA/PERİKARD-BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
POLİP, KOLOREKTAL	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
POLİP, MİDE/İNCE BARSAK	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
POLİP, SERVİKAL/ENDOMETRİAL	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
PROSTAT, İĞNE BİOPSİSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
PROSTAT, RADİKAL REZEKSİYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
PROSTAT, RADİKAL REZEKSİYON DIŞINDA	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
PROSTAT, TUR	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
SAFRA KESESİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
SERVİKS, BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
SERVİKS, KONİZASYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
SEMPATİK GANGLİON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
SIVI BAZLI SİTOLOJİ MANUEL	Her gün	Sitoloji (Sıvı Bazlı)	Santrifüj	Yok	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	8 gün sonra
SIVI BAZLI SİTOLOJİ OTOMATİK	Her gün	Sitoloji (Sıvı Bazlı)	Yok	Yok	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	8 gün sonra
SİNİR, VAGOTOMİ VE BENZERİ GİRİŞİM	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
SİNÜS, PARANASAL BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
SPERMATOSEL	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
SÜNNET DERİSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
SYNOVİUM	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
TAHNİT	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
TENDON/TENDON KILIFI, TÜMÖR DIŞI	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
TESTİKÜLER APENDİKS	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
TESTİS, BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
TESTİS, KASTRASYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
TESTİS, TÜMÖR	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
TESTİS, TÜMÖR/BİOPSİ/KASTRASYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
TİMÜS, TÜMÖR	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
TİROGLOSSAL KANAL/BRANKİAL YARIK	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
TİROİD, TOTAL/LOBEKTOMİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
TONSİL VE/VEYA ADENOİDLER	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
TRAKEA, BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
TROMBÜS VEYA EMBOLUS	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
TUBA UTERİNA, BİOPSİ VE STERİLİZASYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
TUBA UTERİNA, EKTOPIK GEBELİK	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
TÜKRÜK BEZİ /TÜMÖR DAHİL)	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
TÜKRÜK BEZİ, BİOPSI	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
UTERUS, (+/- ADENKSLER), TM VE PROLAPSUS HARIÇ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
UTERUS, NEOPLASTİK (+/- TUBALAR)	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
UTERUS, PROLAPSUS İÇİN (+/- TUBALAR)	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
ÜRETER, BİOPSI	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
ÜRETER, REZEKSİYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
ÜRETRA, BİOPSI	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
VAJİNA, BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
VARİKOSEL	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
VAS DEFERENS	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
VEN, VARİS	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
VULVA, TOTAL/SUBTOTAL REZEKSİYONU	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
VULVA/LABİA, BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
VÜCUT SIVILARI VE EKSFOLİYATİF SİTOLOJİ	Her gün	Sitoloji	Santrifüj	Yok	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	8 gün sonra
YUMUŞAK DOKU BASİT EKZİZYON, LİPOM	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 05 KASIM 2018)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
YUMUŞAK DOKU LİPOM EKSIZYONU VE BIOPSI	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
YUMUŞAK DOKU TÜMÖRÜ, GENİŞ REZEKSİYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
YUMUŞAK DOKU, DEBRİDMAN	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra