

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
1,4-DELTA ANDROSTENEDİON	Pazartesi Çarşamba	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,Lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
11-DEOKSİKORTİZOL	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,Lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	1 Ay Sonra 18.00
17-HİDROKSİ PROGESTERON	Pazartesi (10:30)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,Lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18.30
17-KETOSTEROİD	Cuma (13.00)	24 S idrar, Spot idrar	6 N HCL üzerine toplanmış	Asetik ya da borik asit de kabul edilir.	K:Uygun alım R:Soğuk ortamda gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
5-HİDROKSİ İNDOL ASETİK ASİT (5-HIAA)	Çarşamba (13.00)	24 S idrar	6 N HCL üzerine toplanmış	Son 72 saatte özel diyet kısıtlaması var. (*D*)	K:Uygun alım R:Soğuk ortamda gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
5-HİDROKSİTRİPTAMİN (SEROTONİN)	Her gün	Serum, 24 s idrar	6 N HCL üzerine toplanmış	Son 72 saatte özel diyet kısıtlaması var. (*D*)	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,Lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün Sonra
5'-NÜKLEOTİDAZ (5'-NT)	Pazartesi	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Soğuk ortamda gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
ABSE KÜLTÜRÜ	Her gün	Materyal	Yok	Yok	K:Steril swab R:Uygunsuz alım	Özel transport besiyeri ile	2 gün Sonra 18:00
ACE (ANGİOTENSİN KONVERTİNG ENZİM)	Her gün	Heparinli Plazma	12 saat önceden ACE inhibitörü alımı kesilmelidir	Yok	K:Santrifüjlü numune hemen ayrılmalı R:Hemoliz ,Lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18.00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
ACTH (ADRENOKORTİKOT ROPIK HORMON)	Her gün	Edtalı Plazma	06:00-08:00 arası yüksek Numune zamanı	Yok	K:Santrifüjlü numune hemen ayrılmalı R:Hemoliz ,Lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
ADA (ADENOZİN DEAMİNAZ)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,Lipemi	Soğuk zincir 2-8 C Düz Tüp	5 gün Sonra 18.00
ADACIK HÜCRE ANTİKORU (ISLET CELL ANTİKORU-ICA)	Pazartesi (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,Lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18.00
ADENOVİRUS ANTİJENİ (DFA)	Her gün	Gaita	Yok	Yok	K:Uygun alım R:Soğuk ortamda gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	1 gün Sonra 18.00
ADH(ANTİ DİURETİK HORMON)	Her gün	Edtalı Plazma/24 S idrar asitsiz	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,Lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	20 gün sonra 18.00
AFP (ALFAFETOPROTEİN)	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
AKTİVE PROTEİN C REZİSTANSI	Pazartesi	Sitratlı plazma	Yok	Plazma hemen ayrılmalıdır	K:Uygun Seviye R:Pihtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
ALBUMİN	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
ALDOLAZ	Cuma	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
ALDOSTERON	Çarşamba (13.00)	Serum idrar	Son 2 saat aynı pozisyonda durmalı	6 N HCL üzerine toplanmış idrar	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
ALFA-1 ANTİTRİPSİN	Salı (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18.00
ALP (ALKALEN FOSFATAZ)	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
ALP İZOENZİMLERİ	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,Lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	4 Hafta Sonra 18:00
ALT (SGPT)	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,Lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
ALÜMİNYUM	Her gün	Serum (kırmızı kapaklı) 24 S idrar	Son 24 saatte AL içeren antiasit kullanılmamalı	*Danışınız	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,Lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra
AMİLAZ	Her gün	Serum, idrar	Serum için, 10-12 saat	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
AMİLAZ PANKREATİK	Her gün	Serum, idrar	Serum için, 10-12 saat	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
AMİNOASİT	Her gün	Eddalı plazma, idrar, Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,pıhtı,idrar için dondurulma	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
AMONYAK	Her gün	Heparinli plazma	Yok	Numune hemen ayrılmalı	K:Santrifüjlü ve dondurulmuş numune R:Hemoliz,sıcak ortam	Soğuk zincir Kuru buz	2 gün Sonra 18:00
AMA M-2	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R: Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
ANCA (c-ANCA) (PR3ANCA) ANCA (p-ANCA) (ANTİ MPO)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R: Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
ANDROSTENEDİON	Pazartesi Çarşamba	Serum	Diurnal varyasyon vardır	Sabah 06:00- 08:00 arası numune alınmalıdır.	K:Santrifüjlü numune R: Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
ANGİOTENSİN I	Laba Danışın	*	*	*	K:Santrifüjlü numune R: Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	*
ANGİOTENSİN II	Laba Danışın	*	*	*	K:Santrifüjlü numune R: Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	*
ANTİ HBc IgG	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18.00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
ANTİ HBc IgM	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18.00
ANTİ HBe	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
ANTİ HBe (Mikroelisa)	Çalışılmıyor	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Yok
ANTİ HBs	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
ANTİ RİBOZOMAL P PROTEİNİ	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	8 gün Sonra
ANTİ CCP (CYCLIC CITRULLINATE D PEPTİD Ab)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
ANTİ FAKTÖR Xa	Çarşamba (13.00)	Sitratlı plazma	Yok	Yok	K:Uygun seviye R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
ANTI HCV	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
ANTI HCV (Mikroelisa)	Her gün (13:30)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:30
ANTI HCV DOĞRULAMA (Western blot)	Her gün	serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	1 ay sonra
ANTI-Ds DNA /ANTI DNA	Pazartesi Perşembe (09:00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00
ANTI-DÜZ KAS ANTİKOR (ASMA)	Çarşamba (09:00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00
ANTI-ENDOMİSYUM IGA (EMA)	Çarşamba (09:00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00
ANTI-ENDOMİSYUM IGG(EMA)	Hergün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
ANTI-FOSFOLİPİD İGG	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
ANTI-FOSFOLİPİD İGM	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
ANTI-GAD	Pazartesi (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
ANTI-GLİADİN IGA	Perşembe (09:00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
ANTI-GLİADİN IGG	Perşembe (09:00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00
ANTI-HAV IgM	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C p	Aynı gün
ANTI-HAV Total	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
ANTI-HEPATİT E (HEV)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	6 gün Sonra 18:00
ANTI-İNSÜLİN ANTİKOR	Pazartesi	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
ANTI-JO-1	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün sonra 18:00
ANTİKARDİYOLİPİN (ACA IGG)	Perşembe (09:00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,Lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18.00
ANTİKARDİYOLİPİN (ACA IGM)	Perşembe (09:00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,Lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18.00
ANTI-MİTOKONDRİAL ANTİKOR (AMA)	Çarşamba (09:00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00
ANTI-MİTOKONDRİAL ANTİKOR TİP M-2 (AMAM-2)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
ANTİ-MÜLLERİAN HORMON (AMH)	Her gün	Serum	Yok	Tercihen adetin 2. ve 3. Günü numune alımı	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
ANTİ-NÜKLEER ANTİKOR (ANA)	Pazartesi Perşembe (09-00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00
ANTİ-PARİETAL HÜCRE ANTİKORU (APCA)	Cuma	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
ANTİ-SCL 70	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
ANTİ-SENTROMER B	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
ANTİ-SLA	Laba Danışın	Serum	*	*	*	Soğuk zincir 2-8 C	*
ANTİ -SM	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	8 gün Sonra 18:00
ANTİ-SPERM ANTİKOR (ASA) (IgM-IgG)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
ANTİ-SS-A (ANTİ-RO) ANTİ-SS-B (ANTİ-LA)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	6 gün Sonra 18:00
ANTİ-MOG IgG	Pazartesi	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	8 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
ANTİ-TG (ANTİ-T) (Anti Tiroglobulin)	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
ANTİ-TPO (ANTİ-M) (Tiroid Peroksidaz Ab.)	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
ANTİ-TROMBİN III AKTİVİTESİ	Salı (13.00)	Sitratlı plazma	Yok	Numune hemen ayrılmalıdır	K:Uygun seviye R:Hemoliz, Lipemi, pıhtı	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
ANTİ-TROMBİN III ANTİJENİ	Salı (13.00)	Sitratlı plazma	Yok	Numune hemen ayrılmalıdır	K:Uygun seviye R:Hemoliz, Lipemi, pıhtı	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
ANTİ-TROMBOSİT ANTİKORU	Her gün	Sitratlı tam kan	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, Lipemi, pıhtı	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
APOLİPOPROTEİNA	Her gün	Serum	8-10 saatlik sabah açlığı son 24 saat egzersiz yok	En az 10 dk dinlenme sonrası ve kısa turnike zamanı	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
APC REZİSTANSI	Cuma	Sitratlı Plazma	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
APTT	Her gün	Sitratlı Plazma	Heparin kullanımından önce kan alınmalıdır	Heparin uygulanan koldan kan alınmamalıdır	K:Uygun Seviye R:Pıhtılı, hemolizli numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
ARB ARANMASI (TBC BASİLİ)	Her gün	Balgam İdrar Mayi	Yok	Yok	K:Uygun numune kabı R:Tükrük numunesi	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00
ARİL SÜLFATAZ A	***Lab a danışınız	***Lab a danışınız	***Lab a danışınız	***Lab a danışınız	***Lab a danışınız	Soğuk zincir 2-8 C	***

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
ARSENİK	Her gün	24 S İdrar Spot idrar Tam kan	6 N HCL, borik ya da asetik a. üzerine toplanmış idrar	Yok	K:Uygun numune kabı R:Uygunsuz toplama	Soğuk zincir 2-8 C	6 gün Sonra
ASCA IGA (Antisaccharomyces cerevisiae)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra
ASCA IGG (Antisaccharomyces cerevisiae)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra
ASETİLKOLİN RESEPTÖR ANTİKORU	Salı	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
ASETİLKOLİNESTER AZ	Her gün	Serum Sitrattlı plazma Amniyotik Mayi	Amniyotik Mayi için 3 lü tarama formu doldurulmalıdır	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, Lipemi, pıhtı	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün Sonra 18:00
ASİT FOSFATAZ (Total-Prostatik)	Her gün	Serum	Yok	Rektal muayeneden 72 saat sonra	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
ASO (ANTİSTREPTOLİZİN O) LATEX	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
ASO (ANTİSTREPTOLİZİN O) TURBİDİMETRİK	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
AST (SGOT)	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,Lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
AQP 4 (NMO IGg)	Salı (13.00)	Serum+Bos	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,Lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	8 gün Sonra 18:00
BAKIR (Cu)	Her gün	Serum, 24 S idrar	Serum için, 10-12 saat açlık ,	İdrar asitsiz olmalıdır.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
BALGAM KÜLTÜRÜ	Her gün	Balgam	Yok	Yok	K:Steril Kap R:Tükrük numunesi kabul edilmez	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
BENCE-JONES PROTEİNİ	Her gün	Spot idrar 24 S idrar	Yok	Yok	K:Uygun kaba alınması R:Uygunsuz numune toplama	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
BETA HCG (B-HCG)	Her gün	Serum, idrar	3-6 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
BETA-2 GLİKOPROTEİN I IGA	Her gün	serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün Sonra 18:00
BETA-2 GLİKOPROTEİN I IGG	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün Sonra 18:00
BETA-2 GLİKOPROTEİN I IGM	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
BETA-2 MİKROGLOBULİN	Salı Cuma (13.00)	Serum 24 S idrar Spot idrar Bos	<6 Ph idrar için 1 M NaOH eklenmelidir.	Bos için jelsiz düz tüp	K:Uygun kaba alım R:Düşük idrar Ph sı	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
BETA-2 TRANSFERRİN	Her gün	Burun ve kulak akıntısı + Serum	*	Tüm numuneler jelsiz düz tüpe alınmalıdır	K:Uygun kaba alım R:Aşırı kanlı, mukuslu numune	Soğuk zincir 2-8 C	8 gün Sonra 18:00
BİKARBONAT (HCO ₃)	Her gün	Serum, plazma	10-12 saat açlık	Numune direkt ışıkta korunmalıdır	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
BİLİRUBİN İNDİREKT	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Numune direkt ışıkta korunmalıdır	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
BİLİRUBİN NEONATAL	Her gün	Kapiller kan	Hastanın bir aylıktan küçük olması tercih edilir.	Numune direkt ışıkta korunmalıdır	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
BİLİRUBİN TOTAL	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Numune direkt ışıkta korunmalıdır	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
BİLİRUBİN DİREKT	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Numune direkt ışıkta korunmalıdır	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
BIOTİNİDAZ AKTİVİTESİ	Her gün	Serum	Yok	Hemen santrifüj ve dondurma işlemi	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir Kuru buz	18 gün Sonra 18:00
BNP (BRAIN NATRİÜRETİK PEPTİD)	Her gün	Edtalı plazma	Yok	Numunenin hemen santrifüjü gerekir	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, Lipemi, uzun bekleme	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
BOĞAZ KÜLTÜRÜ	Her gün	Sürüntü numunesi	Yok	Yok	K:Steril swab R:Uygunsuz alım	Özel transport besiyeri ile	2 gün Sonra 18:00
BORRELİ BURGDORFERİ IGG	Cuma Çarşamba (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
BORRELİ BURGDORFERİ IGM	Cuma Çarşamba (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
BORDETELLA PERTUSİS IgG	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	6 gün Sonra 18:00
BORDETELLA PERTUSİS IgM	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	6 gün Sonra 18:00
BOS KÜLTÜRÜ	Her gün	BOS	Yok	Yok	K:Steril swab R:Uygunsuz alım	Özel transport besiyeri ile	2 gün Sonra 18:00
Boyalı Mikroskopik İnceleme (Gram,M.Mavisi Wright,Ziehl-	Her gün	Materyal	Yok	Tercihen sabah numunesi	K: Steril Kap R:Donmuş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00
Boyasız Mikroskopik İnceleme	Her gün	Materyal	Yok	Tercihen sabah numunesi	K: Steril Kap R:Donmuş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00
BRUCELLA COOMBS (Tüp Aglütinasyon)	Her gün (16:00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
BRUCELLA IGG	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	6 gün Sonra 18:00
BRUCELLA IGM	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	6 gün Sonra 18:00
BRUCELLA WRIGHT (TüpAglütinasyon)	Her gün (16:00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün
BRUCELLA TARAMA (Rose Bengal)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
BURUN KÜLTÜRÜ	Her gün	Sürüntü numunesi	Yok	Yok	K:Steril swab R:Uygunuzuz alım	Özel transport besiyeri ile	2 gün Sonra 18:00
C1 ESTERAZ İNHİBİTÖR	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
CA 125	Her gün	Her gün	3-6 saat açlık	Ovülasyon, Menstrüasyon Dönemlerin de ölçülmez	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
CA 15-3	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
CA 19-9	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
CA 72-4	Cuma Çarşamba (13.00)	Serum	3-6 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
CEA (KARSİNOEMBRİYON İKANTİJEN)	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Sigara içilip içilmediği sorgulanmalıdır.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
CHLAMYDIA PNEUMONİAE IGG	Pazartesi Perşeme (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
CHLAMYDIA PNEUMONİAE IGM	Pazartesi Perşeme (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
CHLAMYDIA TRACHOMATİS PCR	Cuma (13.00)	İdrar, Sürüntü	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	6 gün Sonra 18:00
CHLAMYDIA TRACHOMATİS IGG	Pazartesi Perşeme (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
CHLAMYDIA TRACHOMATİS IGM	Pazartesi Perşeme (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
CİVA	Her gün	Edtalı tam kan 24 S idrar Spot idrar	Yok	İdrar için asitsiz idrar	K:Uygun toplanan numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün Sonra 18:00
CLOSTRİDİUM DİFFİCİLE TOKSİN A-B	Her gün	Gaita	Yok	Yok	K:Uygun kapta numune R: Yanlış numune	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
CLOSTRİDİUM DİFFİCİLE TOKSİN-A	Her gün	Gaita	Yok	Yok	K:Uygun kapta numune R: Yanlış numune	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
CLOSTRİDİUM DİFFİCİLE TOKSİN-B	Her gün	Gaita	Yok	Yok	K:Uygun kapta numune R: Yanlış numune	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
CMV PCR	Salı (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
CMV AVİDİTE	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
CMV IgG	Çalışılmıyor	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Çalışılmıyor
CMV IgG (mikroelisa)	Salı Cuma (09:00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
CMV IgM	Çalışılmıyor	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Çalışılmıyor
CMV IgM (mikroelisa)	Salı Cuma (09:00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
COOMBS DİREKT	Her gün	Edtalı tam kan	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
COOMBS İNDİREKT	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00
C-PEPTİD	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
CPYOGLOBULİN	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
CRP (C REAKTİF PROTEİN) High Sensitive	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
CRP (C REAKTİF PROTEİN) Latex	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
ÇİNKO (Eritrosit içi)	Her gün	Heparili Tam Kan	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra
ÇİNKO (Fotometrik)	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
ÇİNKO	Her gün	İdrar	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra
ÇOK UZUN ZİNCİRLİ YAĞ ASİTLERİ	Perşembe (13.00)	Edtali plazma	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	20 gün Sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
D-DİMER	Her gün	Sitratlı plazma	3-6 saat açlık	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
DELTA (HDV) ANTİJENİ	Salı (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
DELTAANTİKOR (ANTİ-HDV)	Salı (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
DEMİR	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Sabah açlığı numunesi tercih edilir	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, IM demir preparatı kullanımı	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Sabah açlığı numunesi tercih edilir	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, IM demir preparatı kullanımı	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
DEOKSİPİRİDİNOLİN (PYRİLLİN-D)	Çarşamba (13.00)	24 S idrar Spot idrar	Yok	6 N HCL, borik ya da asetik a. üzerine toplanmış idrar	K:Uygun kaba alınması R:Uygunsuz toplama	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
DESMOGLEİN 1 VE 3	Laba Danışın	*	*	*	*	*	*
DHEA-S (DHEA-SO4) (DEHİDROEPIANDRO STERON)	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
DHEA	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
DİGOKSİN	Her gün	Serum	Son 12 saatte ilacın alınmaması	Yok	K:Santrifüjli numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
DİĞER KÜLTÜRLER	Her gün	Materyal ya da değişik sürüntü örnekleri	Yok	Yok	K:Steril kap R:Uygunsuz alım	Özel transport besiyeri ile	2 gün Sonra 18:00
DİHİDROTESTOSTERON (DHT)	Çarşamba (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, Lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
DOKU TRANSGlutAMİNAZ IgA	Perşembe (09:00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, Lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00
DOKU TRANSGlutAMİNAZ IgG	Perşembe (09:00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, Lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00
DOPAMİN	Çarşamba (13.00)	Heparinli plazma	8-10 saatlik sabah açlığı ve son iki hf ilaç kısıtlama *	En az 30 dk dinlenme sonra tercihen venöz katater ile	K Hemen santrifüj R:Hemoliz, Lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	6 gün Sonra 18:00
DOPAMİN (idrar)	Cuma Pazartesi (13.00)	24 S idrar, Spot idrar	8-10 saatlik sabah açlığı ve son iki hf ilaç kısıtlama *	En az 30 dk dinlenme sonra tercihen venöz katater ile	K Hemen santrifüj R:Hemoliz, Lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	6 gün Sonra 18:00
DÖRTLÜ TARAMA TESTİ (İkinci trimester tarama testi)	Her gün	Serum	BPD ölçümünü içeren özel test formu mutlaka doldurulmalıdır	Gebeliğin 15 hf+0 gün ile 20 hf+6 gün arasında kan alınmalıdır	K:Santrifüjli numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
EBV EBNA IgM	Çarşamba Cuma (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
EBV VCA IgG	Çarşamba Cuma (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
EBV VCA IgM	Çarşamba Cuma	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
EBV EA IgG	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
EBV EA IgM	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
EBV EBNA IgG	Çarşamba Cuma	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
EKLEM SIVISI (synovial) KÜLTÜRÜ	Her gün	Eklem Sıvısı	Yok	Steril şartlarda	K:Steril tüpe alım R:Uygunsuz alım	Steril tüp ile	2 gün Sonra 18:00
ENA PROFİLİ (İMMUNBLOT)	Salı Cuma (09.00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, Lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00
ENTEROVİRUS PCR	Cuma (13.00)	Serum, Bos	Yok	Yok	K:Uygun tüp/kab R:Kontamine numuneler	Soğuk zincir 2-8 C	6 gün sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
EOZİNOFİL (Total)	Her gün	Edtalı tam kan	Yok	Diurnal varyasyonu var sabah 10:00-12:00 de maximum	K:Uygun tüpe alınması R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 12.00
EOZİNOFİL KATYONİK PROTEİN (ECP)	Her gün	Serum Kırmızı kapaklı tüp (tercihen)	Yok	Alım sonrası 1-2 saat oda ısısında bekletilmeli ve 1000 devirde santrifüj edilmeli	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, Lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
EPİNEFRİN (ADRENALİN)	Perşembe (13.00)	Heparinli plazma 24S,spot idrar	6N HCl üzerine Toplanmalıdır.		K:Uygun tüp/kab	Soğuk zincir 2-8 C	5gün Sonra 18:00
ERİTROPOİETİN	Her gün	Serum				Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
ESTRADIÖL (E2)	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Kadında tercihen adetın 2-5. günleri	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
ESTRIÖL (E3,uE3,serbest E3)	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
FAKTÖR II (Protrombin)	Pazartesi (13.00)	Sitratlı plazma	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	8 gün Sonra 18:00
FAKTÖR IX (Christmas Faktör)	Perşembe (13.00)	Sitratlı plazma	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
FAKTÖR V LEİDEN MUTASYONU (PCR)	Her gün	Edtalı tam kan	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	12 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
FAKTÖR V (Proakselerin)	Perşembe (13.00)	Sitratlı plazma	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
FAKTÖR VII (Prokonvertin)	Perşembe (13.00)	Sitratlı plazma	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
FAKTÖR VIII	Perşembe (13.00)	Sitratlı plazma	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
FAKTÖR VIII İNHİBİTÖR	Çarşamba Cuma (13.00)	Sitratlı plazma	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
FAKTÖR X (Stuart Faktör)	Perşembe (13.00)	Sitratlı plazma	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
FAKTÖR XI	Pazartesi (13.00)	Sitratlı plazma	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
FAKTÖR XII (Hageman Faktör)	Pazartesi (13.00)	Sitratlı plazma	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
FAKTÖR XIII (Fibrin stabilize edici faktör)	Pazartesi (13.00)	Sitratlı plazma	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
FAMİLİALAKDENİZ ATEŞİ MUTASYON ANALİZİ (FMF)	Her gün	Edtalı tam kan	Yok	Yok		Soğuk zincir 2-8 C	4 hafta sonra
FENİLALANİN	Çarşamba Cuma (13.00)	Filtre kağıdı kartında 3 dolu daire (min 1 daire)					5 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
FENİLKETONÜRİ TARAMASI	Her gün	Topuktan emdirilmiş kan				Soğuk zincir 2-8 C	10 gün Sonra 18:00
FENİTOİN (DİFENİLHİDANTOİN)	Her gün	Serum			K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
FİTANİK ASİD	Pazartesi	Edta'lı plazma				Soğuk zincir 2-8 C	17 gün Sonra
FENOBARBİTAL (LUMİNAL)	Her gün	Serum			K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
FERRİTİN	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
FURUKTOZAMİN	Her gün	Serum		Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
FİBRİNOJEN (Faktör 1)	Her gün	Plazma	Yok	Yok	K:Uygun Seviye R:Pihtılı, hemolizli numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
FOLAT (FOLİK ASİT)	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
FORMÜLLÖKOSİT	Her gün	Tam kan	Yok	Yok	K:Uygun Seviye R:Pihtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 12:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
FOSFOR (P,PO4)	Her gün	Serum, 24 s idrar	Serum için, 10-12 saat açlık	İdrar için toplama süresi ve miktarı belirtilmelidir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
FSH (FOLLİKÜL STİMÜLAN HORMON)	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Kadında tercihen adetın 2-5. günleri	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
FTA-ABS IgG, FTA-ABS IgM	Her gün	Serum				Soğuk zincir 2-8 C	17 gün Sonra 18:00
GAİTAKÜLTÜRÜ	Her gün	Gaita	Yok	Yok	K:Gaita Kabı R:Uygunsuz alım	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
GAİTADA ADENOVİRÜS ANTİJENİ	Her gün	Gaita				Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18.00
GAİTADAAMİP ANTİJENİ	Her gün	Gaita				Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18.00
GAİTADA DİREKT BAKI (Gaita Mikroskopisi)	Her gün	Gaita	Numune sıvı ise max 30 dk,katı ise 120 dk içinde ulaştırılmalıdır	1 cm3 numune yeterlidir	K:2-8 Cde 30 dk ya kadar beklemiş numune R:30 dk dan fazla beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
GAİTADA GIARDİA ANTİJENİ	Her gün	Gaita		1 cm3 numune yeterlidir		Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18.00
GAİTADA GİZLİ KAN	Her gün	Gaita	Yok (Testimiz monoklonal ve insan kanına duyarlıdır.)	1 cm3 numune yeterlidir	K:2-8 C de 3 güne kadar beklemiş numune R:3 günden fazla beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
GAİTADA HAZİM	Her gün	Gaita		1 cm3 numune yeterlidir	K:2-8 Cde 120 dk ya kadar beklemiş numune R:120 dk dan fazla beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
GAİTADA TRİPSİN	Her gün	Gaita					3 gün Sonra
GAİTADA PARAZİT YUMURTASI	Her gün	Gaita	Numune sıvı ise max 30 dk,katı ise 120 dk içinde ulaştırılmalıdır	1 cm3 numune yeterlidir	K:2-8 Cde 120 dk ya kadar beklemiş numune R:120 dk dan fazla beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C Gaita kabı	Aynı gün
GAİTADA PH	Her gün	Gaita	Yok	1 cm3 numune yeterlidir	K:2-8 Cde 120 dk ya kadar beklemiş numune R:120 dk dan fazla beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
GAİTADAREDÜKTAN MADDE	Her gün	Gaita	Yok	1 cm3 numune yeterlidir	K:2-8 Cde 6 saate kadar beklemiş numune R:6 saatten fazla beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
GAİTADAROTAVİRÜS ANTİJENİ	Her gün	Gaita	Yok	1 cm3 numune yeterlidir	K:2-8 Cde 120 dk ya kadar beklemiş numune R:120 dk dan fazla beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
GAİTADA YAĞ ANALİZİ (Sudan III Black)	Her gün	Gaita	Yok	1 cm3 numune yeterlidir	K:2-8 Cde 6 saate kadar beklemiş numune R:6 saatten fazla beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 12.00
GALAKTOMANNAN (ASPERGİLLUS) ANTİJENİ	Salı (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,Lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Cuma 18:00
GALAKTOZ-1 FOSFAT ÜRİDİL TRANSFERAZ (GALT)	Laba Danışın	Edtalı tam kan	*	*	*	Soğuk zincir 2-8 C	*
GASTRİN	Cuma (13.00)	Serum	8-10 saat açlık	Gastroskopi sonrası numune alınmamalıdır	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,Lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
Gangliosit Antikorları (GM1,GM2,GM3,GD1a,GD1a,GT1a,GQ 1B)	Her gün	Serum			K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,Lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	17 gün Sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
GENİTAL Sürüntü/Akıntı KÜLTÜRÜ	Her gün	Sürüntü numunesi	Yok	Yok	K: Steril swap R: Uygunsuz alım	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
GGT (GAMAGLUTAMİLTRANSFERRAZ)	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K: Santrifüjlü numune R: Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
GLOBULİN	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K: Santrifüjlü numune R: Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
GİLBERT SENDROMU UGT1A1	Her gün	Edta'lı tam kan				Soğuk zincir 2-8 C	30 gün sonra
GLUKOZ (Açlık)	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Sabah açlığı numunesi tercih edilir	K: Santrifüjlü numune R: Hemoliz , uzun süre beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
GLUKOZ (Gün içi)	Her gün	Serum, idrar, diğer mayii	Yok	Materyale özgü	K: Santrifüjlü numune R: Hemoliz , uzun süre beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
GLUKOZ (Tokluk)	Her gün	Serum	Yemek Sonrası 2. saat tokluk	2 saatlik süre ilk lokmadan itibaren hesaplanmalıdır	K: Santrifüjlü numune R: Hemoliz , uzun süre beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
GÜMÜŞ	Her gün	Serum (Laciver kapaklı tüp) - 1 mL (min 0.5 mL)		Not: Örnekler laciver kapaklı tüpe alınmalıdır. Eğer uygun tüpe alınır ve saklanırsa eser element düzeyleri zamanla değişmez.	K: Santrifüjlü numune R: Hemoliz , uzun süre beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
GLUKOZ 6 FOSFAT DEHİDROGENAZ (G6PDH)	Salı	Edtalı tam kan	Yok	Yok	K:Uygun Seviye R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
GÖZ (Konjonktiva) KÜLTÜRÜ	Her gün	Sürüntü numunesi	Yok	Yok	K:Steril swap R:Uygunsuz alım	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
GROWTH HORMON (Büyüme Hormonu)	Her gün	Serum	10-12 saat sabah açlığı	30 dakika dinlenme sonrası	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, Lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün sonra 18:00
HAPTOGLOBİN	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
HbA1C	Her gün	Tam kan	Yok	Yok	K:Uygun Seviye R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
HBeAg	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00
HBeAg (Mikroelisa)	Çalışılmıyor	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	*
HBsAg	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
HBsAg (mikroelisa)	Her gün (13:30)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün
HBV DNA (PCR)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
HCV RNA (PCR)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
HCV GENOTİPLENDİRME	Cuma (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
HDV RNA (PCR)	Her gün	Edtali plazma	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	12 gün Sonra 18:00
HE4	Salı (13.00)	Kırmızı Kapaklı tüp, Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
HELİKOBAKTER PYLORİ (Direkt Antijen)	Her gün	Gaita	Yok	Soğuk ortamda numune gönderimi	K:2-8 Cde 120 dk ya kadar beklemiş numune R:120 dk dan fazla beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18.00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
HELİKOBAKTER PYLORİ IgA	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
HELİKOBAKTER PYLORİ IgG	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
HEMOSİDERİN	Her gün	Spot idrar	Yok	Yok		Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
HEMOGLOBİN ELEKTROFOREZİ (HPLC)	Pazartesi Perşembe (16.00)	Tam kan	Yok	Yok	K:Uygun Seviye R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00
HEMOGRAM *Bakınız Tam Kan Tahlili	*						*
HIV (p24Ag+IgG) (mikroelisa)	Her gün (13:30)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00
HIV ½ ANTİKOR	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
HIV DOĞRULAMA (Western Blot)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C Düz Tüp	7 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
HIV -1 RNA (PCR)	Çarşamba (13.00)	EDTA'lı Plazma	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C Düz Tüp	7 gün Sonra 18:00
HLA-B27	Her gün	Edtalı Tam Kan	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
HLA-B5 (51,52)	Pazartesi (13.00)	Edtalı Tam Kan	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
HLA-B7	Her gün	Edtalı Tam Kan	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
HPV GENOTİPLENDİRME	Çarşamba	Servikal Smear	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün Sonra 18:00
HPV DNA PCR	Her gün	THİN PREP, JELSİZ SÜRÜNTÜ	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	12 gün Sonra 18:00
HLA-B7	Her gün	Edtalı Tam Kan	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
HLA-DR	Her gün	Edtalı Tam Kan	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
HOMOSİSTEİN	Her gün	Serum	10-12 saat sabah açlığı	Hemen santrifüleme	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz ve pıhtı	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
HSV PCR (Herpes Simpleks) HSV TİP 1 (PCR), HSV TİP 2 (PCR)	Pazartesi (13.00)	Serum EDTA'lı Plazma, BOS, BAL, Sürüntü	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz ve pıhtı	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
HSV TİP 1 IgG (Herpes Simpleks)	Pazartesi (13.00)	Serum, Bos	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
HSV TİP 1 IgM (Herpes Simpleks)	Pazartesi (13.00)	Serum, Bos	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
HSV TİP 1 PCR (BOS), HSV TİP 2 PCR (BOS)	Cuma (13.00)	Bos	Yok	Yok	K:Uygun numune R:Steril olmayan numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün Sonra 18:00
HSV TİP 2 IgG (Herpes Simpleks)	Pazartesi (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
HSV TİP 2 IgM (Herpes Simpleks)	Pazartesi (13.00)	Serum, Bos	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
HUMAN PAPİLLOMA VİRUS (HPV) PCR	Her gün	Sürüntü numunesi	Yok	Jelsiz swap ile	K:Uygun numune R:Steril olmayan numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
HİPPÜRİK ASİT	Her gün	Spot idrar	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	12 gün Sonra 18:00
IGF-1 (SOMATOMEDİN C)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, Lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün sonra 18:00
IGFBP-3 (İNSÜLİN LİKE GROWTH FAKTÖR BAĞLAYAN)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, Lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün sonra 18:00
İDRAR KÜLTÜRÜ	Her gün	İdrar	Genital Bölge temizliği	Tercihen sabah ve orta akım idrarı	K:Steril idrar kabı R:Uygunsuz alım, beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
İDRARDA REDÜKTAN MADDE	Her gün	İdrar	Yok	Yok	K:Steril idrar kabı R:Uygunsuz alım, beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18.00
İDRARDA YABANCI MADDE ARANMASI (İDRARDA UYUŞTURUCU)	Her gün	Spot idrar	Yok	Yok	K:Steril idrar kabı R:Uygunsuz alım, beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18.00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
İKİLİ TARAMA TESTİ (Birinci Trimester Tarama testi)	Her gün	Serum	NT ve CRL ölçümünü içeren özel test formu mutlaka doldurulmalıdır	Gebeliğin 11 hf+0 gün ile 13 hf+6 gün arasında kan alınmalıdır	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
İMMUNFİKSASYO (İMMÜNGLOBULİN) ELEKTROFOREZİ	Her gün	Serum BOS 24 S idrar	Yok	Asitsiz idrar	K:Uygun numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	6 gün Sonra 18:00
İMMÜNGLOBULİN A (IgA)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
İMMÜNGLOBULİN A1 (IgA1)	Salı	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	30gün Sonra 18:00
İMMÜNGLOBULİN A2 (IgA2)	Salı	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	30 gün Sonra 18:00
İMMÜNGLOBULİN D (IgD)	Pazartesi (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
İMMÜNGLOBULİN E (IgE)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
İMMÜNGLOBULİN G (IgG)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
İMMÜNGLOBULİN G ALT GRUPLARI (IgG1,IgG2,IgG3,IgG4)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
IgG İNDEKSİ	Cuma (13.00)	Serum ve BOS birlikte gönderilmesi gerekir - 1 mL (min 0.5 mL)	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	18 gün Sonra 18:00
İMMÜNGLOBULİN M (IgM)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
İNFLUENZA A+B (HIZLI TEST)	Her gün	Nazofarengeal sürüntü	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
İNHİBİN A	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
İNHİBİN B	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	22 gün Sonra 18:00
İNSÜLİN (AÇLIK)	Her gün	Serum	10-12 saat açlık şartı vardır	Oral hipoglisemik ya da insülin kullanılmad	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
İNSÜLİN (TOKLUK)	Her gün	Serum	2 saatlik tokluk	Oral hipoglisemik ya da insülin kullanılmad	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
İNSÜLİN REZİSTANSI (HOMA-IR İNDEKSİ)	Her gün	Serum	10-12 saat açlık şartı vardır	Oral hipoglisemik ya da insülin kullanılmadan	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
İYOT	Her gün	Serum, 24 h idrar, Spot	Yok			Soğuk zincir 2-8 C	15 gün Sonra 18:00
JAK2 EKZON 12 MUTASYONLARI		EDTA'lı Kemik iliği Aspirasyon Materyali,	Dondurulmamalıdır.			Soğuk zincir 2-8 C	15 gün Sonra 18:00
KABAKULAK (MUMPS) IgG	Pazartesi Çarşamba (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
KABAKULAK (MUMPS) IgM	Pazartesi Çarşamba (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
KADMİYUM (CD)	Her gün	Edtalı tam kan	Yok	Yok	K:Uygun numune R:Pihtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün Sonra 18:00
KALAY	Her gün	Edtalı tam kan	Yok	Yok	K:Uygun numune R:Pihtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün Sonra 18:00
KALSİTONİN	Pazartesi Çarşamba (13.00)	Serum	10-12 saat açlık gerekir.	Tiroid muayenesi sonrası alınmamalıdır.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
KALSİYUM İYONİZE	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
KALSİYUM TOTAL (Ca)	Her gün	Serum, 24 s idrar, BOS	Serum için, 10-12 saat açlık	Turnike süresi kısa tutulmalıdır	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
KAN KÜLTÜRÜ	Her gün	Tam kan	Yok	5-10 cc, özel vasata	K:Steril Koşullarda alım R:Uygunsuz alım	Soğuk zincir 2-8 C	6 gün Sonra 18:00
KAN GRUBU (A,B,O+Rh)	Her gün	Tam kan	Yok	Yok	K:Uygun Seviye R:Pihtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
KAPPA HAFİF ZİNCİR (İDRAR)	Çarşamba Cuma (13.00)	24 S idrar	Yok	Asitsiz idrar	K:Uygun idrar kabı R:Uygunsuz alım, beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
KAPPA HAFİF ZİNCİR SERBEST	Çarşamba Cuma (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
KAPPA HAFİF ZİNCİR TOTAL	Her gün	Serum, idrar	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
KARBAMAZEPİN (Tegretol)	Her gün	Serum	Son 12 saatte ilacın alınmaması	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
KIZAMIK (RUBEOLA) IgG	Pazartesi Çarşamba (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
KIZAMIK (RUBEOLA) IgM	Pazartesi Çarşamba (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
KIZAMIKÇIK (RUBELLA) IgG	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
KIZAMIKÇIK (RUBELLA) IgG (Mikroelisa)	Salı Cuma (09:00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
KIZAMIKÇIK (RUBELLA) IgG AVİDİTE	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması ve IgG testinin pozitif olması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
KIZAMIKÇIK (RUBELLA) IgM (Mikroelisa)	Salı Cuma (09:00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
KIZAMIKÇIK (RUBELLA) IgM	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
KİST HİDATİK IgG (Echinococ IgG)	Pazartesi Perşembe (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
KİST HİDATİK İHA (Echinococ İndirekt Hemaglutinasyon)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
KİST HİDATİK SPESİFİK IgE (Echinococ Spesifik IgE)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	30 gün Sonra 18:00
KLOR (KLORÜR,CL-)	Her gün	Serum, 24 s idrar, Spot idrar	Serum için, 10-12 saat açlık	İdrar için toplama süresi ve miktarı belirtilmelidir.	K:Santrifüjli numune R:Hemoliz ,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
KOBALT	Her gün	Edtalı tam kan	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
KOLESTEROL HDL	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
KOLESTEROL LDL	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
KOLESTEROL TOTAL	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
KOLESTEROL VLDL	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
KOLİNESTERAZ II (PSEUDOKOLİNESTERAZ)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
KOMPLEMAN C3	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
KOMPLEMAN C4	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
KORTİZOL (HİDROKORTİZON)	Her gün	Serum	Yok	Erken sabah açlığı numunesi tercih edilir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
KORTİZOL (HİDROKORTİZON)	Her gün	24 h idrar	Asitsiz	Erken sabah açlığı numunesi tercih edilir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün sonra 18:00
KREATİN KİNAZ (CK,CPK)	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
KREATİN KİNAZ MB (CKMB)	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
KREATİNİN	Her gün	Serum, 24 s idrar, Spot idrar	Soğuk zincir 2-8 C Düz Tüp	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
KREATİNİN KLERENSİ	Her gün	Serum+ 24 s idrar	Test süresince çay, kahve, ilaç egzersiz yasak	İdrar için toplama süresi ve miktarı belirtilmelidir.	K:Eşzamanlı kan örneği R:İdrarın uygun toplanmaması	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
KROM (Cr)	Her gün	Edtalı tam kan 24 S idrar	İdrar borik veya 6N HCL üzerine toplanmalıdır	Soğuk ortamda saklanarak toplanmalıdır	K:Uygun idrar kabı R:Uygunsuz toplama	Soğuk zincir 2-8 C	12 gün Sonra 18:00
KROMOGRANİN A	Salı (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
KULAK KÜLTÜRÜ	Her gün	Sürüntü numunesi	Yok	Yok	K:Steril swab R:Uygunsuz alım	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
KURŞUN (Pb)	Her gün	Edtalı tam kan 24 S idrar, Spot idrar	İdrar 6 N HCL,borik ya da asetik a. üzerine toplanmış idrar	Yok	K:Uygun numune R:Uygunsuz idrar toplama, pıhtılı kan	Soğuk zincir 2-8 C	12 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
LAKTİKASİT	Her gün	Oksalatlı Plazma	Hasta en az 30 dk istirahat etmiş olmalıdır	Plazma hemen ayrılmalıdır	K:Uygun tüpe alım R:Pıhtılı ve hemolizli numune	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün sonra
LAMBDA HAFİF ZİNCİR SERBEST	Çarşamba Cuma (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
LAMBDA HAFİF ZİNCİR TOTAL	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
LAMBDA HAFİF ZİNCİR (İDRAR)	Çarşamba Cuma (13.00)	Spot idrar 24 S idrar	Yok	Asitsiz idrar	K:Uygun idrar kabı R:Uygunsuz alım, beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
LAMOTRİGİNE (LAMICTAL)	Pazartesi Perşembe (13.00)	Serum	Son 12 saatte ilacın alınmaması	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
LDH (LAKTAT DEHİDROGENAZ)	Her gün	Serum BOS Plevra sıvısı	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
LDH İZOENZİMLERİ ELEKTROFOREZİ (LAKTAT DEHİDROGENAZ İZOENZ.)	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	1 ay sonra
LE HÜCRESİ	Her gün	Cam tüpe düz kan (santrifüj edilmeden)	*	*	K:Santrifüjsüz numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün Sonra
LENFOSİT ALT GRUPLARI (8 adet monoklonal antikor sonucu verilir)	Her gün	Edtalı tam kan	Yok	Yok	K:Uygun Seviye R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
LEPTİN	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Hastanın kilo ve boyu bildirilmelidir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	25 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
LEGİONELLA ANTİJENİ (İdrar)	Her gün	İdrar	Yok	Yok		Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
LEGİONELLA PNEUMOPHİLA 1 IGG	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
LEGİONELLA PNEUMOPHİLA 1 IGM	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
LEVETİRACETAM (KEPPRA)	Pazartesi Çarşamba (13.00)	Serum	Son 12 saatte ilacın alınmaması	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
LH (LUTEİNLEŞTİRİCİ HORMON)	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Kadında tercihen adetin 2-5. günleri	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
LİMBİK ENSEFALİT PANEL	Cuma (13.00)	BOS	*	*	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
LİPAZ	Her gün	Serum Spot idrar	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
LİPID ELEKTROFOREZİ	Her gün	Serum	İki hf normal diyet, son 24 saatte alkol alımı yasak 10-12 saat açlık gerekir	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Yanlış numune	Soğuk zincir 2-8 C	1 ay Sonra 18:00
LİPOPROTEİN (a)	Salı Cuma (13.00)	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
LİSTERİA AGLÜTİNASYON	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
LİTYUM (Li)	Her gün	Serum	Son ilaç dozundan 12 saat Sonra	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
LİVER KİDNEY MİKROZOMAL ANTİKOR	Çarşamba (09:00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00
LİZOZİM (MURAMİDAZ)	Her gün	Serum, Plevra	Plevra (Jelsiz tüp)		K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	20 gün Sonra 18:00
LUPUS ANTİKOAGÜLAN DOĞRULAMA	Her gün	Sitratlı plazma	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
LUPUS ANTİKOAGÜLAN TARAMA	Her gün	Sitratlı plazma	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
MAGNEZYUM (Mg)	Her gün	Serum, 24 s idrar BOS	10-12 saat açlık	İdrar için toplama süresi ve miktarı belirtilmelidir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
MAKROPROLAKTİN TARAMASI	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
MAKRO AST	Her gün	Kırmızı kapak, Düz	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
MDS PANELİ (FISH)	Her gün	Heparinli ve edta lı Kemik iliği aspirasyon materyali 3mL		Dondurulmamalıdır. Aynı örnek genetik çalışma öncesi başka bir analize alınmamalıdır.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	18 gün Sonra 18:00
MANTAR ARANMASI VE KÜLTÜRÜ	Her gün	Saç,deri, tırnak kazıntısı	Bölgenin 2-3 gün yıkanmaması ve haricen ilaç kullanılmaması	%70 lik alkol ile silindikten Sonra	K:Uygun numune R:İlaçlı bölgeden alım	Yok	8 gün Sonra
MANTAR DİREKT BAKISI	Her gün	Saç,deri, tırnak kazıntısı	Bölgenin 2-3 gün yıkanmaması ve haricen ilaç kullanılmaması	%70 lik alkol ile silindikten Sonra	K:Uygun numune R:İlaçlı bölgeden alım	Yok	Aynı gün
METANEFRİN	Perşembe (13.00)	Edtalı plazma 24 S idrar spot idrar	İdrar 6 N HCL, borik ya da asetik a. üzerine toplanmış idrar	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	6 gün Sonra 18:00
METHEMOGLOBİN	Her gün	Edtalı tam kan	Yok	Yok	K:Uygun numune R:Pihtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
METİL MALONİK ASİT	Pazartesi	Serum	Yok	Yok	K:Uygun numune R:Pihtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
MİKROBAKTERİ (TÜBERKÜLOZ) KÜLTÜRÜ	Her gün	Materyal	Yok	Yok	K: Steril Kap	Yok	46 gün Sonra
MİKROBAKTERİ (TÜBERKÜLOZ) PCR	Lab a danışın	*	Yok	Yok	K: Steril Kap	Yok	*
MİKROBAKTERİ (TÜBERKÜLOZ) KÜLTÜRÜ OTOMATİK	Her gün	Balgam, trakeal aspirat, bronş lavaj ve diğer vücut sıvılarında 10-15 ml	Yok	Yok	K: Steril Kap	Yok	50 gün Sonra
MİKROPLAZMA HOMİNİS	Her gün	Sürüntü numunesi	Yok	Üretral ya da servikal örnek	K: Steril Kap	Soğuk zincir 2-8 C	4gün Sonra 18:00
MİKROPLAZMA PNEUMONİAE IgG	Çarşamba Cuma	Serum	Yok	Yok	K: Santrifüjlü numune R: Hemoliz,	Soğuk zincir 2-8 C	4gün Sonra 18:00
MİKROPLAZMA PNEUMONİAE IgM	Çarşamba Cuma	Serum	Yok	Yok	K: Santrifüjlü numune R: Hemoliz,	Soğuk zincir 2-8 C	4gün Sonra 18:00
MİKROALBUMİN (İdrar)	Her gün	24 s idrar, Spot idrar	Yok	İdrar toplama süresi ve miktarı belirtilmelidir.	K: Uygun kaba alınması R: Numunenin soğuk ortamda bekletilmemesi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
MİKROPROTEİN (İdrar)	Her gün	24 s idrar, Spot idrar	Yok	İdrar toplama süresi ve miktarı belirtilmelidir.	K: Uygun kaba alınması R: Numunenin soğuk ortamda bekletilmemesi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
MONOSPOT TEST (HETEROFİL ANTİKOR)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
MOLİBDEN	Her gün	Serum (Laciver kapaklı tüp) - 1 mL (min 0.5 mL) Not: Örnekler lacivert kapaklı tüpe alınmalıdır. Eğer uygun tüpe alınır ve saklanırsa eser element düzeyleri zamanla değişmez.	Yok	Yok		Soğuk zincir 2-8 C	6 gün Sonra 18:00
MYCOPLASMA KÜLTÜRÜ	Her gün	servikal sürüntü (kadın), üretral sürüntü veya ön İdrar (erkek)	Yok	Yok		Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
MYCOPLASMA PNEUMONIA IgM	Cuma Çarşamba (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
MYCOPLASMA PNEUMONIA IgG	Cuma Çarşamba (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
MYOGLOBİN	Her gün	Serum, İdrar - 1 mL (min 0.5 mL)	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
MTHFR (A1298C) MUTASYON ANALİZİ	Her gün	Edtali tam kan	Yok	Yok	K:Uygun numune R:Pihtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	25 gün Sonra 18:00
MTHFR (C677T) MUTASYON ANALİZİ	Her gün	Edtali tam kan	Yok	Yok	K:Uygun numune R:Pihtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	25 gün Sonra 18:00
MUKOPOLİSAKKARİT	Lab a danışın	*	Yok	Tercihen sabah ilk idrar, dondurulmuş numune	K:Dondurulmuş numune R:Oda ısısı ve buzdolabındaki numune kabul edilmez	Kuru buzda transferi uygundu	*
NEONATAL BİLİRUBİN	Her gün	Kapiller kan	Numune topuktan alınmalıdır	1 aya kadar olan numuneler tercih edilir	K:Uygun numune R:Hemolizli numune	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün
NEONATAL TSH	Her gün	Absorban kağıdı emdirilmiş tam kan 2 daire tam dolu	Doğumdan sonra 1 hf içinde, 1 aya kadar olan numuneler kabul edilir	En az 3 saat oda ısısında, direkt güneş ışığından uzakta kurutulmalıdır	K:Uygun numune R:Özel kağıda emdirilmemiş numune	Uygun transfer	5 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
NİKEL (Ni)	Her gün	24 S idrar spot idrar Serum	Yok	Asitsiz idrar	K:Uygun idrar kabı R:Uygunsuz alım, beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	12 gün Sonra 18:00
NOREPİNEFRİN (NORADRENALİN)	Perşembe (13.00)	24 S idrar spot idrar Heparinli plazma (Soğuk ortam)	Yok	(Dondurulmuş Plazma)	K:Uygun numune	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
NORMETANEFRİN	Perşembe (13.00)	24 S idrar spot idrar Edtalı plazma (soğuk ortam)	Yok	(Dondurulmuş Plazma)	K:Uygun numune	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
NÖRON SPESİFİK ENOLAZ (NSE)	Çarşamba (13.00)	Serum	Yok	30-45 dk içinde santrifüj edilmeli	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz , uzun süre beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
OGTT (100 g)	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yükleme Sonrası 180 dk egzersiz ve yemek içmek yasak	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz , uzun süre beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
OGTT (50 g)	Her gün	Serum	Tercihen en az 3 saatlik açlık	Yükleme Sonrası 60 dk egzersiz ve yemek içmek yasak	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz , uzun süre beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
OGTT (75 g)	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yükleme Sonrası 120 dk egzersiz ve yemek içmek yasak	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz , uzun süre beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
OKSALAT	Çarşamba Cuma	24 S idrar Spot idrar	Son 48 saat içinde C vitamini kullanılmamalıdır	6 N HCL üzerine toplanmış idrar	K:Uygun idrar kabı R:Uygunsuz alım, beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
OKSİYUR YUMURTASI ARANMASI (Enterobius Vermicularis)	Her gün	Pre anal selofan bant numunesi		Sabah erken saatte hasta yataktan kalkmadan numune alınmalıdır	K:Uygun numune R:Uygunsuz alım, beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
Oligoklonal bant (BOS İmmunelektroforez)	Pazartesi (13.00)	Serum - 1 mL (min 0.5 mL) + BOS - 1 mL (min 0.5 mL)	Yok	Bos eş zamanlı serum alınmalıdır.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz , uzun süre beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	18 gün Sonra 18:00
ORGANİKASİT ANALİZİ	Her gün	Spot idrar	Yok	Soğuk ortamda gönderilmiş numune gerekir.	K:Uygun idrar kabı R:Uygunsuz alım, beklemiş numune	Kuru buzda	4 hafta Sonra
OSMOLALİTE	Her gün	Serum 24 S idrar Spot	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
OSMATİK FRAJİLİTE	Pazartesi Çarşamba (13.00)	Edtalı tam kan	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
OSTEOKALSİN	Pazartesi (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
OTOİMMÜN KARACİĞER PROFİLİ	Pazartesi (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
Oxcarbazepine Metaboliti (MHC) serum	Her gün	Serum	*	Aksi belirtilmedikçe idame düzey belirlenmesi için ilaç kullanımından hemen önce örnek alınmalıdır.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
OTOİMMÜN HEPATİT PANELİ (Otoimmün Karaciğer Profili)	Pazartesi	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
PARACETAMOL (ASETAMİNOFEN)	Her gün	Serum	Son 12 saatte ilacın alınmaması	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	8 gün Sonra 18:00
PARATHORMON (PTH,intact)	Her gün	Serum	Yok	İlaç olarak kullanılıyorsa belirtilmelidir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz , oda ısısında 1 saatten fazla beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
PARVO VİRUS B-19 IgG	Cuma (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
PARVO VİRUS B-19 IgM	Cuma (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
PARASETAMOL (ASETAMİNOFEN)	Her gün	Serum		Son ilaç alımından en az 2 saat süre geçmeden numune alınmamalıdır.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
PARANEO PLASTİK PANEL	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	18 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
PANKREATİK (FEKAL) ELASTAZ	Çarşamba (13.00)	Gaita	Yok	Yok	K:Uygun gaita kabı R:Uygunsuz alım, beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
PERİFERİK YAYMA İNCELEMESİ	Her gün	Tam kan	Yok	Yok (Platelet için tercihen kapiller kan)	K:Uygun Seviye R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00
PİRUVAT (PİRÜVİK ASİT)	Her gün	Edtalı tam kan	Yok	Yok	K:Uygun numune R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
PİRUVAT KİNAZ	Her gün	Edtalı tam kan	Yok	Yok	K:Uygun numune R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
PERİFERİK KANDA KROMOZOM ANALİZİ	Her gün	Heparinli tam kan		Dondurulmamalıdır. Aynı örnek genetik test çalışması öncesinde başka bir analize alınmamalıdır.	K:Uygun numune	Soğuk zincir 2-8 C	18 gün Sonra 18:00
PLASMODİUM ARANMASI	Her gün	Kalın ve ince yayma preparatları	*	*	*		3 gün Sonra 18:00
PLAZMARENİN AKTİVİTESİ (PRA)	Çarşamba Cuma (13.00)	Edtalı plazma	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
PORFİNLER (Total) (Üroporfirin, heptakarboksiporfirin, heksakarboksiporfirin , pentakarboksiporfirin, koproporfirin koproporfirin)	Pazartesi	İdrar	Yok	Not: Karanlık ve soğuk ortamda toplanmalı ve gönderilmelidir. 24 saatlik numune gönderimi yaparken; toplama başlangıcında koruyucu olarak 5 g sodyum karbonat (T272) ekleyin	K:Uygun idrar kabı R:Uygunsuz alım, beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
PORFOBİLİNOJEN	Pazartesi (13.00)	İdrar - 5 mL (min 2.5 mL) Not:.	Yok	Karanlık ve soğuk ortamda toplanmalı ve gönderilmelidir	K:Uygun idrar kabı R:Uygunsuz alım, beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	6 gün Sonra 18:00
POTASYUM (K+)	Her gün	Serum, 24h idrar, Spot idrar BOS	Yok	İdrar için toplama süresi ve miktarı belirtilmelidir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
PREALBUMİN	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
PRO BNP (Pro Brain Natriüretik Peptid)	Her gün	Edtalı plazma	Yok	Numunenin hemen santrifüjü gerekir	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
PROCALCİTONİN	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00
PREGNENOLON	Pazartesi	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,	Soğuk zincir 2-8 C	6 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
PRIMIDON VE FENOBARBITAL PANELİ	Her gün	Serum	Yok	Aksi belirtilmedikçe idame düzey belirlenmesi için ilaç kullanımından hemen önce örnek alınmalıdır.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,	Soğuk zincir 2-8 C	6 gün Sonra 18:00
PROGESTERON	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
PROLAKTİN (PRL)	Her gün	Serum	3-6 saat açlık ve uyandıktan birkaç saat sonra	Uykusuzluk, stres, egzersiz, coitus, Sonrası numune alınmamalıdır	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
PROSTATİKASİT FOSFATAZ (PAP)	Her gün	Serum	Yok	Rektal muayeneden 72 saat sonra	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
PROTEİN	Her gün	Serum 24 S idrar, Spot idrar BOS vb.	Serum için 10-12 saat açlık	Kısa süreli turnike	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
PROTEİN C AKTİVİTESİ	Pazartesi (13.00)	Sitratlı plazma	Coumadin iki hafta önce heparin iki gün önce	Numune hemen ayrılmalıdır	K:Uygun numune R:Hemoliz, pıhtı	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
PROTEİN C ANTİJENİ	Pazartesi (13.00)	Sitratlı plazma	Yok	Numune hemen ayrılmalıdır	K:Uygun numune R:Hemoliz, pıhtı	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
PROTEİN ELEKTROFOREZİ	Her gün	24h idrar (asitsiz)	10-12 saat açlık	Yok	K:Uygun idrar kabı R:Uygunsuz alım, beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	7gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
PROTEİN ELEKTROFOREZİ	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	12 gün Sonra 18:00
PROTEİN S ANTİJENİ	Pazartesi (13.00)	Sitratlı plazma	Yok	Numune hemen ayrılmalıdır	K:Uygun numune R:Hemoliz, pıhtı	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
PROTEİN S AKTİVİTESİ	Pazartesi (13.00)	Sitratlı plazma	Coumadin iki hafta önce heparin iki gün önce kesilmelidir.	Numune hemen ayrılmalıdır	K:Uygun numune R:Hemoliz, pıhtı	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
PROTROMBİN ZAMANI (PTZ + INR)	Her gün	Plazma	Coumadin kullanımından önce kan alınmalıdır	Numune hemen ayrılmalıdır	K:Uygun Seviye R:Pıhtılı, hemolizli numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
PSA SERBEST (FPSA)	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Rektal muayeneden 72 saat sonra	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
PSA TOTAL (TPSA)	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Rektal muayeneden 72 saat sonra	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
QUANTİFERON (TB-GOLD)	Her gün	Özel kan alım tüpleri (3'lü) Lab'dan temin ediniz	Çalkalama sonrası tüpler 37 C de inkubatörde dik olarak 16-24 saat inkübe edilmelidir	Numune alındıktan tüpün iç yüzeyi bulaşacak şekilde 20 sn kuvvetlice çalkalanmalıdır.	K:Uygun alınmış numune R:Dondulmuş numune	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
REVERSE T3	Perşembe (13.00)	Serum	Yok	*	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
RESPIRATORY SYNCYTİAL VİRUS IgG (RSV IgG)	Cuma (13.00)	Serum	Yok	*	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
RESPIRATORY SYNCYTİAL VİRUS IgM (RSV IgM)	Cuma (13.00)	Serum	Yok	*	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
RETİKÜLOSİT	Her gün	Edtalı Tam kan	Yok	Yok	K:Uygun Seviye R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün
RF (ROMATOİD FAKTÖR) LATEKS	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
RF (ROMATOİD FAKTÖR) TURBİDİMETRİK	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
SALMONELLA GRUP AGLÜTİNASYON (GRUBER WİDAL)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
SAFRA ASİTLERİ (AÇLIK)	Cuma Çarşamba (13.00)	Serum	Yok	*	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
SAFRA ASİTLERİ (TOKLUK)	Cuma Çarşamba (13.00)	Serum	Yok	*	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
SALISILAT (aspirin)	Her gün	Serum	Yok	*	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
SEDİMENTASYON (SEDİM,ESR)	Her gün	Tam kan	Yok	Yok	K:Uygun Seviye R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
SEKS HORMON BAĞLAYICI GLOBULİN (SHBG)	Salı Cuma (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
SELENYUM (Se)	Her gün	Serum, Spot idrar, 24 S idrar (asitsiz)	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	12 gün Sonra 18:00
SELENYUM (Se) ERİTROSİT İÇİ	Her gün	Heparilli Tam Kan	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	6 gün Sonra 18:00
SEMEN (Meni,Sperm) KÜLTÜRÜ	Her gün	Semen,meni	Genital Bölge temizliği	YOK	K:Steril idrar kabı R:Uygunsuz alım,beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
SERBEST T3	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Sabah açlığı ve ilaç kullanımı öncesi tercih edilir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
SERBEST T4	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Sabah açlığı ve ilaç kullanımı öncesi tercih edilir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
SEROTONİN (5-OH TRİPTAMİN)	Her gün	Serum, 24 s idrar		6 N HCL üzerine toplanmış idrar	K:Steril idrar kabı R:Uygunsuz alım,beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	17 gün Sonra 18:00
SERULOPLAZMİN	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
SERUM AMYLOİD A (SAA)	Cuma (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
SİSTİN	Her gün	24 S idrar, (asit eklenerek)	Yok	asit eklenerek		Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
SİKLOSPORİN	Her gün	Edtalı tam kan	Yok	Yok		Soğuk zincir 2-8 C	6 gün Sonra 18:00
SİKROLİMUS	Pazartesi Çarşamba (13.00)	Edtalı tam kan				Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
SİSTATİN C	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
SİTRAT	Cuma Pazartesi (13.00)	24 h idrar (asit eklenerek)	Yok	6 N HCL üzerine toplanmış idrar		Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
SOĞUK AGGLUTINATION	Her gün	Serum+ tam kan	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
SOLUBLE TRANSFERRIN RECEPTOR	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
SODYUM (Na ⁺)	Her gün	Serum, 24 s idrar, Spot idrar BOS vb.	Yok	İdrar için toplama süresi ve miktarı belirtilmelidir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
SPERMOGRAM	Her gün	Semen,meni	2-4 gün cinsel perhiz gerekir	Yok	K: R:	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
SPESİFİK IgE BESLENME TARAMA (Fx 20)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

SPESİFİK IgE ler – Her biri Sp. IgE ağaç kar.Tx23 Sp. IgE BAL (RF247) Sp. IgE C1 Penisilol G Sp. IgE C2 Penisilol V Sp. IgE C203 Ampisilin Sp. IgE C204 Amoksisilin Sp. IgE C73 İnsülin (insan) Sp. IgE D1 Derm.Pteronyssinus Sp. IgE D2 Derm.Farinae Sp. IgE DP1 Mite (Akar) kar. Sp. IgE E1 Kedi tüyü-Epitali Sp. IgE E5 Köpek tüyü Sp. IgE Echinococcus (p2) Sp. IgE EP1 Hayvan tüyleri Sp. IgE EP71 Hayvan tüyleri Sp. IgE EP72 Hayvan tüyleri Sp. IgE Epital kar. TEx2 Sp. IgE F1 Yumurta akı Sp. IgE F105 Çikolata Sp. IgE F11 Karabuğday Sp. IgE F13 Yer Fıstığı Sp. IgE F14 Soya Fasülyesi Sp. IgE F17 Fındık Sp. IgE F2 İnek sütü	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
---	---------	-------	-----	-----	------------------------------------	-----------------------	-------------------------

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

Sp. IgE F204 Alabalık Sp. IgE F245 Yumurta Sp. IgE F25 Domates Sp. IgE F27 Kırmızı Et Sp. IgE F3 Balık (Morina) Sp. IgE F33 Portakal Sp. IgE F35 Patates Sp. IgE F360 Yoğurt Sp. IgE F4 Buğday Unu Sp. IgE F409 Keçi Sütü Sp. IgE F41 Somon Balığı Sp. IgE F44 Çilek Sp. IgE F45 Ekmek Mayası Sp. IgE F75 Yumurta Sarısı Sp. IgE F76 Alfa Laktalbumin Sp. IgE F77 Beta Laktoglobulin Sp. IgE F78 Kazein Sp. IgE F79 Gluten Sp. IgE F8 Mısır Sp. IgE F83 Tavuk Eti Sp. IgE F9 Pirinç Sp. IgE F92 Muz Sp. IgE F93 Kakao Sp. IgE I1 Bal Arısı Zehiri Sp. IgE I2 Eşek Arısı Zehiri Sp. IgE I1 Yaban Arısı Zehiri Sp. IgE I1 Sarıca Arı Zehiri Sp. IgE GP1 Çayır (Ot-Polen) Karışımı Sp. IgE GP2 Çayır (Ot-Polen) Karışımı Sp. IgE H2 EV Tozu Karışımı Sp. IgE HP1 EV Tozu Karışımı	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
--	---------	-------	-----	-----	------------------------------------	-----------------------	-------------------------

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

Sp. IgE I6 Hamamböceği Sp. IgE I71 Sivrisinek Sp. IgE K82 Latex Sp. IgE M1 Penicilium notatum Sp. IgE M2 Cladosporium Herbarum Sp. IgE M207 Aspergillus niger Sp. IgE M3 Aspergilus Sp. IgE M5 Candida Sp. IgE M6 Alternaria Alternata Sp. IgE MP1 Küf Karışımı Sp. IgE Polen Karışımı TWx3 Sp. IgE T11 Çınar Ağacı Sp. IgE T12 Söğüt Ağacı Sp. IgE Kavak Ağacı Sp. IgE T9 Zeytin Ağacı Sp. IgE TP1 Ağaç karışımı Sp. IgE TP5 Ağaç karışımı Sp. IgE TP7 Ağaç karışımı Sp. IgE WP1 Yabani Ot karışımı Sp. IgE WP3 Yabani Ot karışımı Sp. IgE Yatak Tüpleri Sp. IgE FP13 Sebze gıda karışımı Sp. IgE Gıda karışım (fp5)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
Sp. IgE FP1 Kuruyemiş Paneli Sp. IgE FP15 Meyve Paneli Sp. IgE FP3 Hububat Paneli Sp. IgE FP73 Gıda Et Paneli	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
SPESİFİK IgE SOLUNUM TARAMA (STx10)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
SPERM DNA HASARI VE GENETİK TARAMA	Her gün	Semen	Lab'a danışınız	3-7 gün arasında seksüel perhiz ve hastanın genel sağlığının iyi olduğu durumda örnek alınır.	*	*	25 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
SÜLFAT	Cuma (13.00)	24 h idrar	Yok	Yok		Soğuk zincir 2-8 C	3gün Sonra 18:00
T. PALLİDUM HEMAGLÜTİNASYON (TPHA)	Salı Cuma (09-00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
TAKROLİMUS (FK 506)	Pazartesi Çarşamba (13.00)	Edtalı tam kan	Yok	Hastanın son ilaç kullanma zamanı ve dozu belirtilmelidir.	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
TAM İDRAR TAHLİLİ (TİT)	Her gün	Spot idrar	Yok	Yok	K:Uygun kaba alınması R:Aşırı dilüe veya çok az numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
TAM KAN TAHLİLİ (HEMOGRAM)	Her gün	Tam kan	Yok	Yok	K:Uygun Seviye R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
TAŞ ANALİZİ (DİĞER)	Her gün	Materyal	Yok	Yok	K:Uygun numune R:	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
TAŞ ANALİZİ (ÜRİNER SİSTEM)	Her gün	Materyal	Yok	Yok	K:Uygun numune R:	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
TCA (TRIKLOR ASETİKASİT)	Pazartesi	Spot idrar	Yok	Yok	K:Uygun kaba alınması R:Aşırı dilüe veya çok az numune	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
TEOFİLİN (Aminocardol, Teokap)	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Hastanın son ilaç kullanma zamanı ve dozu belirtilmelidir	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
TESTOSTERON SERBEST	Çarşamba (09:00)	Serum	10-12 saat açlık	Sabah açlığı numunesi tercih edilir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
TESTOSTERON TOTAL	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Sabah açlığı numunesi tercih edilir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
TETANOZ IgG (Tetanoz İmmünite Kontrol)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	20 gün Sonra 18:00
TİROGLOBULİN	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Sabah açlığı numunesi tercih edilir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
TİROKSİN BAĞLAYICI GLOBULİN (TBG)	Pazartesi (13.00)	Serum	10-12 saat açlık	Sabah açlığı numunesi tercih edilir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	6 gün Sonra 18:00
TİTANYUM	Her gün	Serum (Laciver kapaklı tüp) - 1 mL (min 0.5 mL) Not: İdrar (Spot, 24 Saatlik) - 5 mL (min 2.5 mL)		Örnekler lacivert kapaklı tüpe alınmalıdır. Eğer uygun tüpe alınır ve saklanırsa eser element düzeyleri zamanla değişmez	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	6 gün Sonra 18:00
TOPİRAMAT (TOPAMAX)	Pazartesi Çarşamba (13.00)	Serum, kırmızı kapak (tercih edilir) - 1 mL (min 0.5 mL)			K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
TOTAL PROTEİN	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
TOTAL T3	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Sabah açlığı numunesi tercih edilir	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
TOTAL T4	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Sabah açlığı numunesi tercih edilir	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
TOXOPLAZMA IgG	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
TOXOPLAZMA IgG (Mikroelisa)	Salı Cuma (09:00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
TOXOPLAZMA IgG AVIDİTE	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması ve IgG testinin pozitif olması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
TOKSOPLAZMA PCR	Salı (13.00)	Bos, Edta'lı plazma	Yok	Yok		Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
TOXOPLAZMA IgM	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
TOXOPLAZMA IgM (Mikroelisa)	Salı Cuma (09:00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
TRAB (TSH RESEPTÖR ANTİKORU-TRAC)	Çarşamba (09:00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
TRANSFERRİN	Salı Perşembe (09:00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün sonra 18.00
TRİGLİSERİD	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
TRİCHOMONAS ARANMASI	Her gün	Kadın: vaginal smear, servikal smear, uretral smear, İdrar Erkek: üretral sekresyon, prostata sıvısı, İdrar	Yok	Yok	K:Steril kab R:Uygunsuz alım	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün sonra 18.00
TRİPTAZ	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	20 gün Sonra 18.00
TROMBİN ZAMANI	Çarşamba Cuma (13.00)	Sitratlı plazma	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18.00
Trombofili Paneli 4 Mutasyon MTHFR (A1298C), MTHFR (C677T), Faktör 2 (Protrombin), Faktör 5 Leiden	Her gün	Edta lı tam kan	Yok	EDTA'lı tüp / Oda sıcaklığı		Soğuk zincir 2-8 C	20 gün Sonra 18.00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
Trombofili Paneli 6 Mutasyon MTHFR (A1298C), MTHFR (C677T), Faktör2(Protrombin),F aktör 5 Leiden, Faktör 5 Cambridge, PAI	Her gün	Edta lı tam kan	Yok	EDTA'lı tüp / Oda sıcaklığı		Soğuk zincir 2-8 C	20 gün Sonra 18.00
TROPONİN I (Kaset tarama testi)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
TROPONİN I	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün (18.00)
TSH (TİROİD STİMÜLAN HORMON)	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Sabah açlığı numunesi tercih edilir	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
TSI (TİROİD STİMÜLEEDİCİ İMMÜN GLOBULİN)	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Sabah açlığı numunesi tercih edilir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
ÜÇLÜ TARAMA TESTİ (İkinci Trimester Tarama Testi)	Her gün	Serum	BPD ölçümünü içeren özel test formu mutlaka	Gebeliğin 15 hf+0 gün ile 20 hf+6 gün arasında kan alınmalıdır	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
ÜRE (BUN)	Her gün	Serum, 24 s idrar	Serum için, 10-12 saat açlık	İdrar için toplama süresi ve miktarı belirtilmelidir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
ÜREAPLASMA ÜREALYTİCUM KÜLTÜRÜ	Her gün	Üretral akıntı Semen, On idrar	Yok	Yok	K: Steril kab R: Uygunsuz alım	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
UREAPLASMA ÜREALYTICUN DNA	Pazartesi	Servikal, Üretral Swab, ön İdrar, semen - 2 mL	Yok	Yok	K: Steril kab R: Uygunsuz alım	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
ÜRİK ASİT (ÜRAT)	Her gün	Serum, 24 s idrar	10-12 saat açlık	Yok	K: Santrifüjlü numune R: Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
VAJİNAL KÜLTÜR	Her gün	Sürüntü numunesi	Yok	Yok	K: Steril swab R: Uygunsuz alım	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
VALPROİK ASİT (Depakin)	Her gün	Serum	Son 12 saatte ilacın alınmaması	Yok	K: Santrifüjlü numune R: Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
VDRL (RPR)	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Yok	K: Santrifüjlü numune R: Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
VİRAL ENSEFALİT PANELİ	Her gün	Bos	Yok	Yok	K: Uygun numune	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
VİTAMİN A (RETİNOL, VİT-A)	Cuma (13.00)	Serum	10-12 saat açlık	Son 24 saat içinde alkol kullanılmamalıdır	K: Santrifüjlü numune R: Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C Işıktan korunmalı	5 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
VİTAMİN B1 (TİAMİN)	Salı	Edtalı tam kan	10-12 saat açlık	Numune hemen dondurulmalıdır.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir <0 C Kuru buzda gönderilmelidir Işıktan korunmalı	7 gün Sonra 18:00
VİTAMİN B12	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Son 24 saat içinde alkol kullanılmamalıdır.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
VİTAMİN B2 (RİBOFLAVİN)	Salı	Edtalı tam kan	10-12 saat açlık	Numune hemen dondurulmalıdır.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir <0 C Kuru buzda gönderilmelidir Işıktan korunmalı	7 gün Sonra 18:00
VİTAMİN B6 (PİRİDOKSİN)	Salı	Edtalı Tam Kan	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir <0 C Işıktan korunmalı	7 gün Sonra 18:00
VİTAMİN C (ASKORBİK ASİT)	Salı (13.00)	Heparinli Plazma	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir Işıktan korunmalı	10 gün Sonra 18:00
VİTAMİN D3 (25-HİDROKSİKOLEKALS İFEROL)	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
VİTAMİN D3 (Aktif) (1,25-DİHİDROKSİKOLEKALSİFEROL)	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
VİTAMİN E (ALFA TOKOFEROL)	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir <0 C Işıktan korunmalı	22gün Sonra 18:00
VİTAMİN H (BİOTİN)	Cuma (13.00)	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir <0 C Işıktan korunmalı	6 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
VMA (VANİL MANDELİKASİT)	Pazartesi (13.00)	24 S idrar spot idrar	Yok	6 N HCL üzerine toplanmış idrar	K:Uygun idrar kabı R:Uygunsuz alım, beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
VONWİLLEBRAND FAKTÖRAKTİVİTESİ	Perşembe (13.00)	Sitratlı plazma	Yok	Numune hemen ayrılmalıdır	K:Santrifüjlü numune R:Pıhtı,Hemoliz, uygunsuz antikoagülan	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
VONWİLLEBRAND FAKTÖRANTİJENİ	Perşembe (13.00)	Sitratlı plazma	Yok	Numune hemen ayrılmalıdır	K:Santrifüjlü numune R:Pıhtı,Hemoliz, uygunsuz antikoagülan	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
VZV IGG (VARİCELLA ZOSTER IGG)	Pazartesi Çarşamba (13.00)	Serum BOS	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
VZV IGM (VARİCELLA ZOSTER IGM)	Pazartesi Çarşamba (13.00)	Serum BOS	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
YARAKÜLTÜRÜ	Her gün	Sürüntü numunesi	Yok	Yok	K:Steril swab R:Uygunsuz alım	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
YENİDOĞAN METABOLİK TARAMA	Her gün	Topuktan emdirilmiş kan	Doğumun 24 saat sonrasında numune alınmalıdır	En az bir kere anne sütü veya mama gibi proteinli besinle beslenmiş olmalıdır	K:Uygun numune R:Özel kağıda emdirilmemiş numune	Uygun transfer	12 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
Y KROMOZOMU MİKRODELESYON ANALIZİ	Her gün	Edta'lı tam kan		Genetik test çalışılacak hiçbir materyal dondurulmamalıdır. Aynı örnek genetik test çalışması öncesinde başka bir analize alınmamalıdır			12 gün Sonra 18:00
ABORTUS	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
ADRENAL (SÜRRENAL), REZEKSİYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
AĞIZ MUKOZASI/GİNGİVA BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
AKCİĞER, KAMA BİOPSİSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
AKCİĞER, TOTAL/LOB/SEGMENT REZEKSİYONU	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
AKCİĞER, TRANSBRONŞİYAL BİOPSİSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
ANEVRİZMA, ARTERYAL/VENTRİKÜLE	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonar
ANÜS, POLİPOİD GELİŞME (TAG)	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
APENDİKS İNSİDENTAL (ASIL AMELİYATA EK)	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
APENDİKS İNSİDENTAL DIŞINDA	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
ABSE MATERYALİ	Her gün	Biopsi/ Sitoloji	Yok	Yok	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	8 gün sonra
ARTER, ATEROM PLAĞI	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
ARTER, BİOPSİSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
BARTHOLİN BEZİ KİSTİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
BEYİN MENİNGSLER, TÜMÖR REZEKSİYONU	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
BEYİN, BİOPSİSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
BEYİN/MENİNGSLER, TÜMÖR REZEKSİYONU	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
BÖBREK, BİOPSİ İĞNE	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
BÖBREK, PARSİYEL /TOTAL NEFREKTOMİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
BRONKUS, BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
BURSA/SYNOVİAL KİST	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
BURUN MUKOZASI, BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
BURUN SİNÜS POLİPLERİ İNFLAMMATUAR	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
DALAK	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
DERİ, EKSIZYONEL BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
DERİ, PUNCH/İNSIZYONEL/SHAVE	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
DİL, BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
DİL/TONSİL-TÜMÖR İÇEREN REZEKSİYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
DİŞ/ODONTOJENİK KİST	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
DİVERTİKÜL- ÖZOFAGUS/İNCE BARSAK	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
DOKU ÖRNEĞİNİN BLOK HALİNE GETİRİLMESİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
DUDAK, BİOPSİ/WEDGE(KAMA) REZEKSİYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
DUODENUM, BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
DUPUYTREN KONTRAKTÜRÜ DOKUSU	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
EKLEM, GEVŞEK CİSİM	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
EKLEM, REZEKSİYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
EKSTREMİTE, AMPUTASYON, TRAVMA	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞM ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
EKSTREMİTE, DİSARTİKÜLASYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
ENDOMETRİUM, KÜRETAJ/BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
ENDOSERVİKS, KÜRETAJ/BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
FEMUR BAŞI, KIRIK	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
FEMUR BAŞI, KIRIK DIŞINDA	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
FETUS, DİSEKSİYONLA İNCELEME	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
FİSSÜR/FİSTÜL	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
GANGLİON KİSTİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
GÖZ, EKSENTRASYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
GÖZ, ENÜKLEASYON/ EVİSSERASYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
HAZIR BOYALI PREPARAT VEYA PARAFİN BLOK	Her gün	Konsültasyon	Yok	Yok	Yok	Yok	10 gün sonra
HEMATOM	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
HEMOROİDLER	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
HERNİ KESESİ, HERHANGİ BİR BÖLGEDE	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
HİDROSEL KESESİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
HİPOFİZ TÜMÖRÜ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
HİSTOKİMYASAL BOYAMALAR	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
İMMÜNHİSTOKİMYASAL İNCELEME	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
İNCE BARSAK, BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
İNCE BARSAK, REZEKSİYON, TÜMÖR	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
İNCE BARSAK, TÜMÖR İÇİN REZEKSİYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
İNCE İĞNE ASPİRASYONU DEĞERLENDİRİLMESİ	Her gün	Sitoloji	Yok	Yok	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	8 gün sonra
İNCE İĞNE ASPİRASYONU GÖNDERİLMESİ YAYMA PREPARATLARI	Her gün	Sitoloji	Yok	Yok	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	8 gün sonra
İNTERVERTEBRAL DİSK	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
KALP KAPAKÇIĞI	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
KARACİĞER, BİOPSİ İĞNE/WEDGE	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
KARACİĞER, KISMİ REZEKSİYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
KARPEL TÜNEL DOKUSU	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
KAS, BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
KEMİK-BİOPSİ/KÜRETAJ MATERYALİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
KEMİK FRAGMANLARI, PATOLOJİK KIRIK	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
KEMİK FRAGMENTLERİ,PATOLOJİK KIRIK DIŞI	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
KEMİK İLİĞİ BİOPSİSİ, PATOLOJİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
KEMİK, EKZOSİTOZ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
KEMİK, REZEKSİYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
KESİT GÖRÜNTÜLERİNİN BASILMASI	Her gün	Biopsi	Yok	Yok	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
KIKIRDAK, SHAVİNG	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
KOLESTEATOMA	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
KOLON, BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
KOLON, BİOPSİ ÇOKLU LOKALİZASYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
KOLON, KOLOSTOMİ STOMASI	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
KOLON, SEGMENTAL REZEKSİYON, TÜMÖR DIŞI	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
KOLON, TOTAL REZEKSİYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
KOLON, TÜMÖR İÇİN SEGMENTAL REZEKSİYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞM ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
KONJONKTİVA, BİOPSI / PTERYGIUM	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
KORNEA	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
LARİNKS, BİOPSI	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
LARİNKS, PARSİYEL/TOTAL+BOYU	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
LARİNKS, PARSİYEL/TOTAL REZEKSİYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
LENF DÜĞÜMLERİ, REGIONAL REZEKSİYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
LENF DÜĞÜMÜ, BİOPSI	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
MANDİBULEKTOMİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
MEDİASTEN, KİTLE	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞM ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
MEME, BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
MEME, MASTEKTOMİ-PARSİYEL BASİT	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
MEME, MASTEKTOMİ + AKSİLLA LENF NODLARI	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
MEME/REDÜKSİYON MAMMOPLASTİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
MENİSKÜS	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
MESANE, PARSİYEL/TOTAL REZEKSİYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
MESANE, TUR	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
MİDE, BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
MİDE, SUBTOTAL/TOTAL REZEKSİYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
MİDE, TÜMÖR İÇİN SUBTOTAL/TOTAL REZEKSİYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
MUKOSEL, TÜKRÜK	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
MYOKARD, BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
MYOM(LAR), MYOMEKTOMİ, UTERUS HARIÇ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
NAZOFARİNKS/OROFARİNKS, BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
NÖROMA-MORTON/TRAVMATİK	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
ODONTOJENİK TÜMÖR	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞM ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
OMENTUM, BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
OTOPSİ, FETUS	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
OTOPSİ, TIBBİ AMAÇLI	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
OVER(+/- TUBA), NEOPLASTİK DEĞİL	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
OVER(+/- TUBA) NEOPLASTİK	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
OVER, BİOPSİ/WEDGE (KAMA) REZEKSİYONU	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
ÖZOFAGUS, BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
ÖZOFAGUS, PARSİYEL/TOTAL REZEKSİYONU	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
PANKREAS, BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
PANKREAS, TOTAL/SUBTOTAL REZEKSİYONU	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
PAP SMEAR	Her gün	Sitoloji (Konvansiyonel)	Yok	Yok	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	8 gün sonra
PARATİROİD BEZİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
PARATUBAL KİSTLER (MORGAGNİ HİDATİ)	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
PARMAK EL/AYAK, AMPUTASYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
PARMAKLAR EL/AYAK, AMPUTASYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
PERİTON, BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞM ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
PİLONİDAL KİST/SİNÜS	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
PLASENTA	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
PLEVRA/PERİKARD-BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
POLİP, KOLOREKTAL	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
POLİP, MİDE/İNCE BARSAK	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
POLİP, SERVİKAL/ENDOMETRİAL	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
PROSTAT, İĞNE BİOPSİSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
PROSTAT, RADİKAL REZEKSİYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
PROSTAT, RADİKAL REZEKSİYON DIŞINDA	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
PROSTAT, TUR	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
SAFRA KESESİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
SERVİKS, BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
SERVİKS, KONİZASYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
SEMPATİK GANGLİON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
SIVI BAZLI SİTOLOJİ MANUEL	Her gün	Sitoloji (Sıvı Bazlı)	Santrifüj	Yok	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	8 gün sonra
SIVI BAZLI SİTOLOJİ OTOMATİK	Her gün	Sitoloji (Sıvı Bazlı)	Yok	Yok	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	8 gün sonra
SİNİR, VAGOTOMİ VE BENZERİ GİRİŞİM	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
SİNÜS, PARANASAL BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
SPERMATOSEL	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
SÜNNET DERİSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
SYNOVİUM	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
TAHNİT	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
TENDON/TENDON KILIFI, TÜMÖR DIŞI	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
TESTİKÜLER APENDİKS	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
TESTİS, BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
TESTİS, KASTRASYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
TESTİS, TÜMÖR	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
TESTİS, TÜMÖR/BİOPSİ/KASTRASYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
TİMÜS, TÜMÖR	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
TİROGLOSSAL KANAL/BRANKİAL YARIK	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
TİROİD, TOTAL/LOBEKTOMİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
TONSİL VE/VEYA ADENOİDLER	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
TRAKEA, BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
TROMBÜS VEYA EMBOLUS	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
TUBA UTERİNA, BİOPSİ VE STERİLİZASYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
TUBA UTERİNA, EKTOPIK GEBELİK	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
TÜKRÜK BEZİ /TÜMÖR DAHİL)	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
TÜKRÜK BEZİ, BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
UTERUS, (+/- ADENKSLER), TM VE PROLAPSUS HARIÇ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
UTERUS, NEOPLASTİK (+/- TUBALAR)	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
UTERUS, PROLAPSUS İÇİN (+/- TUBALAR)	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
ÜRETER, BİOPSI	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
ÜRETER, REZEKSİYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
ÜRETRA, BİOPSI	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
VAJİNA, BİOPSI	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
VARİKOSEL	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
VAS DEFERENS	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
VEN, VARİS	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
VULVA, TOTAL/SUBTOTAL REZEKSİYONU	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI	ÇALIŞM ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
VULVA/LABİA, BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
VÜCUT SIVILARI VE EKSFOLİYATİF SİTOLOJİ	Her gün	Sitoloji	Santrifüj	Yok	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	8 gün sonra
YUMUŞAK DOKU BASİT EKSIZYON, LİPOM	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
YUMUŞAK DOKU LİPOM EKSIZYONU VE BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
YUMUŞAK DOKU TÜMÖRÜ, GENİŞ REZEKSİYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
YUMUŞAK DOKU, DEBRİDMAN	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

TEST ADI

ÇALIŞM
ZAMANI

NUMUNE
TÜRÜ

ÖN HAZIRLIK
GEREKSİNİMİ

NUMUNE ALIM
KURALLARI

KABUL(K)-RET (R)
KRİTERLERİ

TRANSFER
ŞARTLARI

SONUÇ
ZAMANI

COVID 19 TESTLERİ

TEST ADI	ÇALIŞM ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
COVID-19 IGM(ELİSA) COVID-19 IGG(ELİSA)	Pazartesi Perşembe (12.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18.00
(COVID) Anti-SARS-CoV-2 (S) Antikor (ECLIA)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
(COVID) SARS-CoV-2 IgM (ECLIA) SARS-CoV-2 IgG (ECLIA)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18.00
(COVID) Anti-SARS-CoV-2 TOTAL Antikor (ECLIA)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18.00
(COVID PCR) SARS-CoV-2 RNA (PCR)	Hafta içi 16.00 'a kadar gelen Cumartesi 12.00'a kadar	Burun, Bogaz sürüntü	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18.30

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

ÖNEMLİ AÇIKLAMA:

- * ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ YA DA NUMUNE ALIM KURALLARINDA ;***Danışınız** KODU BULUNAN TESTLER ÖZEL HAZIRLIK YADA ALIM KURALLARI GEREKTİRMEKTEDİR. LÜTFEN ÖNCEDEN LABORATUVARIMIZA DANIŞINIZ.
- * SADECE SONUÇ ZAMANI '**AYNI GÜN**' OLAN TESTLER **ACİL KAPSAMINDADIR VE ACİL OLARAK** ÇALIŞILMASI MÜMKÜNDÜR.
- * ACİL TESTLER GEREKİRSE DİĞER TESTLER YARIDA KESİLEREK ÇALIŞILIR VE LABORATUVAR KABUL SAATİNDEN SONRA * EN KISA SÜRE İÇİNDE SONUÇLANDIRILIR. ;*Teste göre değişiklik gösterebilir, danışınız.
- * ACİL TESTLERDE TEST TEKRARI YAPILMAZ. DİĞER HASTALARIMIZIN DA HAKKINI KORUMAK ADINA LÜTFEN KESİN GEREKLİ OLMADIĞA ACİL SEÇENEĞİNİ KULLANMAYINIZ.
- * DİĞER TESTLERDEN **SONUÇ ZAMANI AYNI GÜN OLANLARDAN** KABUL SAATİ 12.00 YE KADAR OLANLAR, SAAT 18:30 KADAR RAPORLANDIRILIR. ÖĞLEDEN SONRAJ KABULÜ YAPILANLAR İSE ERTESİ GÜN RAPORLANDIRILIR.
- * NUMUNE KABULÜ HAFTA İÇİ SAAT 18:00 A KADAR, CUMARTESİ GÜNÜ İSE SAAT 15:00 'A KADARDIR. BU SAATLERDEN SONRA LABORATUVARA ULAŞAN NUMUNELER ÇALIŞMAYA ALINMAYIP BİR SONRAKİ ÇALIŞMAYA KALACAKTIR.

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 03 MAYIS 2021)

* TESTLERİN REFERANS ARALIKLARI HASTAYA AİT BİLGİLER İLE ;YAŞ, CİNSİYET, İLAÇ ALIMI VB. İLE DOĞRUDAN İLİŞKİLİDİR. BU YÜZDEN HASTA BİLGİLERİNİN EKSİKSİZ OLARAK BİLDİRİLMESİNE ÖZEN GÖSTERİNİZ.

* KARANTİNA DÖNEMİNDE AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİMİZDE DEĞİŞİKLİK OLABİLİR GELMEDEN ÖNCE LABORATUVARA DANIŞINIZ.

* **REHBERDE BULUNMAYAN TESTLER İÇİN LÜTFEN LABORATUVARDAN BİLGİ ALINIZ.**
(TELEFON: 0 232 422 13 23-0 232 422 13 02)

TEST DANIŞMA VE FİYAT BİLGİSİ DAHİLİ NUMARALARI: 118 -112 VE 0 DIR.