

*Aşağıdaki tabloda belirtilen 17 test TS EN ISO 15189 standartına göre TÜRKAK tarafından akredite edilen testlerdir.
Testlerin başındaki (*) işareti Akredite test olduğunu göstermektedir.*

	TEST ADI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI / NUMUNE HACMİ	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
1	*GLUKOZ	SERUM	Yok	Yok (5-10 ml)	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,Lipemi	2-8°C	Aynı Gün
2	*ÜRE	SERUM	Yok	Yok (5-10 ml)	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,Lipemi	2-8°C	Aynı Gün
3	*KREATİNİN	SERUM	Yok	Yok (5-10 ml)	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,Lipemi	2-8°C	Aynı Gün
4	*ÜRİK ASİT	SERUM	Yok	Yok (5-10 ml)	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,Lipemi	2-8°C	Aynı Gün
5	*AST	SERUM	Yok	Yok (5-10 ml)	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,Lipemi	2-8°C	Aynı Gün
6	*ALT	SERUM	Yok	Yok (5-10 ml)	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,Lipemi	2-8°C	Aynı Gün
7	*GGT	SERUM	Yok	Yok (5-10 ml)	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,Lipemi	2-8°C	Aynı Gün
8	*AMİLAZ	SERUM	Yok	Yok (5-10 ml)	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,Lipemi	2-8°C	Aynı Gün
9	*TOTAL PROTEİN	SERUM	Yok	Yok (5-10 ml)	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,Lipemi	2-8°C	Aynı Gün
10	*ALBUMİN	SERUM	Yok	Yok (5-10 ml)	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,Lipemi	2-8°C	Aynı Gün
11	*TOTAL KOLESTEROL	SERUM	Yok	Yok (5-10 ml)	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,Lipemi	2-8°C	Aynı Gün

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	2/106

12	*HDL KOLESTEROL	SERUM	Yok	Yok (5-10 ml)	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,Lipemi	2-8°C	Aynı Gün
13	*TRİGLİSERİD	SERUM	Yok	Yok (5-10 ml)	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,Lipemi	2-8°C	Aynı Gün
14	*TOTAL KALSİYUM	SERUM	Yok	Yok (5-10 ml)	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,Lipemi	2-8°C	Aynı Gün
15	*FOSFOR	SERUM	Yok	Yok (5-10 ml)	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,Lipemi	2-8°C	Aynı Gün
16	*SERBEST T4	SERUM	Yok	Yok (5-10 ml)	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,Lipemi	2-8°C	Aynı Gün
17	*TSH	SERUM	Yok	Yok (5-10 ml)	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,Lipemi	2-8°C	Aynı Gün
18	*CK(CPK)	SERUM	Yok	Yok (5-10 ml)	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,Lipemi	2-8°C	Aynı Gün
19	*LDH	SERUM	Yok	Yok (5-10 ml)	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,Lipemi	2-8°C	Aynı Gün
20	*MAGNEZYUM	SERUM	Yok	Yok (5-10 ml)	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,Lipemi	2-8°C	Aynı Gün
21	*FERRİTİN	SERUM	Yok	Yok (5-10 ml)	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,Lipemi	2-8°C	Aynı Gün
22	* FSH	SERUM	Yok	Yok (5-10 ml)	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,Lipemi	2-8°C	Aynı Gün
23	*T.PSA	SERUM	Yok	Yok (5-10 ml)	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,Lipemi	2-8°C	Aynı Gün
24	*Total Testosteron	SERUM	Yok	Yok (5-10 ml)	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,Lipemi	2-8°C	Aynı Gün
25	*Vitamin B12	SERUM	Yok	Yok (5-10 ml)	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,Lipemi	2-8°C	Aynı Gün

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	3/106

TEST ADI	ENTEGRASYON KODU	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
11-DEOKSİKORTİZOL	17166	Pazartesi	Serum	Lab'a danışınız.	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,Lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	12 gün Sonra 18.00
17-HİDROKSİ PROGESTERON	10230	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,Lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18.30
17-KETOSTEROİD	17225(SPOT) 9220(24S)	Her gün (13.00)	Spot idrar 24 S idrar	6 N HCL üzerine toplanmış idrar	Asetik ya da borik asit de	K:Uygun alım R:Soğuk ortamda gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	12 gün sonra
5-HİDROKSİ İNDOL ASETİK ASİT (5-HIAA)	17110(SPOT) 9230(24S)	Her gün (13.00)	Spot idrar 24 S idrar	6 N HCL üzerine toplanmış idrar	Son 72 saatte özel diyet kısıtlamas	K:Uygun alım R:Soğuk ortamda gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	12 gün Sonra
5-HİDROKSİTRİPTAMİN (SEROTONİN)	16277(24S)	çarşamba Cuma (13.00)	24 S idrar	6 N HCL üzerine toplanmış idrar	Son 72 saatte özel diyet kısıtlamas	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,Lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün Sonra 18:00
5-HİDROKSİTRİPTAMİN (SEROTONİN)	10190(SERUM)	Cuma (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,Lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün sonra 18.30
5'-NÜKLEOTİDAZ (5'-NT)	8700	salı (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Soğuk ortamda gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
ABSE KÜLTÜRÜ	6010	Her gün	Materyal	Yok	Yok	K:Steril kap R:Uygunsuz alım	Özel transport besiyeri ile	3 gün Sonra 12:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	4/106

ACE (ANGİOTENSİN KONVERTİNG ENZİM)	8010	Her gün	Serum veya Heparinli Plazma, Bos	12 saat önceden ACE inhibitörü alımı kesilmelidir	Yok	K:Santrifüjlü numune hemen ayrılmalı R:Hemoliz ,Lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18.00
ACTH (ADRENOKORTİKOT ROİK HORMON)	10240	Her gün	Edtalı Plazma	06:00-08:00 arası yüksek Numune zamanı ayarlanmalı	Yok	K:Santrifüjlü numune hemen ayrılmalı R:Hemoliz ,Lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
ADA (ADENOZİN DEAMİNAZ)	17301(VUCUT SIVISI) 12260(SERUM)	Her gün	Serum, Vucut sıvısı	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,Lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18.00
ADACIK HÜCRE ANTİKORU (ISLET CELL ANTİKORU-	12250	Salı (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,Lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18.00
ADENOVİRUS ANTİJENİ	15540	Her gün	Gaita	Yok	Yok	K:Uygun alım R:Soğuk ortamda gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
ADH(ANTİDİURETİK HORMON)	8710(EDTA PLAZMA) 16658(24S)	Salı (13.00)	Edtalı Plazma/24 S idrar asitsiz	6 Saatlik açlık ve susuzluk	Numune alındıktan sonra plazma hemen	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,Lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün sonra 18.00
AFP (ALFAPETOPROTEİN)	4010	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
AKTİVE PROTEİN C REZİSTANSI	11010	Pazartesi (13.00)	Sitrathı plazma	Yok	Numune alındıktan sonra plazma	K:Uygun Seviye R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
ALA	16879	Her gün	Spot idrar	Yok	Yok	K:Uygun alım R:Soğuk ortamda gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	5/106

ALBUMİN	1100	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
ALDOLAZ	8020	Cuma (13.00)	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
ALDOSTERON	10010	Her gün	Serum	Son 2 saat aynı pozisyonda durmali (*D*)	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
ALEX TESTİ	*LABA DANIŞIN	Perşembe	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
ALFA-1 ANTİTRİPSİN	8030	Çarşamba (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18.00
ALFA-2 MAKROGLOBULİN	17459	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,Lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
ALKOL (ETANOL)	16909	Her gün	2 adet eş zamanlı Serum numunesi	Yok	Numune ile birlikte alkol testi formunun gönderilmesi	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18.00
ALP (ALKALEN FOSFATAZ)	1080	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
ALP İZOENZİMLERİ	8060	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,Lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	4 Hafta Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	6/106

ALP (KEMİĞE SPESİFİK)	17472	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün Sonra 18:00
ALT (SGPT)	1060	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,Lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
ALÜMİNYUM	16734(SERUM) 17242(24S) 16697(SPOT İDRAR)	Her gün	Serum/Spot idrar, 24 S idrar	Son 24 saatte AL içeren antiasit kullanılmamalı	*Danışınız	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,Lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün Sonra
AMİLAZ	1110(SERUM) 1820(SPOT İDRAR)	Her gün	Serum/idrar	Serum için, 10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
AMİLAZ PANKREATİK	1120	Her gün	Serum	Serum için, 10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
AMİP ANTİJENİ	15490	Her gün	Gaita	Yok	Yok	K:Uygun kaba alım		Aynı gün
AMİP ANTİKORU	17298	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	3 hafta Sonra 18:00
AMİNOASİTLER	16287(SERUM) 16577(HEPARİN PLAZMA) 16288(İDRAR)	Her gün (13.00)	Heparin plazma, idrar, Serum, Bos	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,pıhtı, idrar için dondurulma	Soğuk zincir 2-8 C	12 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	7/106

AMONYAK	8900	Her gün	LABA DANIŞINIZ	Yok	Numune hemen ayrılmalı	K:Santrifüjlü ve dondurulmuş numune R:Hemoliz,sıcak ortam	Soğuk zincir Kuru buz	3 gün Sonra 18:00
AMA (IFA)	12140	Cuma (09.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R: Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün (18.00)
AMA M-2	12400	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R: Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
ANA(İFA)	12010	Çarşamba Cuma (09:00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R: Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün (18.00)
ANCA TARAMA ANCA (c-ANCA) ANCA (p-ANCA)	12490 (c-ANCA) 12620(p-ANCA)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R: Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	6 gün Sonra 18:00
ANCA (c-ANCA) (PR3ANCA) ANCA (p-ANCA) (ANTİ MPO)	12490 (c-ANCA) 12620(p-ANCA)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R: Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	6gün Sonra 18:00
ANDROSTENE DİON	10020	Her gün	Serum	Diurnal varyasyon vardır	Sabah 06:00- 08:00 arası numune alınmalıdır.	K:Santrifüjlü numune R: Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	8/106

ANGİOTENSİN II	16273	Her gün	Edtalı plazma	Numune yatar pozisayonda alınmalıdır.	Plazma ayrılmış ve donmuş olarak gönderilmelidir.	K:Santrifüjlü numune R: Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	30 gün sonra 18:00
ANTİ HBc IgG	2360	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18.00
ANTİ HBc IgM	5110	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18.00
ANTİ HBe	16633	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00
ANTİ HBs	5150	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
ANTİ RİBOZOMAL P PROTEİNİ	17084	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
ANTİ CCP (CYCLIC CITRULLINAT ED PEPTİD Ab)	12150	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün
ANTİ FAKTÖR Xa	11030	Çarşamba (13.00)	Sitratlı Plazma	Yok	Yok	K:Uygun seviye R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
ANTİ HCV	5170	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	9/106

ANTİ HCV (Mikroelisa)	5180	PAZARTESİ ÇARŞAMBA CUMA (09:30)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
ANTİ HCV DOĞRULAMA (Western blot)	15020	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	30 gün sonar
ANTİ-Ds DNA (IFA)	12100	Cuma (09:00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
ANTİ-DÜZ KAS ANTİKOR (ASMA)	12120	Cuma (09:00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
ANTİ- ENDOMİSYUM IGA (EMA)	17175	Çarşamba Cuma (09:00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
ANTİ- ENDOMİSYUM IGG(EMA)	16540	Salı (09.00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün Sonra 18:00
ANTİ-FOSFOLİPİD İGG	12330	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
ANTİ-FOSFOLİPİD İGM	12340	Salı (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
ANTİ FOSFOLİPAZ A2 RESEPTÖR	17108	Laba Danışın	*	*	*	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	*

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	10/106

ANTİ-GAD	12350	Her gün (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
ANTİ- GMB	17025	salı (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
ANTİ-GLİADİN IGA	16882	Perşembe (09:00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
ANTİ-GLİADİN IGG	16883	Perşembe (09:00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
ANTİ-HAV IgM	5050	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C p	Aynı gün
ANTİ-HAV Total	5070	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
ANTİ-HEPATİTE (HEV)	15040	Perşembe (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
ANTİ HİSTON ANTİKOR	16989	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	6 gün sonra 18:00
ANTİ-İNSÜLİN ANTİKOR	12380	Her gün (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	12 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	11/106

ANTI-JO-1 (Elisa)	12070	Laba Danışın	*	*	*	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	6 gün sonra 18:00
ANTİKARDİYOLİPİN (ACA IGG)	12170	Perşembe (09:00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,Lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
ANTİKARDİYOLİPİN (ACA IGM)	12160	Perşembe (09:00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,Lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
ANTI-MÜLLERİAN HORMON (AMH)	16323	Her gün	Serum	Yok	Tercihen adetin 2. ve 3.	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
ANTI OVER ANTİKORU	16919	Her gün (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	21 gün Sonra 18:00
ANTI-PARİETAL HÜCREANTİKORU (APCA)	12410	Cuma (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün sonra 18:00
Anti RNP 70	16714	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	6 gün sonra 18:00
ANTI-SCL 70 (Elisa)	16857	Her gün (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	6 gün Sonra 18:00
ANTI-SENTROMER ANTİKOR	12090	Her gün (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
ANTI-SLA	16695	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	12/106

ANTİ SKİN ANTİKOR	16878	Her gün (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	16 gün Sonra 18:00
ANTİ-SPERM ANTİKOR (ASA) (IgM- IgG)	16774(IgG) 16775(IgM)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
ANTİ-SM (IB)	17288	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	6 gün Sonra 18:00
ANTİ-SS-A (ANTİ-RO) ANTİ-SS-B (ANTİ-LA)	12020 (ANTİ-RO) 12030 (ANTİ-LA)	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	6 gün Sonra 18:00
ANTİ-MOG IgG	17091	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	12 gün Sonra 18:00
ANTİ-TG (ANTİ-T) (Anti Tiroglobulin)	4020	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
ANTİ-TPO (ANTİ-M) (Tiroid Peroksidaz Ab.)	4030	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
ANTİ-TROMBİN III AKTİVİTESİ	11040	salı (13.00)	Sitratlı plazma	Yok	Numune hemen ayrılmalıdır	K:Uygun seviye R:Hemoliz, Lipemi, pıhtı	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
ANTİ-TROMBİN III ANTİJENİ	16773	Çarşamba (13.00)	Sitratlı plazma	Yok	Numune hemen ayrılmalıdır	K:Uygun seviye R:Hemoliz, Lipemi, pıhtı	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	13/106

ANTİ-TROMBOSİT ANTİKORU	16631	Her gün	Sitratlı tam kan	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, Lipemi, pıhtı	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
APOLİPOPROTEİNA	8070	Her gün	Serum	8-10 saatlik sabah açlığı son 24 saat egzersiz	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
APOLİPOPROTEİN B	17083	Her gün	Serum	8-10 saatlik sabah açlığı son 24 saat egzersiz	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
APC REZİSTANSI	11010	Pazartesi (13.00)	Sitratlı Plazma	Yok	Numune hemen Ayrılmalıdır.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter.pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
APTT	3250	Her gün	Sitratlı Plazma	Heparin kullanımından önce kan alınmalıdır	Heparin uygulanan koldan kan alınmamalıdır	K:Uygun Seviye R:Pıhtılı, hemolizli numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
ARB ARANMASI (TBC BASİLİ)	6230	Her gün	Balgam İdrar Mayi	Yok	Yok	K:Uygun numune kabı R:Tükrük numunesi	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00
ARİL SÜLFATAZ A	16572	Cuma (13.00)	Edtalı tam kan	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	16 gün Sonra
ARSENİK	16847(TAM KAN) 16642(24S) 17193(SPOT	Her gün	24 S İdrar, Spot idrar, Tam kan	6 N HCL,borik ya da asetik a. üzerine toplanmış idrar	Yok	K:Uygun numune kabı R:Uygunsuz toplama	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra (18.00)

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	14/106

ASA IgM	16775(IGM SERUM)	Her gün	Serum, Semen, akıntı	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması,Semen akıntı için steril kap R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra
ASA IgG	16774(IGG)							
ASCA IGA (Antisaccharomyces cerevisiae)	12460	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra
ASCA IGG (Antisaccharomyces cerevisiae)	12470	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra
ASETİLKOLİN RESEPTÖR ANTİKORU	12480	Çarşamba (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra
ASETİLKOLİNESTERAZ	9390	Perşembe (13.00)	Lab'a danışın	Lab'a danışın	Lab'a danışın	Lab'a danışın	Lab'a danışın	17 gün Sonra 18:00
ASİT FOSFATAZ (Total-Prostatik)	8090	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
ASO (ANTİSTREPTOLİZİN O) TURBİDİMETRİK	1130	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
AST (SGOT)	1070	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,Lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
AQUAPORIN-4 (NEUROMYELITIS OPTICA IGG) NMO	17019	Çarşamba (13.00)	Serum Bos	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:30

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	15/106

BAKIR (Cu)	8100	Cuma (12.00)	Serum,	Serum için, 10-12 saat açlık ,	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:30
BAKIR (Cu)	9050	Cuma (12.00)	24S idrar	Yok	İdrar asitsiz olmalıdır.	K: İdrar kabı R:Uygunsuz numune toplama	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün Sonra 18:00
BAKIR (Cu) (ERİTROSİT İÇİ)	17446	Her gün	Heparinli Tam kan	Yok	Yok	K:Uygun Seviye R:Pıhtılı, hemolizli numune	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
BALGAM KÜLTÜRÜ	6020	Her gün	Balgam	Yok	Yok	K:Steril Kap R:Tükrük numunesi kabul edilmez	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
BENCE-JONES PROTEİNİ	16745(SPOT İDRAR) 9060(24S)	Her gün	Spot idrar 24 S idrar	Yok	Yok	K: Steril Kap R:Uygunsuz numune toplama	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün Sonra
BETA-CROSSLAPS (BETA-CTX)	16770	Perşembe (13.00)	Edtalı plazma (tercih edilir), Serum	Kan alımının sabah açlığını takiben alınması önerilir. Bu testin 12 saat öncesinde biotin veya vitamin B7 içeren multivitamin veya diyet destek ürünleri alınmamalıdır. Serum β-CTX konsantrasyonu bir ölçüye kadar günlük ritme bağlı olduğundan, uzun sürelili incelemelerde numuneler her zaman başlangıç numunesi ile aynı koşullarda alınmalıdır.	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	16/106

BETA HCG (B-HCG)	4040	Her gün	Serum, idrar	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
BETA-2 GLİKOPROTEİN I IGA	16778	Her gün (13.00)	serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	12 gün Sonra (18.00)
BETA-2 GLİKOPROTEİN I IGG	16666	Her gün (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	12 gün Sonra (18.00)
BETA-2 GLİKOPROTEİN I IGM	17441	Her gün (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	12 gün Sonra (18.00)
BETA-2 MİKROGLOBULİN	10030(SERUM) 16703(24S) 17208(SPOT İDRAR)	Çarşamba Cuma (13.00)	Serum 24 S idrar Spot idrar amniyon mayii	Yok	Bos için jelsiz düz tüp	K:Uygun kaba alım R:Düşük idrar Ph sı	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
BETA-2 TRANSFERRİN	16679	Her gün	Burun ve kulak akıntısı + Serum	Sıvı taze ve akışkan olmalı mümkünse kanlı olmamalı soğuk ortamda saklanmalı ve	Tüm numuneler jelsiz düz tüpe alınmalıdır	K:Uygun kaba alım R:Aşırı kanlı, mukuslu numune	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
BİKARBONAT (HCO3)	1140	Her gün	Serum, plazma	10-12 saat açlık	Numune direkt ışıktan korunmalıdır	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	17/106

BİLİRUBİN İNDİREKT	1260	Her gün	Serum	10-12 saat açlık İNDİREKT BİLİRUBİN testi için toltal bilirubin ve direkt bilirubin beraber çalışılmalıdır.	Numune direkt ışıktan korunmalıdır	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
BİLİRUBİN NEONATAL	1570	Her gün	Kapiller kan	Hastanın bir aylıktan küçük olması tercih edilir.	Numune direkt ışıktan korunmalıdır	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
BİLİRUBİN TOTAL	1460	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Numune direkt ışıktan korunmalıdır	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
BİLİRUBİN DİREKT	1200	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Numune direkt ışıktan korunmalıdır	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
BIOTİNİDAZ AKTİVİTESİ	8120	Her gün	Serum	Yok	Hemen santrifüj ve dondurma işlemi	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir Kuru buz	15 gün Sonra 18:00
BNP (BRAIN NATRIÜRETİK PEPTİD)	1540	Her gün	Edtalı plazma	Yok	Numunenin hemen santrifüjü gerekir	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, Lipemi, uzun bekleme	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
BOĞAZ KÜLTÜRÜ	6030	Her gün	Sürüntü numunesi	Yok	Yok	K:Steril swab R:Uygunsuz alım	Özel transport kapısı ile	1 gün Sonra 18:00
BARTONELLA HENSELAE IGG	17339	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktar	Soğuk zincir 2-8 C	30 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	18/106

BARTONELLA HENSELAE IGM	17338	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	30 gün Sonra 18:00
BORRELİ BURGDORFERİ IGG	15070	Cuma Çarşamba (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
BORRELİ BURGDORFERİ IGM	15080	Cuma Çarşamba (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
BORDETELLA PERTUSSİS IGA	17002	Hergün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
BORDETELLA PERTUSSİS IGG	17003	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
BOS KÜLTÜRÜ	6040	Her gün	BOS	Yok	Yok	K:Steril swab R:Uygunsuz alım	Özel transport besiveri ile	3 gün Sonra 12:00
Boyalı Mikroskopik İnceleme (Gram,M.Mavisi Wright,Ziehl- Nielsen,vb.)	16216	Her gün	Materyal	Yok	Yok	K: Steril Kap R:Donmuş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00
Boyasız Mikroskopik İnceleme	16217	Her gün	Materyal	Yok	Yok	K: Steril Kap R:Donmuş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00
BRUCELLA COOMBS (TüpAglütinasyon)	15110	Her gün (16:00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	19/106

BRUCELLA IGG	15120	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
BRUCELLA IGM	15130	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
BRUCELLA WRIGHT (TüpAglütinasyon)	5240	Her gün (16:00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00
BRUCELLA TARAMA (Rose Bengal)	5230	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
BURUN KÜLTÜRÜ	6050	Her gün	Sürüntü numunesi	Yok	Yok	K:Steril swab R:Uygunsuz alım	Özel transport besiyeri ile	1 gün Sonra 18:00
CALPROTECTİN	16844	Pazartesi Perşembe (12.00)	Gaita	Yok	Yok	K:Steril kab R:Uygunsuz alım	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün 18:00
CARNİTİN/ AÇILKARNİTİN	16949	Perşembe Cuma (13.00)	Filtre kağıdı kartında 3 dolu daire	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
CARNİTİN	16949	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	30 gün Sonra 18:00
C1 ESTERAZ İNİHİTÖR	8130	Salı (13.00)	Sitratlı plazma	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün Sonra 18:00
C1q-complement	16545	Pazartesi (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	20/106

CA 125	4050	Her gün	Her gün	3-6 saat açlık	Ovülasyon, Menstrüas yon Dönemleri nde ölçülmez	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
CA 15-3	4060	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
CA 19-9	4070	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
CA 72-4	8160	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
CD 4/ CD 8 ORANI (immun yetmezlik paneli)	17295	Her gün	Edtalı tam kan	Yok	Yok	K:Uygun numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
CD 19 ANALİZİ	17209	Her gün	Edtalı tam kan	Yok	Yok	K:Uygun numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
CD 16+ 56 ANLİZİ	*LABA DANIŞINIZ	Her gün	*LABA DANIŞINIZ	Yok	Yok	K:Uygun numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	*LABA DANIŞINIZ
CEA (KARSİNOEMBRİYO N İKANTİJEN)	4080	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Sigara içilip içilmediği sorgulanmalı dır.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
CH 50 (kompleman total)	16975	Perşembe (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00

CHLAMYDIA ANTİJENİ	15480	Her gün	Jelsiz transport besiyeri	Yok	Bayanda vajinal sürüntü Erkeklerde	K:uygun kapta numune R: oda ısısında bekletme	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
-----------------------	-------	---------	---------------------------------	-----	---	--	-----------------------	-------------------

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	21/106

CHLAMYDIA PNEUMONİAE IGG	15140	pazartesi perşembe (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
CHLAMYDIA PNEUMONİAE IGM	15150	pazartesi perşembe (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
CHLAMYDIA TRACHOMATİS IGA	16568	Pazartesi Perşembe (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
CHLAMYDIA TRACHOMATİS IGG	15160	Pazartesi Perşembe (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
CHLAMYDIA TRACHOMATİS IGM	15170	Pazartesi Perşembe (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
CHLAMYDIA TRACHOMATİS DNA PCR	16964	Pazartesi (13.00)	İdrar, Endoserviks veya erkek uretrasından elde edilen swab örnekleri	Yok	Yok	K:Uygun numune R:Steril olmayan numune	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
CİVA	16060(TAM KAN) 16637(24S) 17162(SPOİDRAR)	Her gün	Edtalı tam kan/24 h idrar/ Spot idrar	Yok	İdrar için asitsiz idrar	K:Uygun toplanan numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	12 gün Sonra
CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIK PANELİ (Pcr)	17016	Pazartesi Çarşamba Cuma	Sürüntü numunesi	Yok	Kuru swap sürüntü İdrar Smear	K:Uygun numune R:Steril olmayan numune	Soğuk zincir 2-8 C	3 iş günü

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	22/106

CLOSTRİDİUM DİFFİCİLE TOKSİN A-B	16988	Her gün	Gaita	Yok	Yok	K:Uygun kapta numune R: Yanlış numune	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra (18:00)
CMV AVIDİTE	15010	Pazartesi Perşembe	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün (18:00)

CMV IgG (mikroelisa)	5020	Çarşamba Cuma (09:00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
CMV IgM (mikroelisa)	5040	Çarşamba Cuma (09:00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
CMV PCR	16809	Her gün	Serum, Edtali tam kan, Bos	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	12 gün sonra 18:00
COOMBS DİREKT	15470	Her gün	Edtali tam kan	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00
COOMBS İNDİREKT	17021	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00
C-PEPTİD	10040	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	23/106

CRYOGLOBULİN	16762	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	9 gün Sonra
CRP (C REAKTİF PROTEİN) High Sensitive	1170	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
ÇİNKO (Fotometrik)	8180	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
ÇİNKO (Eritrosit içi)	17167	Her gün	Edtalı Tam Kan	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün Sonra
ÇOK UZUN ZİNCİRLİ YAĞ ASİTLERİ	17133	Çarşamba (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	22 gün Sonra 18:00
D-DİMER	11050	Her gün	Sitratlı plazma	3-6 saat açlık	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
DELTA (HDV) ANTİJENİ	15180	Salı (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
DELTA ANTİKOR (ANTİ-HDV)	15030	Salı (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra
DEMİR	1180	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Sabah açlığı numunesi tercih edilir	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, IM demir preparatı kullanımı	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	24/106

DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ	1190	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Sabah açlığı numunesi tercih edilir	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, IM demir preparatı kullanımı	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
DEOKSİPİRİDİNOLİN (PYRİLLİN-D)	9090	Salı (13.00)	24 S idrar Spot idrar	Yok	Yok	K:Uygun kaba alınması R:Uygunsuz toplama	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
DESMOGLEİN 1 VE 3	16319(1) 16224(3)	Cuma (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, Lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
DHEA	16815	Perşembe (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, Lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
DHEA-S (DHEA-SO ₄) (DEHİDROEPIANDRO STERON)	4090	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
DİAMİN OKSİDAZ (DAO)	17306	Pazartesi Çarşamba (13.00)	Serum	3-6 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4gün sonra
DİGOKSİN	8210	Her gün	Serum	Son 12 saatte ilacın alınmaması	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	25/106

DİĞER KÜLTÜRLER	6060(1) 16858(2)	Her gün	Materyal ya da değişik sürüntü örnekleri	Yok	Yok	K:Steril kap R:Uygunsuz alım	Özel transport besiyeri veya steril kap	2 gün Sonra 18:00
DİHİDROTESTOSTER ON (DHT)	10050	Çarşamba (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, Lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra
DOKU TRANSGlutAMİNAZ IgA	12510	Perşembe (09.00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, Lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
DOKU TRANSGlutAMİNAZ IgG	12520	Perşembe (09:00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, Lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	26/106

DOPAMİN	10270(HEPARİN PLAZMA) 17562(SPOT İDRAR) 16731(24S)	Cuma (13.00)	Heparinli plazma/ Spot idrar/ 24 S idrar(Soğuk ortam)	8-10 saatlik sabah açlığı ve son iki hf ilaç kısıtlama *	En az 30 dk dinlenme sonra tercihen venöz katater ile	K Hemen santrifüj R:Hemoliz, Lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	6 gün Sonra 18:00
DÖRTLÜ TARAMA TESTİ (İkinci trimester tarama testi)	16254(AFP DÖRTLÜ) 16255(E3) 16256(B-HCG) 16253(İNHİBİN A) 16743(RAPOR)	Her gün	Serum	BPD ölçümünü içeren özel test formu mutlaka doldurulmalıdır	Gebeliğin 15 hf+0 gün ile 20 hf+6 gün arasında kan alınmalıdır	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
EBV PCR	17412	Her gün	Edtalı plazma BOS	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	22 gün Sonra 18:00
EBV EBNA IgM	16621	Salı Çarşamba (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra
EBV EBNA IgG	15210	pazartesi perşembe (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra
EBV VCA IgG	15220	pazartesi perşembe (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra
EBV VCA IgM	15230	pazartesi perşembe (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra
EBV EA IgG	15110	Cuma	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
EBV EA IgM	15200	Cuma	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	27/106

ECHOVİRÜS IgG	17262	Salı (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
ECHOVİRÜS IgM	17261	Salı (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
EKLEM SIVISI (synovial) KÜLTÜRÜ	6070	Her gün	Eklem Sıvısı	Yok	Steril şartlarda	K:Steril tüpe alım R:Uygunsuz alım	Steril kap ile	3 gün Sonra 16:00
ENA PROFİLİ (İMMUNBLOT)	12540	Salı Cuma (09.00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, Lipemi,	Soğuk zincir 2-8 C	6 gün sonar 18:00
ENA PROFİLİ (Geniş panel)	16599	Her gün (09.00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, Lipemi,	Soğuk zincir 2-8 C	6gün sonra 18:00
ENTEROVİRUS PCR	14160	Salı (13.00)	Edtalı plazma	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, Lipemi,	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün sonra 18.00
EOZİNOFİL (Total)	8760	Her gün	Edtalı tam kan	Yok	Şehir dışından gönderim yapan kurumlar için lama yayılarak gönderilen preparat.	K:Uygun tüpe alınması R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 16.00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	28/106

EOZİNOFİL KATYONİK PROTEİN (ECP)	16657	Pazartesi Perşembe (13.00)	Serum	Yok	Alım sonrası 1-2 saat oda ısısında bekletilmeli ve 1000-1500 devirde santrifüj edilmeli	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, Lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
EPİNEFRİN (ADRENALİN)	10280 (HEPARİNLİ PLAZMA) 16750(SPOT İDRAR) 10340(24S)	Cuma (13.00)	Heparinli plazma, spot idrar, 24S idrar	Yok	Yok	K:Uygun tüp/kab R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
ERİTROPOİETİN	10060	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
ESTRON (E1)	17542	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,	Soğuk zincir 2-8 C	4 hafta Sonra
ESTRADIOL (E2)	4100	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Kadında tercihen adetini 2-5. günleri	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
ESTRIOL (E3,uE3,serbest E3)	16312	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
EVEROLİMUS	17344	Perşembe (13.00)	Edtalı tam kan	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra
FAKTÖR II	11060	Pazartesi (13.00)	Sitratlı plazma	Numune alındıktan sonra santrifüj edilerek plazma hemen ayrılmalıdır.	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	6 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	29/106

FAKTÖR IX (Christmas Faktör)	11070	Perşembe (13.00)	Sitratlı plazma	Numune alındıktan sonra santrifüj edilerek plazma hemen ayrılmalıdır.	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
FAKTÖR V LEİDEN MUTASYONU	14100	Her gün	Edtalı tam kan	Genetik onam formu doldurulmalıdır	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,	Soğuk zincir 2-8 C	25 gün Sonra
FAKTÖR V (Proakselerin)	11080	Perşembe (13.00)	Sitratlı plazma	Numune alındıktan sonra santrifüj edilerek plazma hemen ayrılmalıdır.	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
FAKTÖR VII (Prokonvertin)	11090	Perşembe (13.00)	Sitratlı plazma	Numune alındıktan sonra santrifüj edilerek plazma hemen ayrılmalıdır.	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
FAKTÖR VIII	11100	Perşembe (13.00)	Sitratlı plazma	Numune alındıktan sonra santrifüj edilerek plazma hemen ayrılmalıdır.	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
FAKTÖR VIII İNİHİBİTÖR	16694	Cuma (13.00)	Sitratlı plazma	Numune alındıktan sonra santrifüj edilerek plazma hemen ayrılmalıdır.	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	22 gün Sonra 18:00
FAKTÖR X (Stuart Faktör)	11110	Perşembe (13.00)	Sitratlı plazma	Numune alındıktan sonra santrifüj edilerek plazma hemen ayrılmalıdır.	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
FAKTÖR XI	11140	Pazartesi (13.00)	Sitratlı plazma	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	30/106

FAKTÖR XII (Hageman Faktör)	11150	Pazartesi (13.00)	Sitratlı plazma	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
FAKTÖR XIII (Fibrin stabilize edici faktör)	11160	Çarşamba (13.00)	Sitratlı plazma	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,	Soğuk zincir 2-8 C	6 gün Sonra 18:00
FAMİLİYALAKDENİZ ATEŞİ MUTASYON ANALİZİ (FMF)	14140	Her gün	Edtalı tam kan	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,	Soğuk zincir 2-8 C	40 gün sonar
FENİLALANİN	17139	Her gün (13.00)	Serum, Topuktan emdirilmiş kan	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,	Soğuk zincir 2-8 C	12 gün Sonra
FENİL GLİOKSİLİK ASİT	16918	Her gün (13.00)	Spot idrar	Yok	Yok	K: idrar Kabı R: Uygunsuz alım	Soğuk zincir 2-8 C	21 gün Sonra 18:00
FENİLKETONÜRİ TARAMASI(PKU)	16684	Çarşamba Cuma (13.00)	Topuktan emdirilmiş kan	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra
FENİTOİN (DİFENİLHİDANTOİN)	8240	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
FENOBARBİTAL (LUMİNAL)	8250	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
FENOL	16636	Her gün (13.00)	Spot idrar	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	31/106

FERRİTİN	4110	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
FİBRİNOJEN (Faktör 1)	3260	Her gün	Sitratlı Plazma	Yok	Yok	K:Uygun Seviye R:Pıhtılı,	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
FİTANİK ASİT	17138	Salı (13.00)	Edtalı Plazma	Gece açlığı sonrası örnek alınmalıdır. Örnek alımından 24 saat öncesine	Yok	K:Uygun Seviye R:Pıhtılı, hemolizli numune	Soğuk zincir 2-8 C	17 gün Sonra 18:00
FOLAT (FOLİK ASİT)	1210	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
FORMÜLLÖKOSİT	1550	Her gün	Tam kan	Yok	Şehir dışından gönderim yapan kurumlar için lama yayılarak gönderilen	K:Uygun Seviye R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 16:00
FOSFOR (P,PO4)	1220(SERUM) 1590(24S) 1800(SPOT İDRAR)	Her gün	Serum, 24 s idrar	Serum için, 10-12 saat açlık	İdrar için toplama süresi ve miktarı belirtilmelidir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
FSH (FOLLİKÜL STİMÜLAN HORMON)	4120	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Kadında tercihen adet 2-5. günleri	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, linemi ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
FTA-ABS (Floresan Treponemal Ab-Abs) IgM /ıgG	17182(IGM) 17183(IGG)	Pazartesi (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	32/106

FRUKTOZAMİN	16721	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
GAİTAKÜLTÜRÜ	6090	Her gün	Gaita	Yok	Yok	K:Gaita Kabı R:Uygunsuz alım	Soğuk zincir 2-8 C	1 gün Sonra 18:00
GAİTADA ADENOVİRÜS ANTİJENİ	15540	Her gün	Gaita	Yok	Yok	K:Gaita Kabı R:Uygunsuz alım	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
GAİTADA AMİP ANTİJENİ	15490	Her gün	Gaita	Yok	Yok	K:Gaita Kabı R:Uygunsuz alım	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
GAİTADA DİREKT BAKI (Gaita Mikroskopisi)	6200	Her gün	Gaita	Numune sıvı ise max 30 dk,katı ise 120 dk içinde ulaştırılmalıdır	1 cm3 numune yeterlidir	K:2-8 C de 60 dk ya kadar beklemiş numune R:60 dk dan fazla beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
GAİTADA GİARDİA ANTİJENİ	15550	Her gün	Gaita	Yok	Yok	K:Gaita Kabı R:Uygunsuz alım	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
GAİTADA GİZLİ KAN	2020	Her gün	Gaita	Yok (Testimiz monoklonal ve insan)	1 cm3 numune yeterlidir	K:2-8 C de 3 güne kadar beklemiş numune R:3 günden	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
GAİTADA HAZIM	6210	Her gün	Gaita	Yok	1 cm3 numune yeterlidir	K:2-8 C de 120 dk ya kadar beklemiş numune R:120 dk dan fazla beklemiş	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 14:00
GAİTADA PARAZİT YUMURTASI	7010	Her gün	Gaita	Numune sıvı ise max 30 dk,katı ise 120 dk içinde	1 cm3 numune yeterlidir	K:2-8 C de 120 dk ya kadar beklemiş numune R:120 dk dan fazla beklemiş	Soğuk zincir 2-8 C Gaita kabı	Aynı gün

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	33/106

GAİTADAPH	16565	Her gün	Gaita	Yok	1 cm3 numune yeterlidir	K:2-8 Cde 120 dk ya kadar beklemiş numune R:120 dk dan fazla beklemiş	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
GAİTADAREDÜKTAN MADDE	16263	Her gün	Gaita	Yok	1 cm3 numune yeterlidir	K:2-8 Cde 6 saate kadar beklemiş numune R:6	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
GAİTADA TRİPSİN	16322	Her gün	Gaita	Yok	1 cm3 numune yeterlidir	K:2-8 Cde 6 saate kadar beklemiş numune R:6	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün sonar
GAİTADAROTAVİRÜS ANTİJENİ	15560	Her gün	Gaita	Yok	1 cm3 numune yeterlidir	K:2-8 Cde 120 dk ya kadar beklemiş numune R:120 dk dan fazla beklemiş	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
GAİTADA YAĞ ANALİZİ (Sudan III Black)	2040	Her gün	Gaita	Yok	1 cm3 numune yeterlidir	K:2-8 Cde 6 saate kadar beklemiş numune R:6	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 14.00
GALAKTOMANNAN (ASPERGİLLUS) ANTİJENİ	16317	Çarşamba Cuma (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,Lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün sonar
GALAKTOZ-1 FOSFAT ÜRİDİL TRANSFERAZ (GALT)	16686	Her gün	Edtalı tam kan	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,Lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	30 gün sonar
GANGLİOASİT ANTİKORLARI	16742	Pazartesi (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,Lipemi,	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün sonra 18:00
GASTRİN	10070	Çarşamba Cuma (13.00)	Serum	8-10 saat açlık	Gastroskopi sonrası numune alınmamalıdır	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,Lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	34/106

GARDNERELLA BAKISI		Her gün	Sürüntü numunesi	Yok	Yok	K:Steril transport besiyeri R:Uygunsuz alım	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00
GENİTAL Sürüntü/Akıntı KÜLTÜRÜ	6100	Her gün	Sürüntü numunesi	Yok	Yok	K:Steril transport besiyeri R:Uygunsuz alım	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
GIDA İNTOLERANS TESTİ (108 PARAMETRE)	17351	Çarşamba (09:00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün (18.00)
GIDA İNTOLERANS TESTİ (216 PARAMETRE)	17579	Çarşamba (09:00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün (18.00)
GGT (GAMAGLUTAMİLTTRANSFERAZ)	1230	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
GLOBULİN	1240	Her gün	Serum	10-12 saat açlık GLOBULİN testi için protein ve albumin testleri	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
GLUKAGON	16839	Her gün	Lab'a danışın	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 hafta sonar
GLUKOZ (Açlık)	1010	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Sabah açlığı numunesi tercih edilir	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz , uzun süre beklemiş	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	35/106

GLUKOZ (Gün içi)	17408	Her gün	Serum, idrar, diğer mayii	Yok	Materyale özgü	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz , uzun süre beklemiş	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
GLUKOZ (Tokluk)	17239	Her gün	Serum	Yemek Sonrası 2. saat tokluk	2 saatlik süre ilk lokmadan itibaren hesaplanmalıdır	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz , uzun süre beklemiş	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
GLUKOZ 6 FOSFAT DEHİDROGENAZ (G6PDH)	8780	Pazartesi Cuma (09.00)	Edtalı tam kan	Yok	Yok	K:Uygun Seviye R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
GÖZ (Konjonktiva) KÜLTÜRÜ	6110	Her gün	Sürüntü numunesi	Yok	Yok	K:Steril swap R:Uygunsuz alım	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
GROWTH HORMON (Büyüme Hormonu)	10080	Her gün	Serum	10-12 saat sabah açlığı	30 dakika dinlenme sonrası	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,Lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
HAPTOGLOBİN	8270	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
HbA1C	1530	Her gün	Tam kan	Yok	Yok	K:Uygun Seviye R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
HBeAg	16702	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	36/106

HBsAg	5280	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
HBsAg (mikroelisa)	5290	PAZARTESİ ÇARŞAMBA CUMA (09:30)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
HBV DNA (PCR)	14010	Salı (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
HCV GENOTİPLENDİRME	*LABA DANIŞINIZ	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün Sonra 18:00
HCV RNA (PCR)	14020	Çarşamba (13.00)	Edtalı plazma	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
HDV RNA (PCR)	14040	Çarşamba (13.00)	Edtalı plazma	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	37/106

HE4	16912	Çarşamba (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
HELİKOBAKTER PYLORİ (Direkt Antijen)	12950	Her gün	Gaita	Yok	Soğuk ortamda numune gönderimi	K:2-8 Cde 120 dk ya kadar beklemiş numune R:120 dk dan fazla beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
HELİKOBAKTER PYLORİ IgA	15240	Pazartesi Perşembe (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
HELİKOBAKTER PYLORİ IgG	15250	Pazartesi Perşembe (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
HEMOGLOBİN ELEKTROFOREZİ (HPLC)	8790	Pazartesi Perşembe	Tam kan	Yok	Yok	K:Uygun Seviye R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00
HEMOGRAM *Bakınız Tam Kan Tahlili	901620	Her gün	Tam kan	Yok	Yok	K:Uygun Seviye R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
HIV (p24Ag+IgG) (mikroelisa)	5300	PAZARTESİ ÇARŞAMBA CUMA (09:30)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
HIV ½ ANTİKOR	5310	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	38/106

HIV DOĞRULAMA (Western Blot)	15260	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C Düz Tüp	3 gün Sonra 18:00
HİPPÜRİK ASİT	16329	Her gün (13.00)	Spot idrar	Yok	Yok	K:Uygun kap R: Uygunsuz numune	Soğuk zincir 2-8 C Düz Tüp	15 gün Sonra 18:00
HİSTAMİN	17307	Her gün	Edtali plazma	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 hafta sonar
HLA-B27(PCR)	17258	Perşembe (13.00)	Edtali Tam Kan	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
HLA-B27 Flow Sitometri	14210	Her gün	Edtali Tam Kan	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
HLA-B5	14220	Her gün	Edtali Tam Kan	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	17 gün Sonra 18:00
HLA-B7	14230	Her gün	Edtali Tam Kan	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	39/106

HLA-DR	14270	Her gün	Edtali Tam Kan	Perşembe, cuma cumartesi kan alımı yapılmamalıdır.	8-10 kere alt üst edilmelidir.	K:Uygun tüpe alınması R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
HOMOSİSTEİN	17184	Hergün	Serum	10-12 saat sabah açlığı	Hemen santrifüjleme	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz ve pıhtı	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı Gün
HSV TİP 1 IgG (Herpes Simpleks)	15280(SERUM) 16700(BOS)	Her gün	Serum, Bos	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
HSV TİP 1 IgM (Herpes Simpleks)	15290(SERUM) 16701(BOS)	Her gün	Serum, Bos	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
HSV PCR (HSV TİP 1 ve HSV TİP 2)	16833(SERUM) 16832(BOS)	Salı (13.00)	Bos Edtali plazma Serum Bal, sürüntü	Yok	Yok	K:Uygun numune R:Steril olma	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
HSV TİP 2 IgG (Herpes Simpleks)	15311(SERUM) 17023(BOS)	Her gün	Serum Bos	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
HSV TİP 2 IgM (Herpes Simpleks)	15310(SERUM) 17022(BOS)	Her gün	Serum Bos	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	40/106

HPV DNA GENOTİPLENDİRME PCR	16749	Perşembe (13.00)	Sürüntü numunesi	Yok	Kadın için Smear kabı Erkek için Jelsiz swap ile	K:Uygun numune R:Steril olmayan	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18.00
HPV DNA TARAMA PCR	16948	Salı (13.00)	Sürüntü numunesi	Yok	Kadın için Smear kabı Erkek için Jelsiz swap ile	K:Uygun numune R:Steril olmayan	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18.00
IGF-1 (SOMATOMEDİN C)	10090	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, Lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
IGFBP-3 (İNSÜLİN LİKE GROWTH FAKTÖR BAĞLAYAN PROTEİN -3)	10100	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, Lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
İDRAR KÜLTÜRÜ	6120	Her gün	İdrar	Genital Bölge temizliği	Tercihen sabah ve orta akım idrarı	K:Steril idrar kabı R:Uygunsuz	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
İDRARDA REDÜKTAN MADDE	1990	Her gün	İdrar	Yok	Yok	K:Steril idrar kabı R:Uygunsuz alın	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
İDRARDA YABANCI MADDE ARANMASI (İDRARDA UYUŞTURUCU TESTİ)	17051	Her gün	Spot idrar	Yok	Yok	K:Steril idrar kabı R:Uygunsuz alın, beklemiş	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	41/106

İKİLİ TARAMA TESTİ (Birinci Trimester Tarama testi)	4140(PAPP-A) 16999(FREEB -HGG) 16743 (RAPOR)	Her gün	Serum	NT ve CRL ölçümünü içeren özel test formu mutlaka eksiksiz	Gebeliğin 11 hf+0 gün ile 13 hf+6 gün arasında kan alınmalıdır	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
İMMÜNİKSASYON (İMMÜNGLOBULİN) ELEKTROFOREZİ	8340(SERUM) 9100(İDRAR)	Her gün	Serum ya da 24 S idrar	Yok	Yok	K:Uygun numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün Sonra 18:00
İMMÜNİKSASYON (İMMÜNGLOBULİN) ELEKTROFOREZİ (BOS)	16766	Her gün	BOS	BOS numunesi ile birlikte Alınmış eş zamanlı serum numunesi de	Yok	K: Steril örnek R: Eş zamanlı numune gönderilmemesi	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra 18.00
İMMÜNGLOBULİN A (IgA)	8290	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
İMMÜNGLOBULİN D (IgD)	8300	Pazartesi (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
İMMÜNGLOBULİN E (IgE)	4250	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
İMMÜNGLOBULİN G (IgG)	8310	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	42/106

IGG İNDEKSİ	16741	Pazartesi (13.00)	Serum ve Bos Numunesi birlikte gelmelidir.	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün Sonra 18:00
İMMÜNGLOBULİN G ALT GRUPLARI (IgG1,IgG2,IgG3,IgG4)	8320(IGG1) 16307(IGG2) 16308(IGG3) 16309(IGG4)	Çarşamba (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
İMMÜNGLOBULİN M (IgM)	8330	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
İNFLUENZA A+B	16801	Her gün	Sürüntü, akıntı	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
İNHİBİN A	16579	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
İNHİBİN B	16593	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	23 gün Sonra 18:00
İNSÜLİN (AÇLIK)	4150	Her gün	Serum	10-12 saat açlık şarttır	Oral hipoglisemik ya da insülin kullanılmadan	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
İNSÜLİN (TOKLUK)	16246	Her gün	Serum	2 saatlik tokluk	Oral hipoglisemik ya da insülin kullanılmadan	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	43/106

İNSÜLİN REZİSTANSI (HOMA-IR İNDEKSİ)	4160	Her gün	Serum	10-12 saat açlık şarttır İnsülin açlık ve glukoz açlık testinin	Oral hipoglisemik ya da insülin kullanılmadan	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
İYOT (SERUM)	17054	Her gün	Serum	Hekim tarafından başka türlü tarif yapılmamışsa, test için önerilen, iyot tedavisini	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	12 gün Sonra
İYOT (İDRAR)	16841(SPOT İDRAR) 16963(24S)	Her gün	Spot idrar, 24 saatlik idrar	Hekim tarafından başka türlü tarif yapılmamışsa, test için önerilen, iyot tedavisini	Yok	K:Steril idrar kabı R:Uygunsuz alım, beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	12 gün Sonra 18:00
KABAKULAK(MU MPS) IgG	15320	Pazartesi Çarşamba (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
KABAKULAK (MUMPS) IgM	15330	Pazartesi Çarşamba (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
KADMİYUM(CD)	16070	Her gün	Edtalı tam kan	Yok	Yok	K:Uygun numune R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
KALSİTONİN	10110	Her gün	Serum	10-12 saat açlık gerekir.	Tiroid muayenesi sonrası alınmamalıdır	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	44/106

KALSİYUM İYONİZE	8350	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
KALSİYUM TOTAL (Ca)	1270	Her gün	Serum, 24 s idrar, BOS	Serum için, 10-12 saat açlık	Turnike süresi kısa tutulmalıdır	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
KAN KÜLTÜRÜ	6130	Her gün	Tam kan	Yok	5-10 cc, özel vasata	K:Steril Koşullarda alın R:Uygunsuz alın	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün içinde
KAN GRUBU (A,B,O+Rh)	3210	Her gün	Tam kan	Yok	Yok	K:Uygun Seviye R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
KAPPAHAFİF ZİNCİR (İDRAR)	9110(İDRAR)	Çarşamba Cuma	Spot idrar, 24 S idrar	Yok	Asitsiz idrar	K:Uygun idrar kabı R:Uygunsuz alın, beklemiş	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
KAPPAHAFİF ZİNCİR SERBEST	16555	pazartesi Cuma (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
KAPPAHAFİF ZİNCİR TOTAL	8360	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Lab'a danışın
KARBAMAZEPİN (Tegretol)	8370	Her gün	Serum	Son 12 saatte ilacın alınmaması	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	45/106

KARDİYOVASKÜLER RİSK PANELİ 12 MUTASYON MTHFR (A1298C) , MTHFR (C677T), FAKTÖR 2 G20210A), FAKTÖR 5 LEİDEN G1691A, FAKTÖR 5 CAMBRIDGE G1091C, PLASMINOJEN AKTİVATÖR İNHİBİTÖR 1(PA1), APO E, APO B, ITGB, ACE İNS/DEL,FVHR2, FGB	17279	Her gün	2 adet Edtalı tam kan	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	21 gün Sonra 18:00
KIZAMIK (RUBEOLA) IgG	15340	Pazartesi Çarşamba (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
KIZAMIK (RUBEOLA) IgM	15350	Pazartesi Çarşamba (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
KIZAMIKÇIK (RUBELLA) IgG	5320	Çarşamba Cuma 09.00	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18.00
KIZAMIKÇIK (RUBELLA) IgM	5340	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
KIZAMIKÇIK (RUBELLA) IGG AVİDİTE	15360	Perşembe (09.00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması ve rubella ıgg testinin pozitif olması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:30
KİST HİDATİK IgG (Echinococ IgG)	16609	Pazartesi Perşembe (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz,ıktır	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	46/106

KİST HİDATİK İHA (Echinococ İndirekt Hemaglutinasyon)	15380	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
KLOR (KLORÜR,CL-)	1280	Her gün	Serum, 24 s idrar, Spot idrar	Serum için, 10-12 saat açlık	İdrar için toplama süresi ve miktarı belirtilmelidir	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
KOLESTEROL HDL	1250	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
KOLESTEROL LDL (FORMÜL)	1320	Her gün	Serum	10-12 saat açlık T.kolesterol, trigliserit ve HDL testlerinin birlikte	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
KOLESTEROL TOTAL	1470	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
KOLESTEROL VLDL	16285	Her gün	Serum	10-12 saat açlık T.kolesterol ve trigliserit testlerinin birlikte	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
KOLİNESTERAZ II (PSEUDOKOLİNESTE RAZ)	8380	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
KOMPLEMAN C3	8140	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	47/106

KOMPLEMAN C4	16280	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
KORTİZOL (HİDROKORTİZON)	4170	Her gün	Serum, 24 s idrar	10-12 saat açlık, İdrar borik veya asetik asit üzerine	Erken sabah açlığı numunesi tercih edilir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
KREATİN KİNAZ (CK,CPK)	1090	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
KREATİN KİNAZ MB (CKMB)	1150	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
KREATİNİN	1290 (SERUM) 1650(24S) 1760(SPOT İDRAR)	Her gün	Serum, 24 s idrar, Spot idrar	Soğuk zincir 2-8 C Düz Tüp	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
KREATİNİN KLERENSİ	1640	Her gün	Serum+ 24 s idrar	Test süresince çay, kahve, ilaç	İdrar için toplama süresi ve miktarı belirtilmelidir	K:Eşzamanlı kan örneği R:İdrarın uygun toplanmaması	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
KROM (Cr)	16730(TAM KAN) 16640(24S)	Her gün	Edtalı tam Kan 24 S idrar	Yok	Soğuk ortamda saklanarak toplanmalıdır	K:Uygun idrar kabı R:Uygunsuz toplama, pıhtılı tam kan numunesi	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün Sonra 18:00
KROMOGRANİN A	16800	Her gün (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	30 gün Sonra 18:00



ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	48/106

KULAK KÜLTÜRÜ	6140	Her gün	Sürüntü numunesi	Yok	Yok	K: Steril transport besiyeri R: Uygunsuz alım	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
KURŞUN (Pb)	16880(TAM KAN) 16638(24S)	Her gün	Edtalı tam kan 24 S idrar	Yok	Yok	K: Uygun numune R: Uygunsuz idrar toplama,	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün Sonra
LAKTİKASİT	8930	Her gün	Oksalatlı Plazma	Hasta en az 30 dk istirahat etmiş olmalıdır. Mümkünse turnike kullanmaktan kaçınılmalıdır.	Plazma hemen ayrılmalıdır	K: Uygun tüpe alım R: Pıhtılı ve hemolizli numune	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra
LAMBDA HAFİF ZİNCİR SERBEST	16554	Pazartesi Perşembe (13.00)	Serum	Yok	Yok	K: Santrifüjlü numune R: Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
LAMBDA HAFİF ZİNCİR TOTAL	8390	Her gün (13.00)	Serum	Yok	Yok	K: Santrifüjlü numune R: Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
LAMBDA HAFİF ZİNCİR (İDRAR)	9130	Her gün (13:00)	Spot idrar 24 S idrar	Yok	Asitsiz idrar	K: Uygun idrar kabı R: Uygunsuz alım, beklemiş	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
LAMOTRİGİNE (LAMICTAL)	8400	Pazartesi Çarşamba (13.00)	Serum	Son 12 saatte ilacın alınmaması	Yok	K: Santrifüjlü numune R: Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra
LDH (LAKTAT DEHİDROGENAZ)	1310(SERUM) 2100(BOS) 16680 (PLEVRA)	Her gün	Serum BOS Plevra sıvısı	10-12 saat açıklık	Yok	K: Santrifüjlü numune R: Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	49/106

LDH İZOENZİMLERİ ELEKTROFOREZİ (LAKTAT DEHİDROGENAZ İZOENZ.)	16673	Her gün (13:00)	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C Düz Tüp	30 gün sonra
LDL DİREKT ÖLÇÜM	17214	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C Düz Tüp	2 gün sonar
LE HÜCREŚİ	16544	Her gün	Lab a danışın	Yok	Yok	Lab a danışın	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün Sonra 18:00
LENFOSİT ALT GRUPLARI	16582	Her gün	Edtalı Tam kan	Yok	Yok	K:Uygun Seviye R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün sonra 18:00
LEPTİN	16533	2 haftada bir (Salı 13.00)	Serum	10-12 saat açlık	Hastanın kilo ve boyu bildirilmelidir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
LEVETİRACETAM (KEPPRA)	16575	Pazartesi Çarşamba (13.00)	Serum	Son 12 saatte ilacın alınmaması	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	3gün Sonra 18:00
LH (LUTEİNLEŞTİRİCİ HORMON)	4180	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Kadında tercihen adetın 2-5. günleri	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	50/106

LİMBİK ENSEFALİT PANELİ	17405(SERU M) 17018(BOS)	Her gün	Serum Bos	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	21 iş günü
LİPAZ	8410	Her gün	Serum Spot idrar	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
LİPİD (LİPOPROTEİN) ELEKTROFOREZİ	8430	Her gün	Serum	İki hf normal diyet, son 24 saatte alkol alımı yasak 10-12 saat	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Yanlış numune	Soğuk zincir 2-8 C	1 ay Sonra 18:00
LİPOPROTEİN (a)	8420	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
LİSTERİA AGLÜTİNASYON	16590	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
LİTYUM (Li)	1330	Her gün	Serum	Son ilaç dozundan 12 saat Sonra	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00

		ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ					Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
							Yayın Tarihi	18.10.2024
							Revizyon No	02
							Revizyon Tarihi	16.01.2026
							Sayfa No	51/106
LİVER KİDNEY MİKROZOMAL ANTİKOR (LKMA)	12130	Perşembe (09:00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün (18:00)

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	52/106

LİZOİM (MURAMİDAZ)	16574	Çarşamba (09:00)	Serum (donmuş numune)	donmuş numune	donmuş numune	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
LUPUS ANTİKOAGÜLAN DOĞRULAMA	1170	Her gün	Sitratlı plazma	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
LUPUS ANTİKOAGÜLAN TARAMA	1180	Her gün	Sitratlı plazma	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
MAGNEZYUM (Mg)	1340(SERUM) 1660(24S) 16675(BOS)	Her gün	Serum, 24 s idrar BOS	10-12 saat açlık	İdrar için toplama süresi ve miktarı belirtilmeli	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
MAGNEZYUM (ERİTROSİT İÇİ)	17080	Her gün	Edtalı Tam kan	Yok	Yok	K:Uygun numune R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	53/106

MAKROPROLAKTİN TARAMASI	10130	Her gün	Serum	Yüksek dozda biotin (> 5 mg/gün) tedavi alan hastalarda son biotin uygulamasının ardından en az 8 saat geçmeden numune alınmamalıdır. Prolaktinin salgılanması epizodlar halinde gerçekleştiğinden ve 24 saatlik bir döngüye tabi olduğundan, prolaktin tayin edilirken, ölçülen konsantrasyonun kan numunesinin ne zaman alındığına bağlı olduğu dikkate alınmalıdır. Prolaktinin serbest bırakılması, emzirme ve stres ile fizyolojik olarak hızlandırılır. Ayrıca, çeşitli farmasötik ürünler (ör. dibenzodiazepinler, fenotiazin), TRH ve östrojen, serum prolaktin konsantrasyonlarında yükselmeye neden olur. Prolaktinin serbest bırakılması dopamin, L-dopa ve ergotamin türevleri tarafından inhibe edilir. Çeşitli endokrinolojik olan veya gebe olan kadın hastaların serumunda hastalıkları makroprolaktin bulunduğu çeşitli yayınlarda bildirilmiştir. Çeşitli immünolojik testlerle monomerik prolaktine (22-23 kD) göre serum makroprolaktinlerinin saptanmasında farklı dereceler bulunduğu da açıklanmıştır. Bu durum Hiperprolaktineminin saptanmasının kullanılan immünolojik teste bağlı olmasına neden olabilir.	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
MANGAN	16884	Her gün	Edtalı Tam kan	Yok	Yok	K:Uygun numune R:Pihtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün Sonra 18:00
MANTARARANMASI VE KÜLTÜRÜ	6150	Her gün	Saç,deri, tırnak kazıntısı	Bölgenin 2-3 gün yıkanmaması ve haricen ilaç kullanılmaması	%70 lik alkol ile silindikten	K:Uygun numune R:İlaçlı bölgeden alım	Yok	10 gün Sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	54/106

MANTAR DİREKT BAKISI	16214	Her gün	Saç,deri, tırnak kazıntısı	Bölgenin 2-3 gün yıkanmaması ve haricen ilaç kullanılmaması	%70 lik alkol ile silindikten	K:Uygun numune R:İlaçlı bölgeden alım	Yok	Ertesi gün 16:00
MDS PANELİ	17272	Her gün	Edtalı Tam kan	Yok	Yok	K:Uygun numune R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	40 gün
METANEFİRİN	10290(EDTA PLAZMA) 10360(24S) 16752(SPOT İDRAR)	Cuma (13.00)	Edtalı plazma 24 S idrar spot idrar	İdrar 6 N HCL,borik ya da asetik a. üzerine toplanmış idrar	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
METHEMOGLOBİN	16668	Her gün	Edtalı tam kan	Yok	Yok	K:Uygun numune R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00

MİKOBAKTERİ (TÜBERKÜLOZ) KÜLTÜRÜ	6160	Her gün	Materyal	Yok	Yok	K: Steril Kap	Yok	46 gün Sonra
MİKOBAKTERİ (TÜBERKÜLOZ) PCR	14320	Her gün	Mayii Balgam idrar	Yok	Yok	K: Steril Kap	Yok	5 gün Sonra 18:00
MİKOBAKTERİ KÜLTÜRÜ (ÜREME KONTROLLÜ OTOMATİK SİSTEM)	17064	Her gün	Balgam, trakeal aspirat, bronş lavaj ve diğer vücut sıvılarında 10- 15 ml	Yok	Yok	K: Steril Kap	Yok	Üreme yoksa 45 gün
MİKOPLAZMA HOMİNİS kültürü	13010	Pazartesi Çarşamba	Sürüntü numunesi	Yok	Üretral ya da servikal örnek	K: jelli transport besiyeri	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
MİKOPLAZMA PNEUMONİAE IgG	16808	Çarşamba Cuma (13.00)	Serum	Yok	Yok	K: Santrifüjlü numune R: Hemoliz,	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
MİKOPLAZMA PNEUMONİAE IgM	15410	Çarşamba Cuma (13.00)	Serum	Yok	Yok	K: Santrifüjlü numune R: Hemoliz,	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
MİKROALBUMİN (İdrar)	1880(SPOT İDRAR) 1670(24S)	Her gün	24 s idrar, Spot idrar	Yok	İdrar toplama süresi ve miktarı belirtilmelidir.	K: Uygun kaba alınması R: Numunenin soğuk ortamda bekletilmemesi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
MİKROPROTEİN (İdrar)	1710(24S) 1780(SPOT İDRAR)	Her gün	24 s idrar, Spot idrar	Yok	İdrar toplama süresi ve miktarı belirtilmelidir.	K: Uygun kaba alınması R: Numunenin soğuk ortamda bekletilmemesi	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün

		ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ				Doküman No		İEL.PR.10.TR. 01	
						Yayın Tarihi		18.10.2024	
						Revizyon No		02	
						Revizyon Tarihi		16.01.2026	
						Sayfa No		56/106	
MİYOGLOBİN	1350(SERUM) 1810(İDRAR)	Her gün	Serum, İdrar	Yok	Yok	K:Uygun numune R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00	
MONOSPOT (HETEROFİL ANTİKOR)	TEST 15390	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00	

MTHFR (A1298C) MUTASYON ANALİZİ	14120	Her gün	Edtali tam kan	Yok	Yok	K: Uygun numune R: Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	40 gün Sonra
MTHFR (C677T) MUTASYON ANALİZİ	14110	Her gün	Edtali tam kan	Yok	Yok	K: Uygun numune R: Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	40 gün Sonra
MUKOPOLİSAKKARİT	9280	Salı (13.00)	İdrar	Yok	Tercihen sabah ilk idrar	K: Uygun numune R: beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün sonra 18:00
NEONATAL BİLİRUBİN	1570	Her gün (15.00)	Kapiller kan	Numune topuktan alınmalıdır	1 aya kadar olan numuneler tercih edilir	K: Uygun numune R: Hemolizli numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
NİKEL (Ni)	16799(SERUM) 17103(SPOT İDRAR) 16641(24S)	Her gün	24 S idrar spot idrar Serum	Yok	Asitsiz idrar	K: Uygun idrar kabı R: Uygunsuz alım, beklemiş	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün Sonra 18:00
NOREPİNEFRİN (NORADRENALİN)	10370(24S) 16751(SPOT İDRAR) 10250(HEPARİN Lİ PLAZMA)	Perşembe (13.00)	24 S idrar, spot idrar, Heparinli plazma	Yok	Yok	K: Uygun idrar kabı R: Uygunsuz alım, beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	6 gün Sonra 18:00
NORMETANEFRİN	10380(24S) 10300(EDTALI PLAZMA) 16753(SPOT İDRAR)	perşembe (13.00)	24 S idrar spot idrar Edtali plazma	Yok	Yok	K: Uygun idrar kabı R: Uygunsuz alım, beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	6 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	58/106

NÖRON SPESİFİK ENOLAZ (NSE)	10140	Her gün	Serum	Yok	Yüksek dozda biotin (> 20 mg/gün) tedavi alan hastalarda son biotin uygulamasının ardından en az 24 saat geçmeden numune alınmamalıdır.	K:Santrifüjlü numune R:Doğru şekilde santrifüjlenmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
OGTT (100g)	16553(30DK) 1400(60DK) 1410(120DK) 1420(180DK)	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yükleme Sonrası 180 dk egzersiz ve yemek içmek yasak	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz , uzun süre beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
OGTT (50 g)	1355(60DK) 16688(120DK)	Her gün	Serum	Tercihen en az 3 saatlik açlık	Yükleme Sonrası 60 dk egzersiz ve yemek içmek yasak	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz , uzun süre beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
OGTT (75 g)	1360(30DK) 1370(60DK) 1380(90DK) 1390(120DK) 16576(180DK)	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yükleme Sonrası 120 dk egzersiz ve yemek içmek yasak	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz , uzun süre beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
OKSALAT	16320(SPOT İDRAR) 9150(24S)	Perşembe (13.00)	24 S idrar Spot idrar	Toplama esnasında vebir gün öncesi salatalık, kuşkonmaz, ıspanak ve domates tüketilmemelidir	6 N HCL üzerine toplanmış idrar	K:Uygun idrar kabı R:Uygunsuz alım, beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	6 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	59/106

OKSİYUR YUMURTASI ARANMASI (Enterobius Vermicularis)	6220	Her gün	Pre anal selofan bant numunesi	Yok	Sabah erken saatte hasta yataktan kalkmadan numune alınmalıdır	K:Uygun numune R:Uygunsuz alım, beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
ORGANİKASİT ANALİZİ	9310	Her gün	Spot idrar	Yok	Yok	K:Uygun idrar kabı R:Uygunsuz alım, beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	4 hafta Sonra
OSMOLARİTE	8460(SERUM) 9160(24S) 9330(SPOT İDRAR)	Her gün	Serum 24 S idrar Spot idrар	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
OSTEOKALSİN	10150	Pazartesi (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra
OTOİMMÜN HEPATİT PANELİ (Otoimmün Karaciğer Profili)	16613	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
OXCARBAZEPİNE (TRİLEPTAL)	8470	Salı, Cuma (13.00)	Serum	Son 12 saatte ilacın alınmaması	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	6 gün Sonra 18:00
PARACETAMOL C20 IGE (ASETAMİNOFEN)	8480	Salı	Serum	Son 12 saatte ilacın alınmaması	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün Sonra 18:00
PARATHORMON (PTH,intact)	10160	Her gün	Serum	Yok	İlaç olarak kullanılıyorsa belirtilmelidir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz , oda ısısında 1 saatten fazla beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	60/106

PARANEOPLASTİK PANEL	16735	Her gün (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra
PARVO VİRUS B-19 IgG	15420	Perşembe (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
PARVO VİRUS B-19 IgM	15430	Perşembe (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	7 gün Sonra 18:00
PANKREATİK ELASTAZ (GAİTA)	17044	Her gün	Gaita	Yok	Yok	K:Uygun numune R:Uygunsuz alım	Soğuk zincir 2-8 C	20 gün Sonra
PERİFERİK YAYMA İNCELEMESİ	3200	Her gün	Tam kan	Yok	Şehir dışından gönderim yapan kurumlar için lama yayılarak gönderilen preparat.	K:Uygun Seviye R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00
PERİFERİK KANDA KROMOZOM ANALİZİ		Her gün	Heparinli tam kan	Yok	Yok	K:Uygun Seviye	Soğuk zincir 2-8 C	25 gün
PİRUVAT KİNAZ	8820	Her gün (13.00)	Edtalı tam kan	Yok	Yok	K:Uygun numune R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
PLAZMARENİN AKTİVİTESİ (PRA) (AYAKTA)	10260	Cuma (13.00)	Edtalı plazma	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	61/106

PORFİRİNLER (Total)	9170	Pazartesi (13.00)	İdrar	Yok	Karanlık ve soğuk ortamda toplanmalı ve gönderilmelidir	K:Uygun idrar kabı R:Uygunsuz alım, beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra
PORFOBİLİNOJEN	16950	Pazartesi (13.00)	24 S idrar, Spot idrar (5 ml)		Karanlık ve soğuk ortamda toplanmalı ve gönderilmelidir	K:Uygun idrar kabı R:Uygunsuz alım, beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra
POTASYUM (K+)	1440(SERUM) 1700(24S) 1860(SPOT İDRAR)	Her gün	Serum, 24 S idrar, Spot idrar BOS	Yok	İdrar için toplama süresi ve miktarı belirtilmelidir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
PREALBUMİN	8500	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
NT-PRO BNP (Pro Brain Natriüretik Peptid)	8520	Her gün	Serum	Yok	Numunenin hemen santrifüjü gerekir	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	Her gün 18:00
PROCALCİTONİN	10170	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
PROGESTERON	4190	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
PROLAKTİN (PRL)	4200	Her gün	Serum	3-6 saat açlık ve uyandıktan birkaç saat Sonra	Uykusuzluk,stres , egzersiz,coitus, Sonrası numune alınmamalıdır	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
PROSTATİKASİT FOSFATAZ (PAP)	8530	Her gün (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	62/106

PROTEİN	1480(SERUM) 1710(24S) 16586(BOS)	Her gün	Serum 24 S idrar, Spot idrar BOS vb.	Serum için10-12 saat açlık	Kısa süreli turnike	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
PROTEİN C AKTİVİTESİ	11190	Pazartesi (13.00)	Sitratlı plazma	Coumadin iki hafta önce heparin iki gün önce kesilmelidir.	Numune hemen ayrılmalıdır	K:Uygun numune R:Hemoliz, pıhtı	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
PROTEİN C ANTİJENİ	16726	Pazartesi (13.00)	Sitratlı plazma	Yok	Numune hemen ayrılmalıdır	K:Uygun numune R:Hemoliz, pıhtı	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
PROTEİN ELEKTROFOREZİ	8540(SERUM)	Çarşamba Cuma (13:00)	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
PROTEİN ELEKTROFOREZİ (İDRAR)	9190(İDRAR)	Her gün (13.00)	24 S idrar (asitsiz)	10-12 saat açlık	Yok	K:uygun numune R:uygunsuz kap	Soğuk zincir 2-8 C	12 gün sonra 18.00
PROTEİN S ANTİJENİ	11220	Pazartesi (13.00)	Sitratlı plazma	Yok	Numune hemen ayrılmalıdır	K:Uygun numune R:Hemoliz, pıhtı	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
PROTEİN S AKTİVİTESİ	11210	Pazartesi (13.00)	Sitratlı plazma	Coumadin iki hafta önce heparin iki gün önce kesilmelidir.	Numune hemen ayrılmalıdır	K:Uygun numune R:Hemoliz, pıhtı	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
PROTROMBİN ZAMANI (PTZ + INR)	3220	Her gün	Plazma	Coumadin kullanımından önce kan alınmalıdır	Numune hemen ayrılmalıdır	K:Uygun Seviye R:Pıhtılı, hemolizli numune	Soğuk zincir 2- 8 C	Aynı gün
PROTROMBİN (FAKTÖR II) GEN MUTASYONU	*LABA DANIŞIN	Her gün	Edtali tam kan (2 adet)	Yok	Yok	K:Uygun numune R:Hemoliz, pıhtı	Soğuk zincir 2-8 C	LABA DANIŞIN

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	63/106

PSASERBEST (FPSA)	4210	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Rektal muayeneden 72 saat sonra	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
PSA TOTAL (TPSA)	4220	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Rektal muayeneden 72 saat sonra	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
QUANTİFERON (TB- GOLD)	16543	Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe (15.00)	Özel tüp Laboratuvara danışın	Son numune Kabul Perşembe 15.00 da	Numune alındıktan tüpün iç yüzeyi bulaşacak şekilde 20 sn kuvvetlice çalkalanmalıdır.	K:Uygun alınmış numune R:Dondulmuş numune	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
RESPIRATORY SYNCYTİAL VİRUS IgG (RSV IgG)	16603	Pazartesi (13.00)	Serum	Yok	*	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
RESPIRATORY SYNCYTİAL VİRUS IgM (RSV IgM)	16602	Pazartesi (13.00)	Serum	Yok	*	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
RETİKÜLOSİT	1560	Her gün	Edtalı Tam kan	Şehir dışından gönderilecek numuneler için lab'a danışınız..	Şehir dışından gönderilecek numuneler için lab'a danışınız.	K:Uygun Seviye R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18.00
RF (ROMATOİD FAKTÖR) TURBİDİMETRİK	1450	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
SAFRA ASİTLERİ	8560	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00

**ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST
REHBERİ**

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	64/106

SALMONELLAGRUP AGLÜTİNASYON (GRUBER WİDAL)	16219	Her gün (16.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 16:00
SARS-COV 2 PCR (COVID)	17248	Her gün	Boğaz, Burun kombine sürüntü	Yok	Yok	K: Sürüntü numunesi R: Jelli - kuru swap	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18.00
SEDİMENTASYON (SEDİM,ESR)	3280	Her gün	Edtalı Tam kan	Yok	Yok	K:Uygun Seviye R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	65/106

SEKS HORMON BAĞLAYICI GLOBULİN (SHBG)	10200	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
SELENYUM (Se)	16040	Her gün	Serum,	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz,	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
SELENYUM (Se)	17100(SPOT İDRAR) 16643(24S)	Her gün	Spot idrar, 24 S idrar asitsiz	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, linemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra 18:00
SELENYUM (Se) ERİTROSİT İÇİ	17011	Her gün	Tam kan	Yok	Yok	K: Uygun seviye R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra 18:00
SEMEN (Meni,Sperm) KÜLTÜRÜ	6170	Her gün	Semen,meni	Genital Bölge temizliği	YOK	K:Steril idrar kabı R:Uyguns uzulum	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
SERBEST T3	4330	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Sabah açlığı ve ilaç kullanımı öncesi tercih edilir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, linemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
SERBEST T4	4240	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Sabah açlığı ve ilaç kullanımı öncesi tercih edilir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	66/106

SEROTONİN (5-OH TRİPTAMİN)	10190(SERUM)	Cuma (13.00)	Serum,	Hastalar, toplamadan önce ya da 48 saat boyunca avokado, muz, butternut, kavun, hurma, patlıcan, greyfurt, hiyar fındık, ballı karpuz, kivi, kavun, fındık, ceviz, ananas, antep fıstığı, erik, domates veya ceviz yememelidir.		K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
SEROTONİN (5-OH TRİPTAMİN) idrar	16277(24S)	Çarşamba Cuma (13.00)	24 s idrar	Hastalar, toplamadan önce ya da 48 saat boyunca avokado, muz, butternut, kavun, hurma, patlıcan, greyfurt, hiyar fındık, ballı karpuz, kivi, kavun, fındık, ceviz, ananas, antep fıstığı, erik, domates veya ceviz yememelidir.	İdrar (Spot) - 1 mL (min 0.5 mL) 24 saatlik İdrar (%50 Asetik asit üzerine İdrar toplanmalıdır ve soğukta saklanmalıdır)	K: uygun kap R: uygunsuz kap	Soğuk zincir 2-8 C	17 gün 18.00
SERULOPLAZMİN	8580	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
SERUM AMYLOİD A (SAA)	16270	Pazartesi (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	67/106

SICKLING TESTİ	16968	Her gün	Edtalı tam kan	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
SIROLIMUS (RAPAMUNE)	17137	Perşembe (13.00)	Edtalı tam kan	Yok	Aksi belirtilmedikçe idame düzey belirlenmesi için ilaç kullanımından hemen önce örnek alınmalıdır.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
SİSTATİN C	16987	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
SİSTİN	16316(24S) 16321(SPOT İDRAR)	Her gün	24 S idrar, Spot idrar	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün Sonra 18:00
SİTRAT	9200(24S) 16290(SPOT İDRAR)	Cuma (13.00)	Spot idrar, 24 S idrar	Yok	24 saatlik idrar numunesi toplamadan önce idrar toplama kabına 30 ml toluen ilave edilmelidir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
SODYUM (Na+)	1455(SERUM) 1720(24S) 1850(SPOT İDRAR) 2140(BOS)	Her gün	Serum, 24 s idrar, Spot idrar BOS vb.	Yok	İdrar için toplama süresi ve miktarı belirtilmelidir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	68/106

SOLUBLE TRANSFERRİN RECEPTÖR	16967	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
SPERMYOGRAM	16230	Her gün (cumartesi günü hariç)	Semen,meni	En az 3 gün cinsel perhiz gerekir	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
SPESİFİK IgE BESLENME TARAMA (FP7)	12700	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00
SPESİFİK IgE SOLUNUM TARAMA (IP8)	12910	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00
SPESİFİK IgE KEDİ TÜYÜ EPİTELİ (E1)	16797	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00
SPESİFİK IgE KÖPEK TÜYÜ EPİTELİ (E5)	16798	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00
SPESİFİK IgE YUMURTA AKI (F1)	12750	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00



ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	69/106

SPESİFİK IgE YUMURTA SARISI (F75)	12800	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00
SPESİFİK IgE İNEK SÜTÜ (F2)	12780	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	70/106

SPESİFİK IgE ler –Her biri Sp. IgE BAL (RF247) Sp. IgE C1 Penisilol G Sp. IgE C2 Penisilol V Sp. IgE C203 Ampisilin Sp. IgE C204 Amoksisilin Sp. IgE C73 İnsülin (insan) Sp. IgE D1 Derm.Pteronyssinus Sp. IgE D2 Derm.Farinae Sp. IgE DP1 Mite (Akar) kar. Sp. IgE Echinococcus (p2) Sp. IgE EP1 Hayvan tüyleri Sp. IgE EP71 Hayvan tüyleri Sp. IgE EP72 Hayvan tüyleri Sp. IgE Epital kar. TEx2 Sp. IgE F105 Çikolata Sp. IgE F11 Karabuğday Sp. IgE F13 Yer Fıstığı Sp. IgE F14 Soya Fasülyesi Sp. IgE F17 Fındık Sp. IgE I6 Hamamböceği Sp. IgE I71 Sivrisinek Sp. IgE K82 Latex Sp. IgE M1 Penicilium notatum Sp. IgE M2 Cladosporium Herbarum Sp. IgE M207 Aspergillus niger Sp. IgE M3 Aspergilus Sp. IgE M5 Candida Sp. IgE M6 Alternaria Alternata Sp. IgE T9 Zeytin Ağacı	*LABA DANIŞIN	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
---	---------------	---------	-------	-----	-----	------------------------------------	-----------------------	-------------------------

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	71/106

Sp. IgE F204 Alabalık Sp. IgE F245 Yumurta Sp. IgE F25 Domates Sp. IgE F27 Kırmızı Et Sp. IgE F3 Balık (Morina) Sp. IgE F33 Portakal Sp. IgE F35 Patates Sp. IgE F360 Yoğurt Sp. IgE F4 Buğday Unu Sp. IgE F409 Keçi Sütü Sp. IgE F41 Somon Balığı Sp. IgE F44 Çilek Sp. IgE F45 Ekmek Mayası Sp. IgE F76 Alfa Laktalbumin Sp. IgE F77 Beta Laktoglobulin Sp. IgE F78 Kazein Sp. IgE F79 Gluten Sp. IgE F8 Mısır Sp. IgE F83 Tavuk Eti Sp. IgE F9 Pirinç Sp. IgE F92 Muz Sp. IgE F93 Kakao Sp. IgE I1 Bal Arısı Zehiri Sp. IgE I2 Eşek Arısı Zehiri Sp. IgE I1 Yaban Arısı Zehiri Sp. IgE I1 Sarıca Arı Zehiri Sp. IgE T11 Çınar Ağacı Sp. IgE T12 Söğüt Ağacı Sp. IgE Kavak Ağacı	*	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
--	---	---------	-------	-----	-----	------------------------------------	-----------------------	-------------------------

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	72/106

Sp. IgE GP1 Çayır (Ot-Polen) Karışımı Sp. IgE GP2 Çayır (Ot-Polen) Karışımı Sp. IgE H2 EV Tozu Karışımı Sp. IgE HP1 EV Tozu Karışımı Sp. IgE ağaç kar.Tx23 Sp. IgE TP1 Ağaç karışımı Sp. IgE TP5 Ağaç karışımı Sp. IgE TP7 Ağaç karışımı Sp. IgE WP1 Yabani Ot karışımı Sp. IgE WP3 Yabani Ot karışımı Sp. IgE Yatak Tüyleri Sp. IgE FP13 Sebze gıda karışımı Sp. IgE Gıda karışım (fp5) Sp. IgE WP3 Yabani Ot karışımı Sp. IgE Yatak Tüyleri Sp. IgE FP13 Sebze gıda karışımı Sp. IgE Gıda karışım (fp5) Sp. IgE MP1 Küf Karışımı	*	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
SP. IGE TÜRKİYE PANELİ GIDA	17012	Pazartesi Çarşamba Cuma (09:00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18.00
SP. IGE TÜRKİYE PANELİ SOLUNUM	17188	Pazartesi Çarşamba Cuma (09:00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18.00
SP. IGE PANELİ PEDIATRİK	17189	Pazartesi Çarşamba Cuma (09:00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18.00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	73/106

SPERM DNA HASARI	17076	Her gün	Semen	Lab'a danışınız	3-7 gün arasında seksüel perhiz ve hastanın genel sağlığının iyi olduğu durumda örnek alınır.	*	*	15 gün Sonra 18:00
T. PALLİDUM HEMAGLÜTİNASYON (TPHA)	15440	Salı Cuma (09-00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün 18:00
TAKROLİMUS (FK 506)	8880	Perşembe (13.00)	Edtali tam kan	Yok	Hastanın son ilaç kullanma zamanı ve dozu belirtilmelidir.	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
TAM İDRAR TAHLİLİ (TİT)	16231	Her gün	Spot idrar	Yok	Yok	K:Uygun kaba alınması R:Aşırı dilüe veya çok az numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
TAM KAN TAHLİLİ (HEMOGRAM)	16923	Her gün	Tam kan	Yok	Yok	K:Uygun Seviye R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün

**ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST
REHBERİ**

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	74/106

TAŞ ANALİZİ (ÜRİNER SİSTEM)	16583(DİĞER TAŞ) 9370(ÜRİNER SİSTEM)	Her gün (13:00)	Materyal	Yok	Yok	K:Uygun numune R:	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
TCA (TRIKLOR ASETİK ASİT)	16693	Her gün	Spot idrar	Yok	Yok	K:Uygun kaba alınması R:Aşırı dilüe veya çok az numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün Sonra 18:00
TEOFİLİN (Aminocardol, Teok ap)	8600	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Hastanın son ilaç kullanma zamanı ve dozu belirtilmelidir	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
TESTOSTER ON SERBEST	10180	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Sabah açlığı numunesi tercih edilir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün sonra
TESTOSTER ON TOTAL	4280	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Sabah açlığı numunesi tercih edilir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
TETANOZ ANTİKOR	16571	Pazartesi (13.00)	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
TİROGLOBULİN	10210	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Sabah açlığı numunesi tercih edilir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
TİROKSİN BAĞLAYICI GLOBULİN (TBG)	17434	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00

TOTAL LİPİD	16677	Her gün	Serum	10-12 saat açlık Total lipid için Klosterol ve trigliserit birlikte çalışılmalıdır.	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
TOTAL PROTEİN	1480	Her gün	Serum	YOK.	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
TOTAL T3	4260	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Sabah açlığı numunesi tercih edilir	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
TOTAL DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ	16564	Her gün	Serum	Total demir bağlama kapasitesi için demir doymamış demir bağlama testleri ile	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
TOTAL T4	4270	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Sabah açlığı numunesi tercih edilir	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, iktet	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
TOXOPLAZMA PCR	17038	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	12 gün Sonra 18:00
TOXOPLAZMA IgG	5190	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
TOXOPLAZMA IgG AVİDİTE	15050	Perşembe (09.00)	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması ve IgG testinin pozitif olması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün 18:30
TOXOPLAZMA IgM	5210	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün

TRAB (TSH RESEPTÖR ANTİKORU-TRAC)	10220	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün sonra
TRİGLİSERİD	16223	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
TRİCHOMONAS ARANMASI	16632	Her gün	Kadın: vaginal smear, servikal smear, uretral smear, İdrar Erkek: üretal sekresyon, prostat sıvısı, İdrar	Yok	Yok	K:Uygun steril kaba alınması R:Uygunsuz alım	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün sonra
TRİPTAZ	16757	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	35 gün 18:00
TRICHOMONAS BAKISI		Her gün	Sürüntü numunesi	Yok	Yok	K:Steril transport besiyeri R:Uygunsuz alım	Soğuk zincir 2-8 C	Ertesi gün
TROMBOFİLİ PANELİ 6 MUTASYON <i>MTHFR (A1298C) , MTHFR (C677T), FAKTÖR 2 (PROTROMBİN), FAKTÖR 5 LEİDEN, FAKTÖR 5 CAMBRIDGE, PAI</i>	17056	Her gün	2 adet Edtalı tam kan	Yok	Yok	K:Uygun tüpe alınması R:Pıhtılı numune	Soğuk zincir 2-8 C	21 gün Sonra
TROPONİN I	17281	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	77/106

TROPONİN T	8150	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra
TSH (TİROİD STİMÜLAN HORMON)	16979	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Sabah açlığı numunesi tercih edilir	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi, ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
TSİ (TİROİD STİMÜLEEDİCİ İMMÜN GLOBULİN)	16601	Salı (13.00)	Serum	10-12 saat açlık	Sabah açlığı numunesi tercih edilir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
ÜÇLÜ TARAMA TESTİ (İkinci Trimester Tarama Testi)	16232(AFP ÜÇLÜ TARAMA) 16233(ESTRİ OL ÜÇLÜ T.) 16234(B-HCG ÜÇLÜ T.) 16743(RAPOR)	Her gün	Serum	BPD ölçümünü içeren özel test formu mutlaka doldurulmalıdı r	Gebeliğin 15 hf+0 gün ile 20 hf+6 gün arasında kan alınmalıdır	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz ,lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
ÜRE	1030	Her gün	Serum, 24 s idrar	Serum için, 10-12 saat açlık BUN hesaplaması için üre testi çalışılması gerekmektedir.	İdrar için toplama süresi ve miktarı belirtilmelidir.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
ÜREAPLASMA ÜREALYTİCUM KÜLTÜRÜ	17088	Pazartesi Çarşamba	Üretral ya da servikal örnek	Yok	Yok	K:Jelli transport besiyeri , Steril kap R:Uygunsuz alım	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00

ÜRİK ASİT (ÜRAT)	1040	Her gün	Serum, 24 s idrar	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
VAJİNAL KÜLTÜR	6180	Her gün	Sürüntü numunesi	Yok	Yok	K:Steril transport besiyeri R:Uygunsuz alım	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00
VALPROİK ASİT (Depakin)	8640	Her gün	Serum	Son 12 saatte ilacın alınmaması	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
VDRL (RPR)	5420	Her gün	Serum	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
VİTAMİN A (RETİNOL, VİT-A)	8650	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Son 24 saat içinde alkol kullanılmamalıdır	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C Işıktan korunmalı	30 gün Sonra
VİTAMİN B1 (TİAMİN)	16615	Çarşamba (13.00)	Edtali tam kan	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
VİTAMİN B12	1490	Her gün	Serum	10-12 saat açlık	Son 24 saat içinde alkol kullanılmamalıdır.	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
VİTAMİN B2 (RİBOFLAVİN)	16846	Çarşamba (13.00)	Edtali tam kan	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	79/106

VİTAMİN B6 (PİRİDOKSİN)	16325	Çarşamba (13.00)	Edtalı Tam Kan	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	5 gün Sonra 18:00
VİTAMİN C (ASKORBİK ASİT)	8920	Cuma (13.00)	Heparinli Plazma	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir Işıktan korunmalı	6 gün Sonra 18:00
VİTAMİN D3 (25- HİDROKSİKOLEKALS İFEROL)	8890	Her gün	Serum	3-6 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	Aynı gün
VİTAMİN D3 (Aktif) (1,25- DİHİDROKSİKOLEKA LSİFEROL)	8660	Cuma (13.00)	Serum	3-6 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	6 gün Sonra 18:00
VİTAMİN E (ALFA TOKOFEROL)	8670	Cuma (13.00)	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir Işıktan korunmalı	6 gün Sonra 18:00
VİTAMİN H (BİOTİN) vitamin b7	16656	Cuma (13.00)	Serum	10-12 saat açlık	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir Işıktan korunmalı	5 gün Sonra 18:00
VMA (VANİL MANDELİK ASİT)	16917(SPOT İDRAR) 16274(24S)	Pazartesi (13.00)	24 S idrar, spot idrar	Yok	6 N HCL üzerine toplanmış idrar	K:Uygun idrar kabı R:Uygunsuz alım, beklemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
VON WİLLEBRAND FAKTÖRAKTİVİTESİ	11230	Çarşamba (13.00)	Sitratlı plazma	Yok	Numune hemen ayrılmalıdır	K:Santrifüjlü numune R:Pıhtı,Hemoliz, uygunsuz antikoagülan	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00
VON WİLLEBRAND FAKTÖRANTİJENİ	16758	Pazartesi (13.00)	Sitratlı plazma	Yok	Numune hemen ayrılmalıdır	K:Santrifüjlü numune R:Pıhtı,Hemoliz, uygunsuz antikoagülan	Soğuk zincir 2-8 C	3 gün Sonra 18:00

**ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST
REHBERİ**

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	80/106

VZV IGG (VARİCELLA ZOSTER IGG)	15450	Pazartesi Çarşamba (13.00)	Serum BOS	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
VZV IGM (VARİCELLA ZOSTER IGM)	15460	Pazartesi Çarşamba (13.00)	Serum BOS	Yok	Yok	K:Santrifüjlü numune R:Hemoliz, lipemi,ikter	Soğuk zincir 2-8 C	4 gün Sonra 18:00
YARAKÜLTÜRÜ	6190	Her gün	Enfekte bölgeden alınan numune	Yok	Yok	K:Steril kap ve transport besiyeri R:Uygunsuz alım	Soğuk zincir 2-8 C	2 gün Sonra 18:00

**ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST
REHBERİ**

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	81/106

YENİDOĞAN METABOLİK TARAMA	8960	Her gün (13.00)	Topuktan emdirilmiş kan Laboratuva ra danışın	Doğumun 24 saat sonrasında numune alınmalıdır	En az bir kere anne sütü veya mama gibi proteinli besinle beslenmiş olmalıdır	K:Uygun numune R:Özel kağıda emdirilmemiş numune	Uygun transfer	12 gün Sonra 18:00
ZONULİN (GAİTA)	17456	Her gün	Gaita	Yok	Yok	K:Steril kap ve transport R:Uygunsuz alım	Soğuk zincir 2-8 C Uygun transfer	35 Gün Sonra 18:00

ÖNEMLİ AÇIKLAMA:

*ÖN HAZIRLIK GEREKSİNİMİ YA DA NUMUNE ALIM KURALLARINDA ;***Danışınız** KODU BULUNAN TESTLER ÖZEL HAZIRLIK YA DA ALIM KURALLARI GEREKTİRMEKTEDİR. LÜTFEN ÖNCEDEN LABORATUVARIMIZA DANIŞINIZ.

* SADECE SONUÇ ZAMANI ‘**AYNI GÜN OLAN TESTLER ACİL KAPSAMINDADIR VE ACİL OLARAK** ÇALIŞILMASI MÜMKÜNDÜR.

* ACİL TESTLER GEREKİRSE DİĞER TESTLER YARIDA KESİLEREK ÇALIŞILIR VE LABORATUVAR KABUL SAATİNDEN SONRA EN KISA SÜRE İÇİNDE SONUÇLANDIRILIR. ;*Teste göre değişiklik gösterebilir, danışınız. ACİL TESTLERDE TEST TEKRARI YAPILMAZ. DİĞER HASTALARIMIZIN DA HAKKINI KORUMAK ADINA LÜTFEN KESİN GEREKLİ OLMADIKÇA **ACİL** SEÇENEĞİNİ KULLANMAYINIZ.

* DİĞER TESTLERDEN **SONUÇ ZAMANI AYNIGÜN OLANLARDAN** KABUL SAATİ 12:00 YE KADAR OLANLAR, SAAT 16:30A KADAR RAPORLANDIRILIR. BU SAATTEN SONRA ;ÖĞLEDEN SONRA KABULÜ YAPILANLAR SAAT 18:30 DAN SONRA RAPORLANDIRILIR.

* AYNIGÜN ÇALIŞILMAYAN TESTLER İÇİN GÜN İÇİ RAPORLANDIRMA SAATİ 18:00 DİR.

* NUMUNE KABUL'Ü HAFTA İÇİ SAAT 18:00 A KADAR, HAFTA SONU ;CUMARTESİJ İSE SAAT 15:00 A KADARDIR. BU SAATLERDEN SONRA LABORATUVARA ULAŞAN NUMUNELER ÇALIŞMAYA ALINMAYIP BİR SONRAKİ ÇALIŞMAYA KALACAKTIR.

* TESTLERİN REFERANS ARALIKLARI HASTAYA AİT BİLGİLER İLE ;YAŞ, CİNSİYET, İLAÇ ALIMI VB.J DOĞRUDAN İLİŞKİLİDİR. BU YÜZDEN HASTA BİLGİLERİNİN EKSİKSİZ OLARAK BİLDİRİLMESİNE ÖZEN GÖSTERİNİZ.

* REHBERDE BULUNMAYAN TESTLER İÇİN LÜTFEN DOĞRUDAN LABORATUVARDAN BİLGİ ALINIZ.

TELEFON: 0850 850 13 23

PATOLOJİ BÖLÜMÜ

TEST REHBERİ

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	84/106

TEST ADI	ÇALIŞMA ZAMANI	NUMUNE TÜRÜ	ÖN HAZIRLIK GEREKSİ NİMİ	NUMUNE ALIM KURALLARI	KABUL(K)-RET (R) KRİTERLERİ	TRANSFER ŞARTLARI	SONUÇ ZAMANI
ABORTUS	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
ADRENAL (SÜRRENAL), REZEKSİYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
AĞIZ MUKOZASI/GİNGİVA BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
AKCİĞER, KAMA BİOPSİSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
AKCİĞER, TOTAL/LOB/SEGMENT REZEKSİYONU	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	85/106

AKCİĞER, TRANSBRONŞİYAL BİOPSİSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
ANEVRİZMA, ARTERYAL/VENTRİKÜLE	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
ANÜS, POLİPOİD GELİŞME (TAG)	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
APENDİKS İNSİDENTAL (ASIL AMELİYATA EK)	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
APENDİKS İNSİDENTAL DIŞINDA	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
ABSE MATERYALİ	Her gün	Biopsi/ Sitoloji	Yok	Yok	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	8 gün sonra
ARTER, ATEROM PLAĞI	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	86/106

ARTER, BİOPSİSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
BARTHOLİN BEZİ KİSTİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
BEYİN MENİNKSLER, TÜMÖR REZEKSİYONU	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
BEYİN, BİOPSİSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
BEYİN/MENİNKSLER, TÜMÖR REZEKSİYONU	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
BÖBREK, BİOPSİ İĞNE	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
BÖBREK, PARŞİYEL /TOTAL NEFREKTOMİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
BRONKUS, BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	87/106

BURSA/SYNOVİAL KİST	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
BURUN MUKOZASI, BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
BURUN SİNÜS POLİPLERİ İNFLAMMATUAR	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
DALAK	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
DERİ, EKSIZYONEL BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
DERİ, PUNCH/İNSIZYONEL/SHAVE	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
DİL, BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
DİL/TONSİL-TÜMÖR İÇEREN REZEKSİYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	88/106

DİŞ/ODONTOJENİK KİST	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
DİVERTİKÜL-ÖZOFAGUS/İNCE BARSAK	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
DOKU ÖRNEĞİNİN BLOK HALİNE GETİRİLMESİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
DUDAK, BİOPSİ/WEDGE(KAMA) REZEKSİYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
DUODENUM, BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
DUPUYTREN KONTRAKTÜRÜ DOKUSU	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
EKLEM, GEVŞEK CİSİM	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
EKLEM, REZEKSİYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	89/106

EKSTREMİTE, AMPUTASYON, TRAVMA	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
EKSTREMİTE, DİSARTİKÜLASYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
ENDOMETRİUM, KÜRETAJ/BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
ENDOSERVİKS, KÜRETAJ/BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
FEMUR BAŞI, KIRIK	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
FEMUR BAŞI, KIRIK DIŞINDA	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
FETUS, DİSEKSİYONLA İNCELEME	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
FİSSÜR/FİSTÜL	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
GANGLİON KİSTİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	90/106

GÖZ, EKSENTRASYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
GÖZ, ENÜKLEASYON/ EVİSSERASYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
HAZIR BOYALI PREPARAT VEYA PARAFİN BLOK	Her gün	Konsültasyon	Yok	Yok	Yok	Yok	10 gün sonra
HEMATOM	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
HEMORÖİDLER	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
HERNİ KESESİ, HERHANGİ BİR BÖLGEDE	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
HİDROSEL KESESİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
HİPOFİZ TÜMÖRÜ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	91/106

HİSTOKİMYASAL BOYAMALAR	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
İMMÜNHİSTOKİMYASAL İNCELEME	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
İNCE BARSAK, BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
İNCE BARSAK, REZEKSİYON, TÜMÖR	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
İNCE BARSAK, TÜMÖR İÇİN REZEKSİYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
İNCE İĞNE ASPİRASYONU DEĞERLENDİRİLMESİ	Her gün	Sitoloji	Yok	Yok	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	8 gün sonra
İNCE İĞNE ASPİRASYONU GÖNDERİLMESİ YAYMA PREPARATLARI	Her gün	Sitoloji	Yok	Yok	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	8 gün sonra
İNTERVERTEBRAL DİSK	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	92/106

KALP KAPAKÇIĞI	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
KARACİĞER, BİOPSİ İĞNE/WEDGE	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
KARACİĞER, KİSMİ REZEKSİYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
KARPEL TÜNEL DOKUSU	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
KAS, BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
KEMİK-BİOPSİ/KÜRETAJ MATERYALİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
KEMİK FRAGMANLARI, PATOLOJİK KIRIK	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
KEMİK FRAGMENTLERİ,PATOLOJİK KIRIK DIŞI	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
KEMİK İLİĞİ BİOPSİSİ, PATOLOJİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	93/106

KEMİK, EKZOSİTOZ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
KEMİK, REZEKSİYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
KESİT GÖRÜNTÜLERİNİN BASILMASI	Her gün	Biopsi	Yok	Yok	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
KIKIRDAK, SHAVİNG	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
KOLESTEATOMA	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
KOLON, BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
KOLON, BİOPSİ ÇOKLU LOKALİZASYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
KOLON, KOLOSTOMİ STOMASI	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	94/106

KOLON, SEGMENTAL REZEKSİYON, TÜMÖR DIŞI	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
KOLON, TOTAL REZEKSİYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
KOLON, TÜMÖR İÇİN SEGMENTAL REZEKSİYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
KONJONKTİVA, BİOPSİ / PTERYGIUM	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
KORNEA	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
LARİNK, BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
LARİNK, PARSİYEL/TOTAL+BOYU	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
LARİNK, PARSİYEL/TOTAL REZEKSİYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
LENF DÜĞÜMLERİ, REGIONAL REZEKSİYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	95/106

LENF DÜĞÜMÜ, BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
MANDİBULEKTOMİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
MEDİASTEN, KİTLE	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
MEME, BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
MEME, MASTEKTOMİ-PARSİYEL BASİT	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
MEME, MASTEKTOMİ + AKSİLLA LENF NODLARI	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
MEME/REDÜKSİYON MAMMOPLASTİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
MENİSKÜS	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	96/106

MESANE, PARŞİYEL/TOTAL REZEKSİYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
MESANE, TUR	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
MİDE, BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
MİDE, SUBTOTAL/TOTAL REZEKSİYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
MİDE, TÜMÖR İÇİN SUBTOTAL/TOTAL REZEKSİYON	Her gün	BiopsiİEL.PR.10.TR.01 ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
MUKOSEL, TÜKRÜK	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
MYOKARD, BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	97/106

MYOM(LAR), MYOMEKTOMİ, UTERUS HARİÇ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
NAZOFARİNK/OROFARİNK, BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
NÖROMA- MORTON/TRAVMATİK	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
ODONTOJENİK TÜMÖR	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
OMENTUM, BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
OTOPSİ, FETUS	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
OTOPSİ, TIBBİ AMAÇLI	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
OVER(+/- TUBA), NEOPLASTİK DEĞİL	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	98/106

OVER(+/- TUBA) NEOPLASTİK	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
OVER, BİOPSİ/WEDGE (KAMA) REZEKSİYONU	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
ÖZOFAGUS, BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
ÖZOFAGUS, PARSİYEL/TOTAL REZEKSİYONU	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
PANKREAS, BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
PANKREAS, TOTAL/SUBTOTAL REZEKSİYONU	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
PAP SMEAR	Her gün	Sitoloji (Konvansiyonel)	Yok	Yok	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	8 gün sonra
PARATİROİD BEZİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	99/106

PARATUBAL KİSTLER (MORGAGNİ HİDATİ)	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
PARMAK EL/AYAK, AMPUTASYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
PARMAKLAR EL/AYAK, AMPUTASYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
PERİTON, BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
PİLONİDAL KİST/SİNÜS	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
PLASENTA	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
PLEVRA/PERİKARD-BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	100/106

POLİP, KOLOREKTAL	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
POLİP, MİDE/İNCE BARSAK	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
POLİP, SERVİKAL/ENDOMETRİAL	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
PROSTAT, İĞNE BİOPSİSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
PROSTAT, RADİKAL REZEKSİYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
PROSTAT, RADİKAL REZEKSİYON DIŞINDA	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
PROSTAT, TUR	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
SAFRA KESESİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
SERVİKS, BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	101/106

SERVİKS, KONİZASYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
SEMPATİK GANGLİON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
SIVI BAZLI SİTOLOJİ MANUEL	Her gün	Sitoloji (Sıvı Bazlı)	Santrifüj	Yok	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	8 gün sonra
SIVI BAZLI SİTOLOJİ OTOMATİK	Her gün	Sitoloji (Sıvı Bazlı)	Yok	Yok	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	8 gün sonra
SİNİR, VAGOTOMİ VE BENZERİ GİRİŞİM	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
SİNÜS, PARANASAL BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
SPERMATOSEL	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
SÜNNET DERİSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
SYNOVİUM	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	102/106

TAHNİT	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
TENDON/TENDON KILIFI, TÜMÖR DIŞI	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
TESTİKÜLER APENDİKS	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
TESTİS, BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
TESTİS, KASTASYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
TESTİS, TÜMÖR	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
TESTİS, TÜMÖR/BİOPSİ/ KASTASYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
TİMÜS, TÜMÖR	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	103/106

TİROGLOSSAL KANAL/BRANKİAL YARIK	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
TİROİD, TOTAL/LOBEKTOMİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
TONSİL VE/VEYA ADENOİDLER	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
TRAKEA, BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
TROMBÜS VEYA EMBOLUS	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
TUBA UTERİNA, BİOPSİ VE STERİLİZASYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
TUBA UTERİNA, EKTOPİK GEBELİK	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
TÜKRÜK BEZİ /TÜMÖR DAHİL)	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	104/106

TÜKRÜK BEZİ, BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
UTERUS, (+/- ADENKSİLER), TM VE PROLAPSUS HARİÇ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
UTERUS, NEOPLASTİK (+/- TUBALAR)	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
UTERUS, PROLAPSUS İÇİN (+/- TUBALAR)	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
ÜRETER, BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
ÜRETER, REZEKSİYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
ÜRETRA, BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	105/106

VAJİNA, BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
VARİKOSEL	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
VAS DEFERENS	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
VEN, VARİS	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
VULVA, TOTAL/SUBTOTAL REZEKSİYONU	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
VULVA/LABİA, BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
VÜCUT SIVILARI VE EKSFOLİYATİF SİTOLOJİ	Her gün	Sitoloji	Santrifüj	Yok	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	8 gün sonra
YUMUŞAK DOKU BASİT EKSIZYON, LİPOM	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARI TEST REHBERİ

Doküman No	İEL.PR.10.TR. 01
Yayın Tarihi	18.10.2024
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	16.01.2026
Sayfa No	106/106

YUMUŞAK DOKU LİPOM EKSİZYONU VE BİOPSİ	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra
YUMUŞAK DOKU TÜMÖRÜ, GENİŞ REZEKSİYON	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	15 gün sonra
YUMUŞAK DOKU, DEBRİDMAN	Her gün	Biopsi	Yok	%10'luk formaldehit de kabul edilir.	K: Uygun alım R: Patoloji istem formu ve doku örneği gönderilmemiş numune	Soğuk zincir 2-8 C	10 gün sonra